


QUANTUM

바디프랜드
마사지체어
퀀텀
사용 설명서

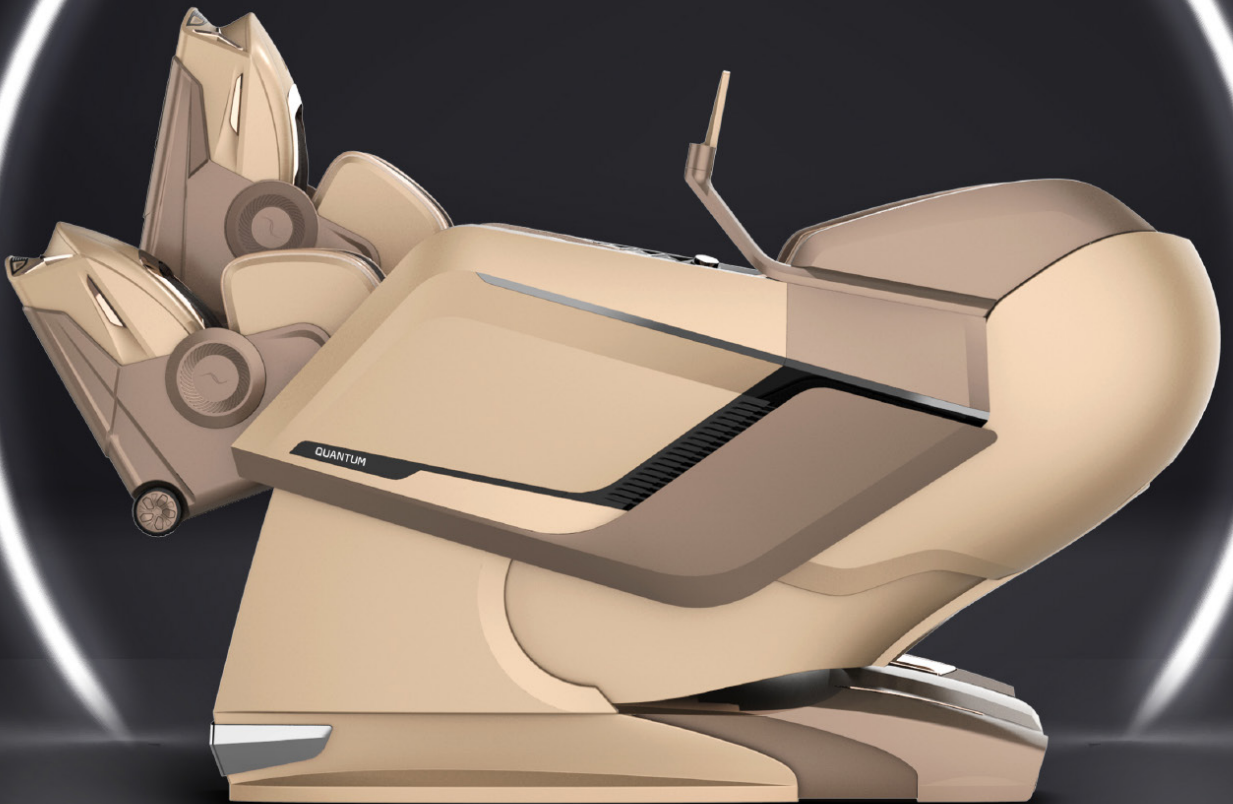

※ 본 설명서의 이미지 및 내용은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 본 설명서의 업데이트 사항은 뒤표지에 있는 QR코드를 통해 확인하실 수 있습니다.
※ 본 설명서의 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 실제 마사지체어와 다를 수 있습니다.
※ 본 설명서의 이미지는 고객의 모델 선택에 따라 실제 마사지체어와 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

인사말

바디프랜드 마사지체어 [퀀텀]을 구입해 주신 고객님께 깊이 감사드립니다.

사용 설명서를 읽어 보신 후 보다 안전하고 편리하게 사용하시기를 바랍니다.

본 제품은 별도의 고지 없이 제품의 성능 향상을 위하여 변경될 수 있으며, 그럴 경우 사용 설명서의 내용 및 이미지와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

※ 제품을 사용하기 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용 바랍니다.

※ 본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

※ 본 제품의 이미지 및 사양은 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 특징



다리 마사지부
좌/우 개별 동작



XD PRO



인체 공학적
입체 프레임



건강 모드



멘탈 마사지




온열 마사지볼



종아리/발바닥
온열



PNF 스트레칭

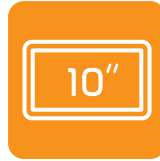

10인치
태블릿 리모컨



내측키 컨트롤



정전 보호 버튼



15개 안전 센서



블루투스 자동 연결



천연 가죽 시트



무선 충전

XD PRO

XD PRO 모듈의 고성능 센서가 마사지 부위를 세세하게 인식하여 더욱 섬세하고 정교한 마사지를 제공해 줍니다.

다리 마사지부 개별 동작

좌/우 다리 마사지부의 독립적인 움직임으로 특화된 마사지를 제공해 줍니다.

안전 강화

다리부와 후면부에 총 15개의 끼임 감지 센서를 적용하여 사용자의 안전을 강화하였습니다.

목차

	제품 특징	02
사용 전 안내 사항	안전을 위한 주의 사항	04
	제품 각 부분 명칭 이동 및 설치	13
	제품 연결 방법 끼임 감지 안내	14
리모컨 설명	내측키 설명	15
	태블릿 리모컨 작동 설명	16
기능 설명	로보 모드 헬스케어 마사지	22
	브레인 마사지 멘탈 마사지	23
	수동 모드	24
	자동 모드	25
스페셜 기능 설명	XD PRO 모듈 설명	26
	로보 모드 프로그램	27
	브레인 마사지 프로그램	28
	멘탈 마사지 프로그램	30
제품 사양	제품 규격 및 사양	31
고장 진단 및 조치	고장 신고 전 확인 사항	32
	고객 서비스 안내	33
제품 보증서	제품 보증서	34

안전을 위한 주의 사항

※ 다음 지시된 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기를 바랍니다.

※ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



경고

화상, 화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이기 위해



주의

부상의 위험을 방지하기 위해

사용 전 주의 사항



경고

목욕탕이나 습기가 많은 곳을 피하여 설치 및 사용하시기를 바랍니다.

감전, 화재, 변형, 곰팡이, 고장 등의 원인이 됩니다.




먼지가 많거나 녹이 슬 수 있는 장소를 피하여 설치 및 사용하시기를 바랍니다.

감전, 화재, 변형, 곰팡이, 고장 등의 원인이 됩니다.




직사광선 아래 또는 실내 온도가 40°C를 초과하는 환경에서는 사용하지 마십시오.

화재, 고장의 원인이 됩니다.

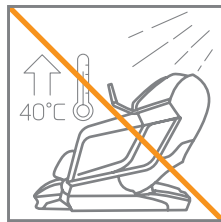


실외에 설치하지 마십시오.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

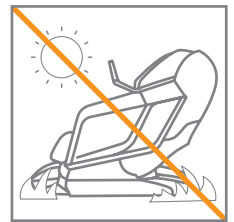

난방 기구 근처나 열 발생 장치 등의 근처에서 사용하지 마십시오.

제품 손상, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

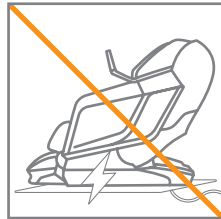

바닥이 평평하고 안정된 장소에 설치 및 사용하시기를 바랍니다.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.




안전을 위한 주의 사항

사용 전 주의 사항


⚠ 경고

사용하기 적당한 공간과 환기가 잘 되는 곳에 설치하시기를 바랍니다.

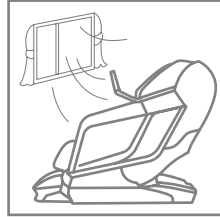


변형, 곰팡이, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품을 임의로 분해하여 사용하지 마십시오.

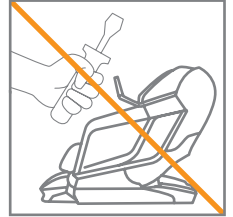

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

다른 전기제품 또는 의료제품과의 혼용을 자제하여 주시기를 바랍니다.

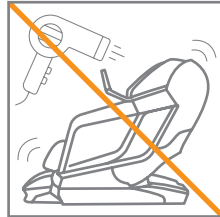


안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품에 이물질을 쏟거나 뿌리지 마십시오.




안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

본 제품 위에 무게가 많이 나가는 제품을 올려놓지 마십시오.

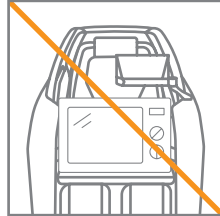

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

유아나 반려동물 등이 본 제품의 하단부, 후면부, 다리 조정부 등으로 들어가지 않도록 주의하시기를 바랍니다.

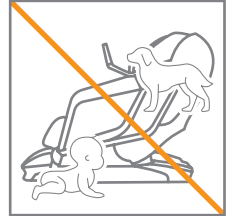

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

기술자의 도움 없이 기기를 설치하거나 수리하지 마십시오.



안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

본 제품은 설명서에 기재된 용도 이외에 사용하지 마십시오.



안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.


안전을 위한 주의 사항

사용 전 주의 사항

⚠ 주의


제품을 전원 케이블로 운반하거나, 손으로 케이블을 잡아당기지 마십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

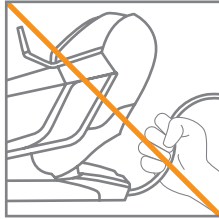


제품을 보호 접지된 전원 콘센트에만 연결하십시오.

감전, 상해의 원인이 됩니다.

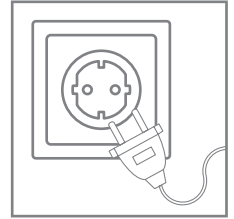


사용하기 전에 제품의 전원 상태를 확인하십시오.

제품의 올바른 사용이 가능합니다.

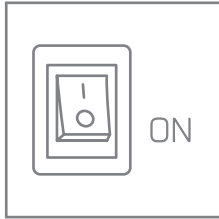


전원은 교류 220V 전용 콘센트를 사용하십시오.

고장 또는 누전 시 감전의 원인이 됩니다.

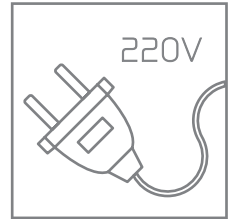


본 제품을 전원 분리가 어려운 곳에 설치하지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

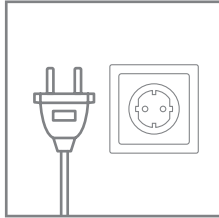


전원 플러그를 분리할 때 케이블을 잡아당기지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

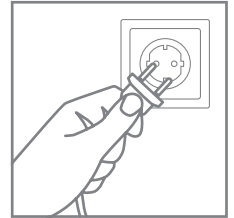


제품의 안전 센서 동작 상태와 제품 복귀 전 유아나 반려동물이 근처에 있는지 확인한 후 사용하십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

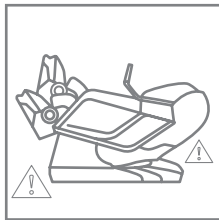

청바지 등의 짙은 색상 옷을 입고 사용 시 제품 시트에 이염이 될 가능성이 있으니 주의하십시오.

시트 이염의 원인이 됩니다.

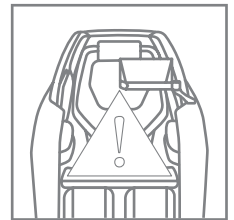

안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의 사항

⚠ 경고


제품의 조작 방법 및 발생할 수 있는 부작용 사례를 확인하십시오.

제품의 올바른 사용이 가능합니다.



전원 플러그를 꽂거나 뽑을 때 젖은 손은 감전의 위험이 있습니다.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

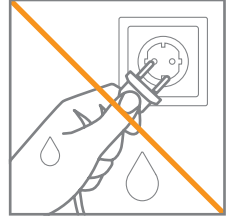

사용자의 몸이 젖은 상태에서 제품을 사용하지 마십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.




과도한 식사 후 바로 사용하지 마십시오.

부상의 원인이 됩니다.




사용 중 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의하시기를 바랍니다.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

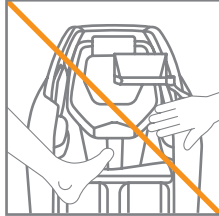


신체의 특정 부분을 집중적으로 사용 시 몸에 무리가 올 수 있으니 주의하시기를 바랍니다.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

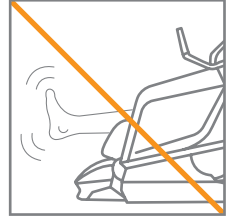


제품을 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하시기를 바랍니다.

고장 또는 누전 시 감전의 원인이 됩니다.

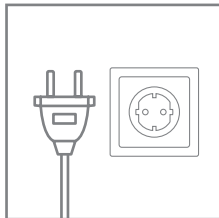


유아나 어린이의 사용을 자제하여 주시기를 바랍니다.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

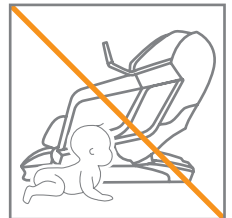


머리, 팔꿈치, 가슴, 배, 무릎 등의 부위에 사용하지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

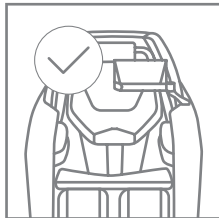

마사지볼이 작동하는 동안 올바른 위치에서 작동될 수 있도록 조작하십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

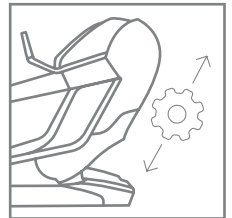

안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의 사항

⚠ 경고

사용 중 제품에서 내려오실 때는
제품의 각도가 완전히 복귀된 후
내려오십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.



사용 중 통증이나 고통이 심할
시에는 즉시 사용을 멈추고,
사용자의 건강 상황에 맞는 후속
조치를 해 주시기를 바랍니다.

부상 등의 원인이 됩니다.




연속적으로 사용 시에는
몸에 무리가 갈 수도 있으니,
사용자의 건강 상태에 맞추어
선택하시기를 바랍니다.

부상의 원인이 됩니다.



제품이 작동할 때는 어린이나
반려동물이 주변에서 놀지
않도록 주의하십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.

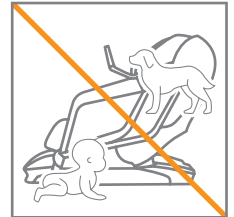


에어로졸 (스프레이) 제품을
사용하거나 산소를 사용하는
곳에서는 작동시키지 마십시오.

제품 손상, 화재, 폭발, 고장의
원인이 됩니다.




장신구를 착용한 상태에서
사용하지 마십시오.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상,
고장 등의 원인이 됩니다.

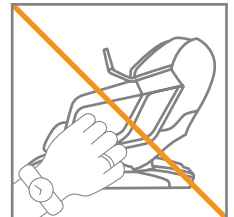

사용 중 긴 머리가 끼이지
않도록 주의하십시오.

안전사고, 부상의 원인이 됩니다.

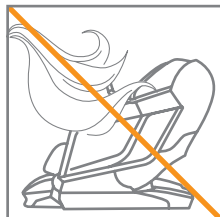


제품에 물건을 떨어뜨리거나 빈
곳에 물건을 집어넣지 않도록
주의하십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 화재,
고장 등의 원인이 됩니다.



본 제품에 손상된 케이블, 플러그가
있거나 혹은 제대로 작동하지
않거나 물에 빠진 경우에는
작동시키지 마시고 검사 및 수리를
위해 서비스 센터에 연락하십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

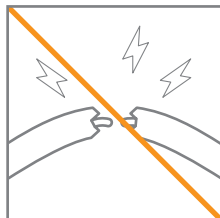

온열 기능 사용 시, 화상에
주의하십시오.

저온화상 등의 원인이 됩니다.




안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의 사항


⚠ 경고

바른 자세로 착석한 후 제품을
사용하시기를 바랍니다.

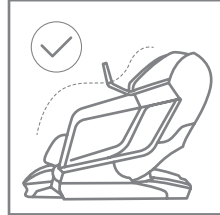

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상,
고장 등의 원인이 됩니다.


제품의 커버가 찢어지거나
벗겨진 상태에서 사용하지
마십시오.

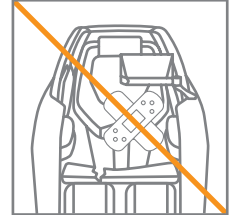

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.


⚠ 주의

한 번에 두 사람 이상이
사용하지 않도록 하십시오.

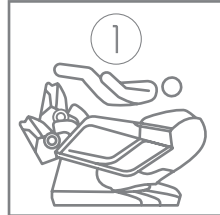


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.

주변의 온도가 급격하게
변화되는 곳에서는 사용을
자제하십시오.

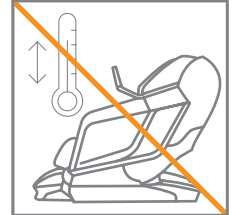


부상, 상해의 원인이 됩니다.

120kg 이상 하중을 가하지
않도록 주의하시기 바랍니다.

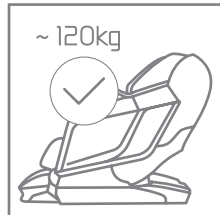

안전사고, 변형, 소음, 가죽 마모,
고장 등의 원인이 됩니다.

신장이 150cm 이하이거나
190cm 이상인 사람은 마사지
감이 다를 수 있습니다.

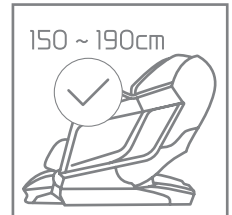

마사지부의 밀착 부족, 통증, 부상
등의 원인이 됩니다.

제품 위에 서 있지 마십시오.
앉은 상태에서만 사용하시기를
바랍니다.



안전사고, 부상, 상해, 제품 손상,
고장 등의 원인이 됩니다.

마사지 받은 후에 잠이 드셨을
때는 저체온을 주의하십시오.



안전사고, 부상 등의 원인이 됩니다.


안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의 사항

⚠ 주의

제품의 케이블이 손상되거나
과도하게 구부러지지 않도록
주의하십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이
됩니다.

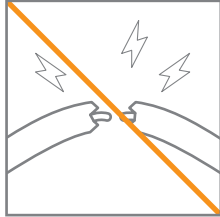


제품의 안전한 사용을 위해
낮은 강도의 마사지부터
시작하시기를 바랍니다.

부상의 원인이 됩니다.



제품의 다리 마사지부를 손으로
들지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.

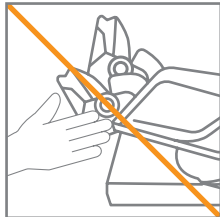


제품 후면부에 기대거나
매달리지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.



반려동물이 전원 케이블을 물지
않도록 주의하십시오.

감전, 제품 손상, 고장 등의 원인이
됩니다.

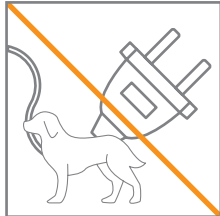


제품이 리클라이닝 될 때 다리
마사지부 위에 서 있지 않도록
주의하십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.



전원 플러그를 콘센트에 꽂기
전에 전원 스위치가 꺼짐으로
되어 있는지 확인하십시오.

감전, 제품 손상, 고장 등의 원인이
됩니다.

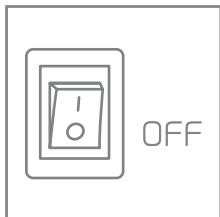

제품 후면부, 팔 마사지부,
다리 마사지부 위에 걸터앉지
마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.




안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의 사항

⚠ 주의

블루투스 스피커 사용 시, 너무 큰 볼륨으로 장시간 사용하지 마십시오. (*일부 제품 해당)

청력 손상의 원인이 됩니다.

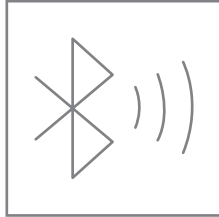

태블릿 거치대를 손으로 잡고 일어나지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.




제품을 물로 세척하지 마십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.




제품을 청소하거나 손질할 때는 전원 플러그를 뽑고 진행하시기를 바랍니다.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

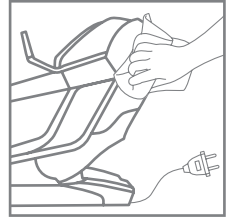


제품을 청소할 때 부드러운 천으로 가볍게 닦아주고, 시너 등의 유기용제나 화공약품 등을 사용하지 마십시오.

제품 손상의 원인이 됩니다.

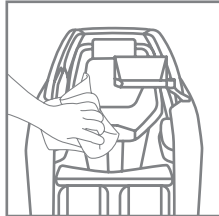


천연가죽 시트는 반드시 가죽 전용 클리너로 닦으시기를 바랍니다. (*일부 제품 해당)

제품 손상의 원인이 됩니다.

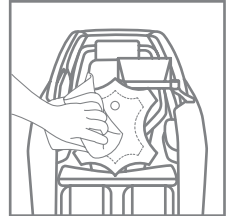

USB 충전단자를 사용하여 충전 시, 차폐 케이블을 사용하여 주시기를 바랍니다. (*일부 제품 해당)

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

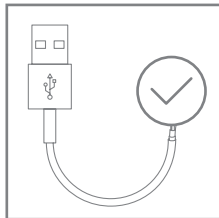

※ 차폐 케이블은 외부에서 유입되는 노이즈와 내부에서 발생하는 노이즈를 억제하기 위해 전선에 알루미늄 포일을 감싸거나 구리나 스텔을 그물망 형태로 촘촘하게 엮어 보호한 케이블을 의미합니다.

안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의 사항

⚠ 금기 사항

· 마사지체어를 사용하면 안 되는 고객

- 혈전증(thrombosis)과 색전증(embolism), 중증 하지 정맥류 등 의사로부터 사용이 부적절하다고 진단받은 자
- 임신 초기인 자 (1기, 초기 3개월)
- 심장, 신장 및 간에 중증 질환이 있는 자
- 조현병 또는 다른 정신 질환이 있는 자
- 뇌전증 또는 뇌 질환이 있는 자
- 혼자 거동이 불가능한 자

· 마사지체어 사용 시 전문의 진단이 필요한 고객

- 임신 초기를 제외한 임신부 중 제품의 사용으로 인해 부작용이 우려되는 자
- 정상보다 체온이 높으면서 오한, 발열 등 급성염증 증상을 동반한 자
- 중증 피부 질환 (욕창, 화상) 등이 있는 자
- 악성 종양 등이 있는 자
- 고령, 급격한 체중 감소 혹은 기타 질환으로 근 감소가 있는 자
- 의사의 진료 및 치료를 받고 있어 안정해야 하는 자
- 급성 디스크 및 급성 경추염좌 (cervical sprain) 진단을 받은 자
- 중증의 골다공증이 있는 자
- 이식형 심장박동기 등 인체 이식형 전자 의료기기를 사용하고 있는 자
- 의사 표현이 자유롭지 못한 자
- 거동이 불편한 자
- 기타 몸의 이상을 느끼고 있는 자

⚠ 온열 기능 사용 시 주의 사항

- 장시간 사용 시, 피부에 저온화상 등 위험이 있을 수 있으니 연속으로 사용하지 마십시오.
- 온열이 작동되는 부위에는 맨살이 닿지 않게 해주세요.
- 피부가 약한 아이들이나 노인, 환자들은 보호자의 보호가 필요하며 더욱더 주의하여 사용하시기를 바랍니다.
- 온열 기능을 켜놓은 상태에서 잠들지 마십시오.

⚠ 제품 사용 시 발생할 수 있는 부작용 사례

제품 사용 중에 다음과 같은 부작용이 발생할 수 있으니 주의하여 주시기를 바랍니다.

- 제품에 의한 찰과상, 타박상(좌상) 등
- 제품의 과도한 사용 및 압력으로 인한 근육 및 힘줄 손상 등
- 알레르기 증상 및 화상 등
- 노인성 척추골절 및 염좌 등

무선 충전 시 주의 사항

- 무선 충전 기능을 지원하는 모바일 기기의 중앙부를 마사지체어 우측 팔 마사지부에 있는 충전 패드에 맞춰 올립니다. 충전부에 제대로 맞추지 않을 경우 충전 속도가 느려지거나 충전이 잘 되지 않을 수 있습니다.

- 모바일 기기에 두꺼운 재질의 커버를 장착하고 사용할 경우 제대로 충전되지 않을 수 있으니 커버를 분리한 후 사용하십시오.
- 제품의 상태나 주변 온도 및 환경에 따라 충전 효율이나 속도가 달라질 수 있습니다.
- 무선 충전 중에 모바일 기기에 유선 충전기를 연결할 경우 무선 충전 기능이 지원되지 않습니다.

- 모바일 기기 뒷면과 커버 사이에 신용카드, 교통카드, 도어록 카드, 음식물 쓰레기 종량제 카드 등을 넣은 상태로 제품에 올리지 마십시오.

- 자성을 이용한 제품은 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

- 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속류를 제품 위에 올려놓지 마십시오.

- 제품이 변형되거나 고장날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

- 제품에서 발열이 심할 경우 애플리케이션이나 제품 사용을 잠시 중단하십시오.


- 제품에서 열이 발생한 상태로 피부와 오랜 시간 접촉하게 될 경우 붉은 반점, 색소침착 등 저온화상의 우려가 있습니다.

제품 각 부분 명칭 | 이동 및 설치

박스 개봉

본 제품은 3개의 박스로 구성되어 있습니다. 구성품을 잘 확인하시길 바랍니다.

- 본체 박스 : 제품 본체, 등/엉덩이 시트, 머리 시트, 어깨 마사지부, 액세서리 박스 (전원 케이블, 매뉴얼)
- 팔 마사지부
- 다리 마사지부

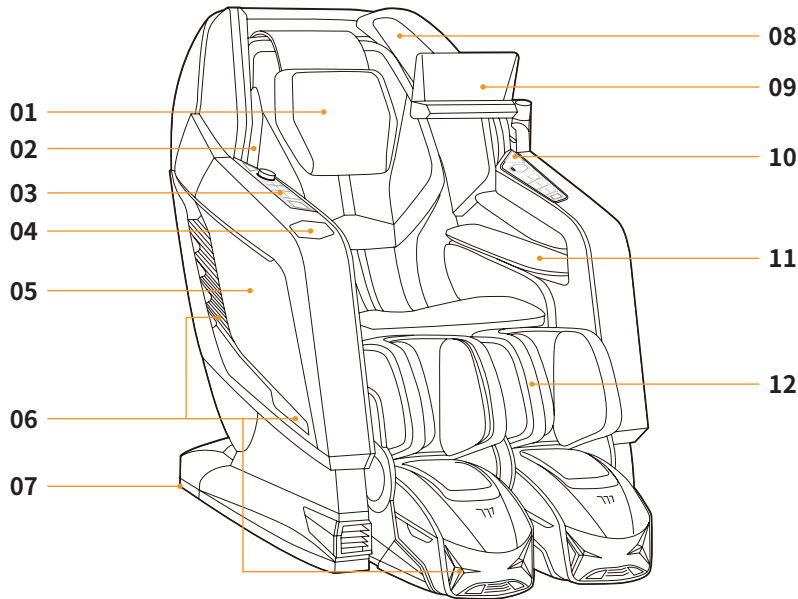


외부구성

- 01 머리 시트
- 02 어깨 마사지부
- 03 내측키 (좌/우)
- 04 무선 충전 패드
- 05 사이드 패널
- 06 LED 조명
- 07 이동 바퀴
- 08 스피커
- 09 태블릿 리모컨
- 10 정전 보호 버튼
- 11 팔 마사지부
- 12 다리 마사지부

이동 방법 및 설치 공간 확인하기

- 제품을 설치하기 전에 충분한 공간이 있는지 확인합니다.
- 제품 주변에 장애물이나 부속물이 없도록 하십시오.
- 제품 머리 후면부가 유리창을 향하지 않도록 설치하십시오.
- 제품을 뒤로 눕혀서 이동하기 편리한 각도로 만들어 원하는 곳으로 이동 후, 천천히 앞으로 내려 설치합니다.
- 설치할 때 제품 밑으로 케이블 선이 깔리지 않도록 주의하시기를 바랍니다.


※ 제품 무게로 바닥에 흠집 및 이염이 생길 수 있으니 주의하시기를 바랍니다.
※ 제품 이동 시, 반드시 2인 이상 함께 움직이십시오.

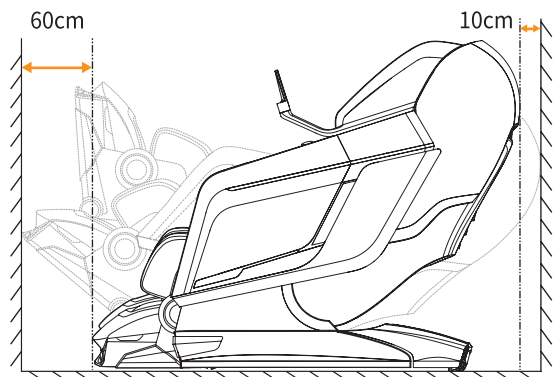

제품 연결 방법 | 끼임 감지 안내

전원 연결하기


전원 케이블을 제품 후면 하단에 있는 전원 연결 단자의 홈에 맞춰 연결합니다.
전원을 연결한 후, 전원 스위치를 켭니다. 태블릿 리모컨도 함께 켜지며 앱이 자동으로 실행됩니다.

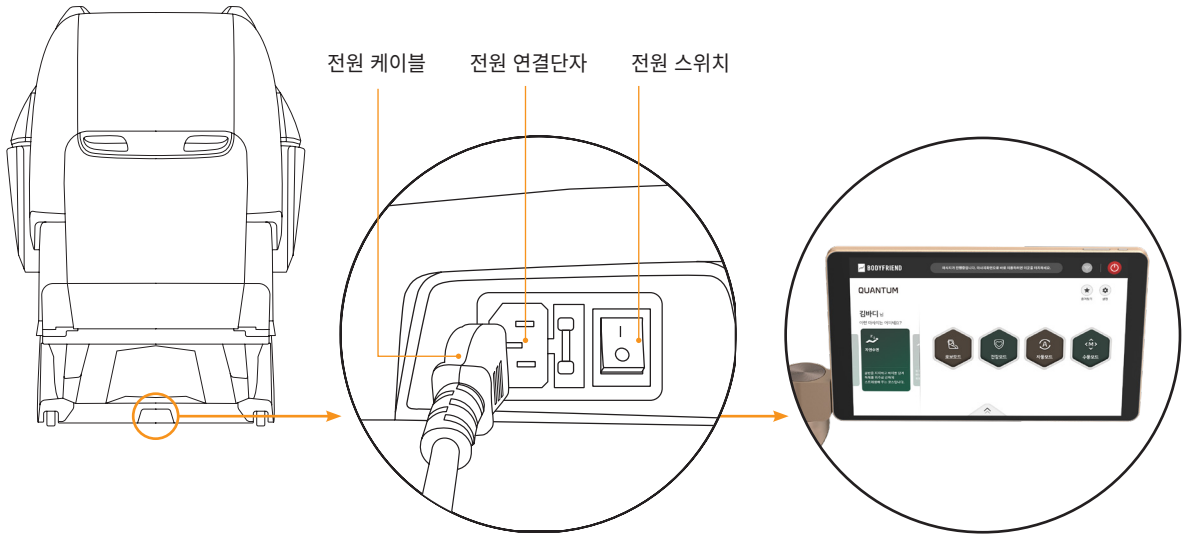

끼임 감지 안내


물체 끼임 감지 안내 화면 > 물체 제거 후 [확인 버튼] > 마사지 재시작

※ 끼임 감지 센서는 다리부와 후면부 총 15군데입니다.

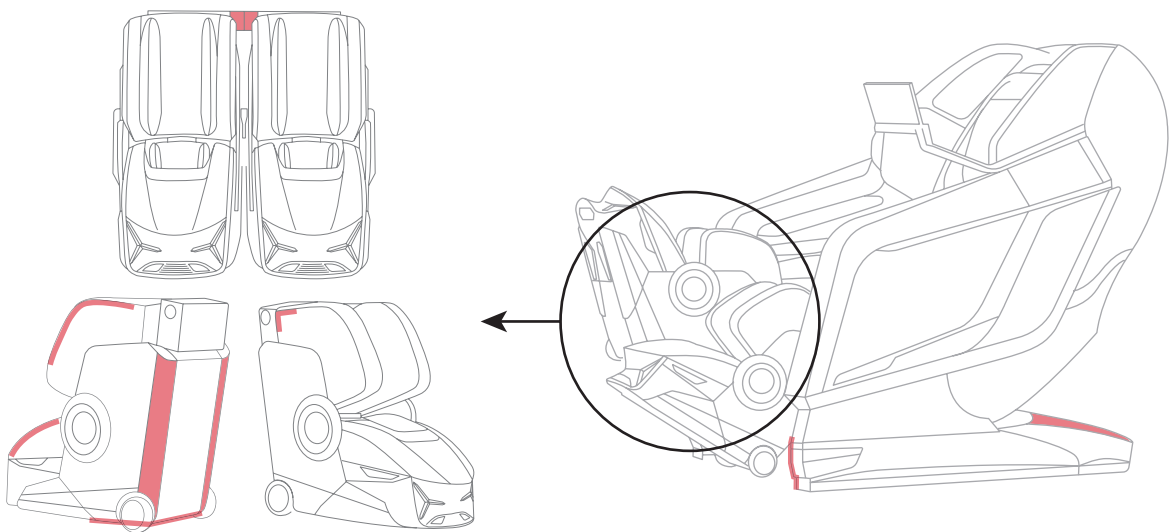

내측키 설명

내측키 - 오른쪽 팔 마사지부

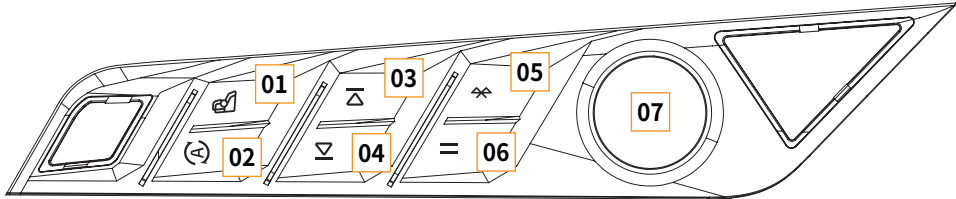

01 로보 모드 : 버튼을 순차적으로 눌러 로보 모드를 변경할 수 있습니다.

02 자동 모드 : 버튼을 순차적으로 눌러 자동 모드를 변경할 수 있습니다.

03 다음 곡 재생 : 블루투스를 통해 음악 재생 중, 버튼을 누르면 다음 음원으로 재생됩니다.

04 이전 곡 재생 : 블루투스를 통해 음악 재생 중, 버튼을 누르면 이전 음원으로 재생됩니다.


05 블루투스 : 버튼을 길게 눌러 블루투스 페어링 또는 취소할 수 있습니다.

※ 상태 표시 LED : 연결 전 - 하얀색 조명 점등 / 연결 중 - 파란색 조명 점멸 반복 / 연결 완료 - 파란색 조명 점등

06 재생 / 일시 정지 : 블루투스 또는 스트리밍 재생 중에 버튼을 누르면 음원이 재생 또는 일시 정지됩니다.

07 사운드 볼륨 조절 : 버튼 다이얼을 돌려 볼륨을 조절할 수 있으며, 버튼을 누르면 사운드가 음소거됩니다.

내측키 - 왼쪽 팔 마사지부

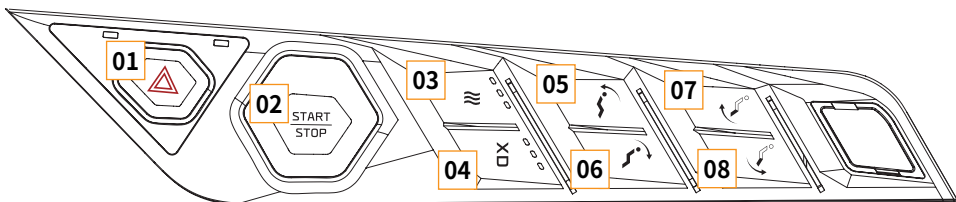

01 정전 보호 버튼 : 마사지체어가 작동 중에 전원 공급이 끊겨 멈췄을 시, 자동으로 원상 복귀를 돕는 버튼입니다.

버튼을 길게 눌러 각도를 원상 복귀시키기를 바랍니다.

02 전원 [START / STOP] : 버튼을 길게 눌러 전원을 켜고 끕니다.

마사지 재생 중에 버튼을 눌러 일시 정지 및 재시작할 수 있습니다.

※ 정전 보호 버튼과 전원 버튼은 커버 덮개를 열고 조작하시기를 바랍니다.

03 온열 : 버튼을 순차적으로 눌러 전신 온열 강도를 조절합니다. [3단계 > 2단계 > 1단계]

04 XD 강도 : 버튼을 순차적으로 눌러 XD 강도를 조절합니다. [1~5단계]

05 전신 각도 눕힘 : 버튼을 길게 눌러 전신 각도를 눕힙니다.

06 전신 각도 세움 : 버튼을 길게 눌러 전신 각도를 세웁니다.

07 다리 각도 내림 : 버튼을 길게 눌러 다리 각도를 아래로 내립니다.


08 다리 각도 올림 : 버튼을 길게 눌러 다리 각도를 위로 올립니다.

태블릿 리모컨 작동 설명

계정 등록하기


[전원 버튼] > 계정 등록하기 > 사용자 정보 입력 > 등록

- ※ 사용자 계정으로 마사지 프로그램 실행 시, 자동 체형 검색은 최초 1회 진행 후 자동으로 저장되며 이후에는 진행되지 않습니다.
또한 프로그램별로 설정한 '마사지 속도, 롤링 속도, 에어 강도, XD 강도'가 자동으로 저장됩니다.
- ※ 게스트로 시작할 시, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.

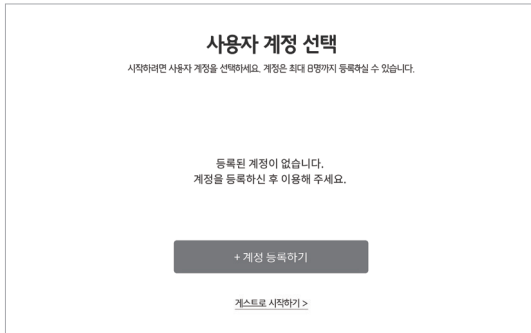



시작하기

[전원 버튼] > 사용자 계정 선택 > 홈 화면

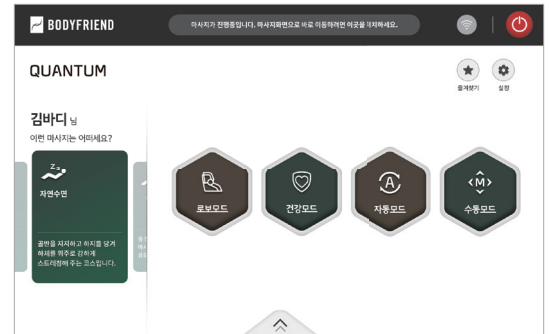


종료하기

화면 상단 우측에 있는 전원 아이콘 선택 > 종료하기 > 마사지 종료

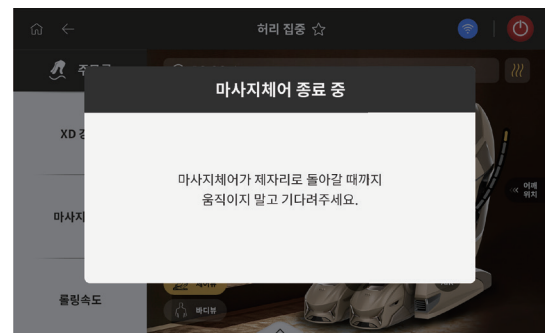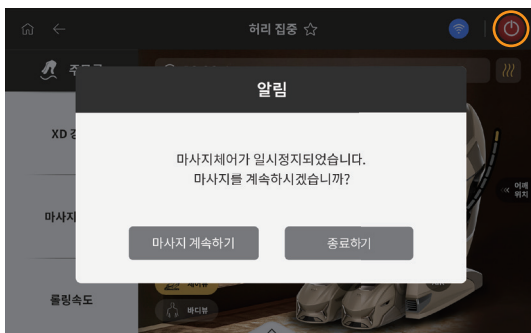

태블릿 리모컨 작동 설명

홈 화면 구성

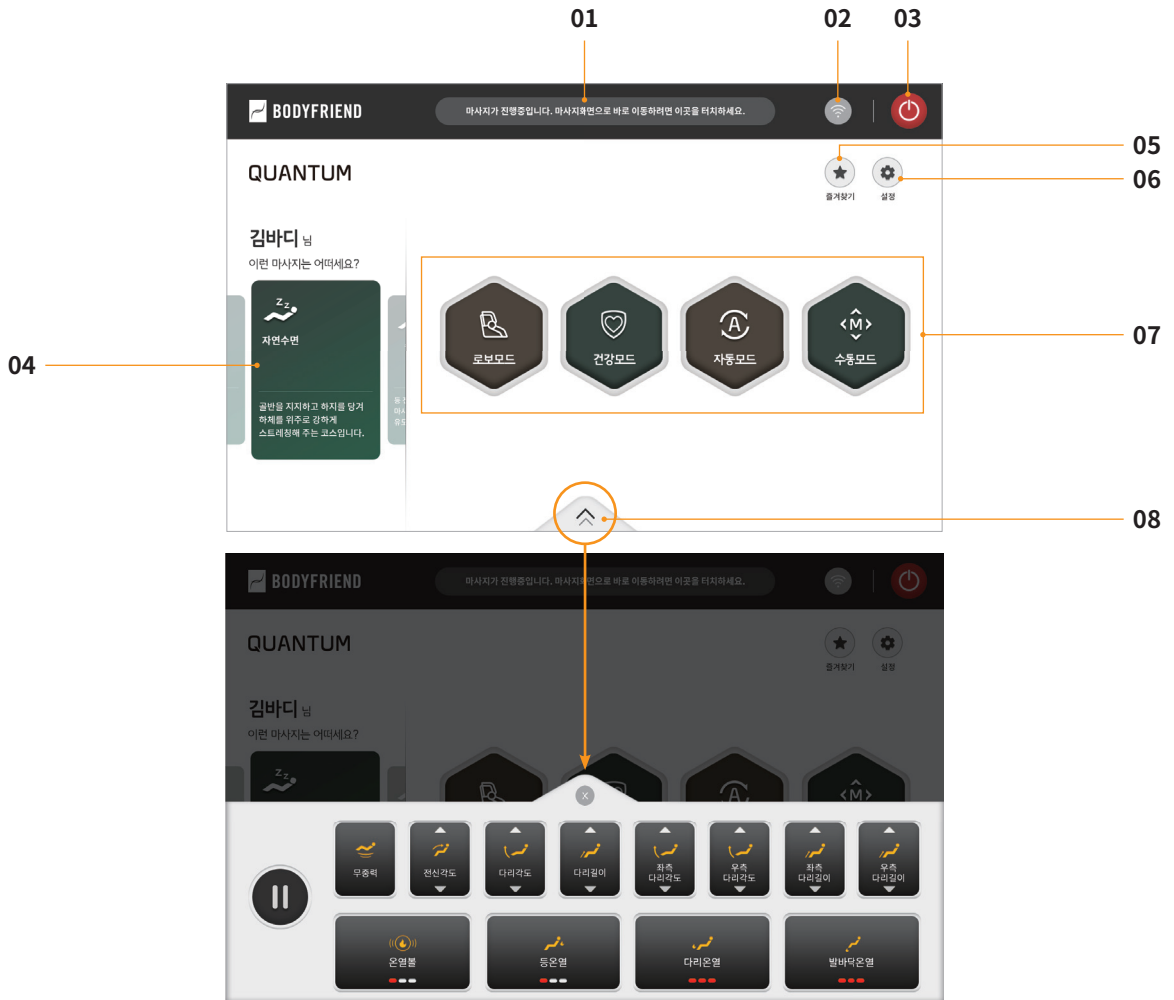


- 01 **마사지 재생 화면 이동** : 버튼을 누르면 마사지 재생 화면으로 이동합니다.
- 02 **Wi-Fi 연결 표시** : Wi-Fi 연결 상태를 표시합니다.
- 03 **전원** : 마사지체어의 전원을 켜고 끕니다.
- 04 **마사지 안내** : 마사지 프로그램을 안내 및 추천해 줍니다. 원하는 프로그램을 선택하여 마사지를 받을 수 있습니다.
- 05 **즐거찾기** : 즐겨찾기 목록으로 이동합니다.
- 06 **설정** : 설정 화면으로 이동합니다.
- 07 **자동 / 수동 프로그램** : 원하는 모드를 선택하여 이동합니다.
- 08 **퀵 메뉴** : 재생 중인 마사지를 일시 정지할 수 있으며, 각도와 온열을 세부적으로 빠르게 설정할 수 있습니다.

태블릿 리모컨 작동 설명


로보 모드

홈 > 로보 모드 > 모드 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

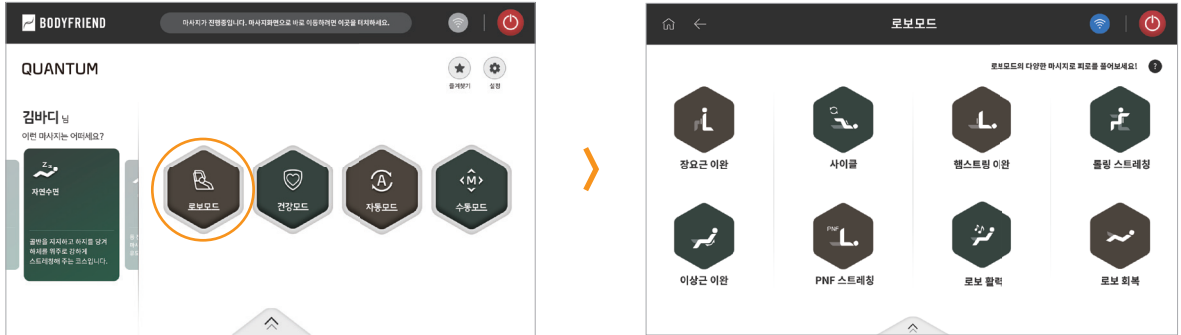


건강 모드 - 헬스 케어 마사지

홈 > 건강 모드 > 헬스 케어 마사지 > 모드 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

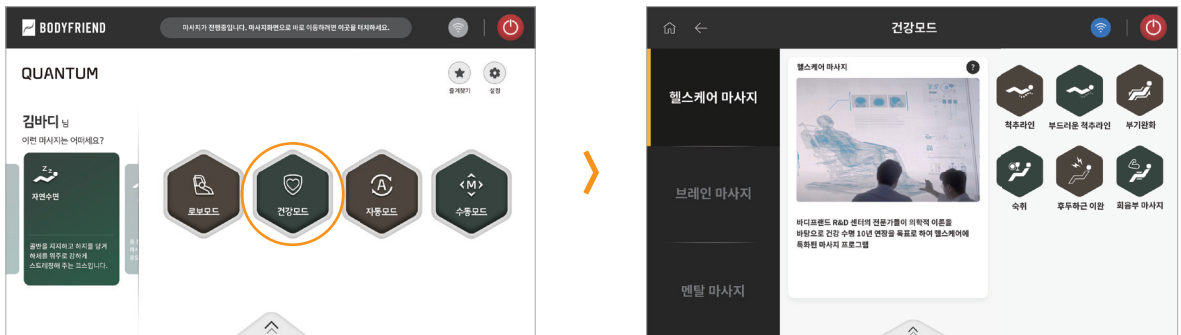

건강 모드 - 브레인 마사지


홈 > 건강 모드 > 브레인 마사지 > 모드 선택 > 음원 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

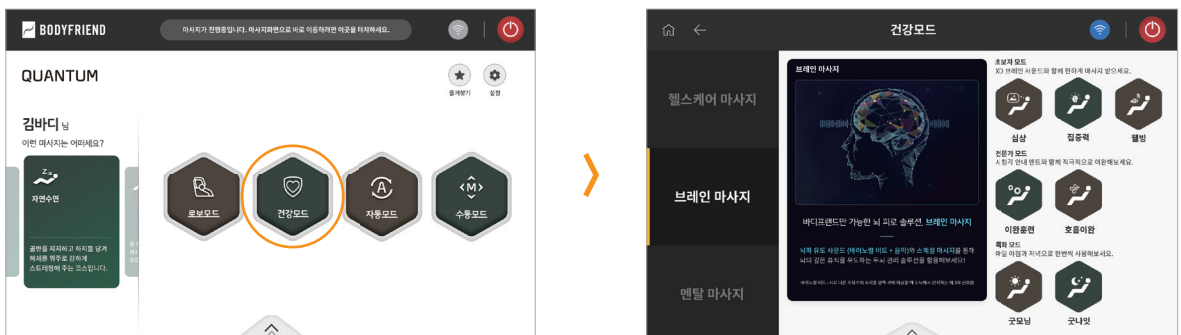

태블릿 리모컨 작동 설명


건강 모드 - 멘탈 마사지

홈 > 건강 모드 > 멘탈 마사지 > 모드 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

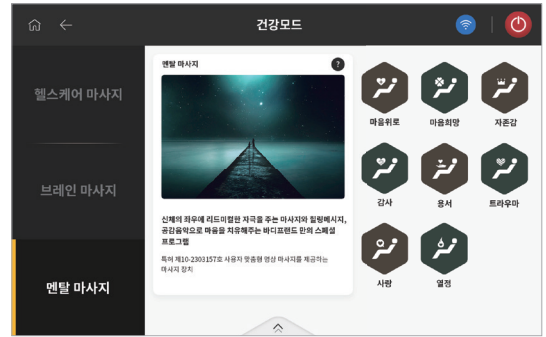

자동 모드



홈 > 자동 모드 > '부위, 스트레칭, 수면, 유저, 스포츠' 중 선택 > 모드 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

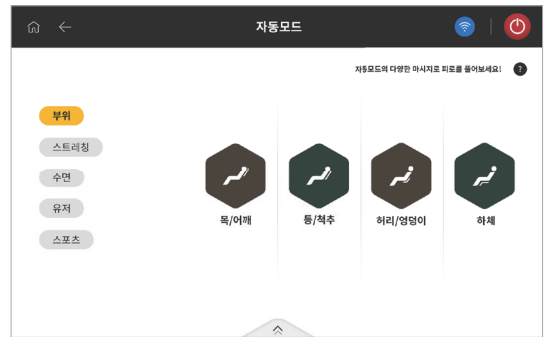

태블릿 리모컨 작동 설명

수동 모드



홈 > 수동 모드 > 마사지 방식 선택 > 마사지 범위 선택 > 마사지 시작

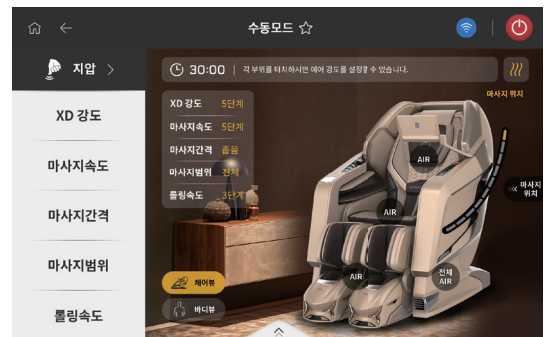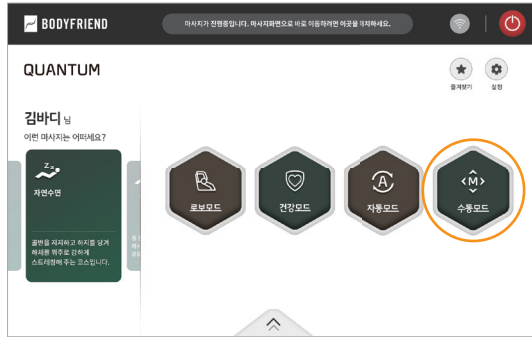

태블릿 리모컨 작동 설명



즐거찾기

- 01 등록하기 : 홈 > 원하는 모드 선택 및 시작 > 맞춤 마사지 설정 > 화면 상단의 별 아이콘을 눌러 즐겨찾기로 등록합니다.
- 02 실행하기 : 홈 > 즐겨찾기 > 등록된 모드 중 원하는 모드 선택 > 마사지 시작
- 03 목록관리 : 즐겨찾기는 총 12개까지 등록이 가능하며, 등록된 모드의 순서 이동 및 삭제가 가능합니다.

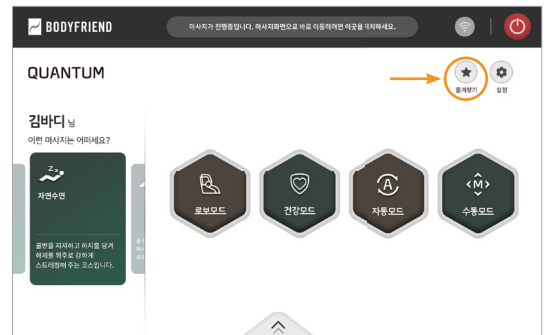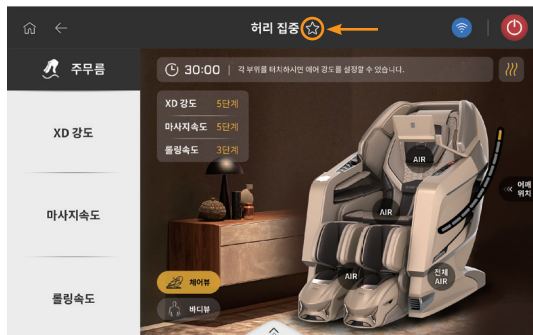

설정

홈 > 설정

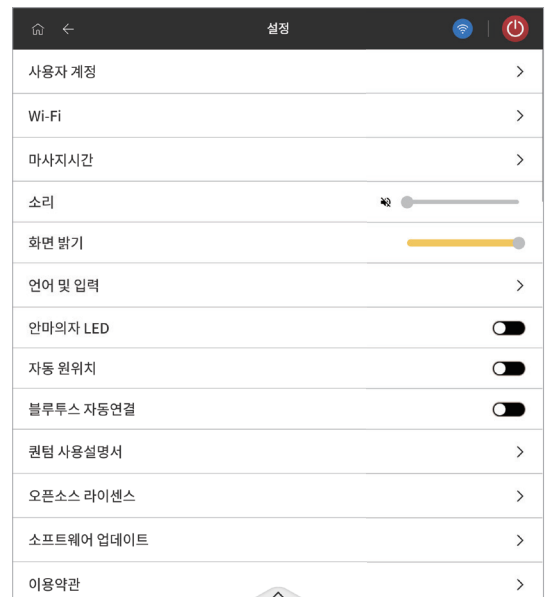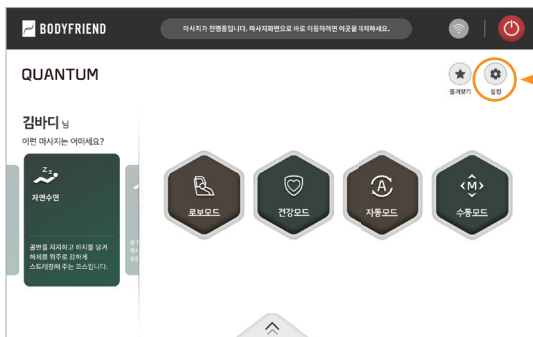

로보 모드 | 헬스케어 마사지

로보 모드

홈 > 로보 모드 > 모드 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

장요근 이완	정적 스트레칭 동작을 통해 코어 근육을 이완하는 코스입니다.
사이클	사이클 타는 동작을 통해 무릎과 고관절 주위 근육을 이완시켜 하체의 유연성을 증가시켜 주는 코스입니다.
햄스트링 이완	허벅지 뒤쪽 근육을 늘리는 스트레칭으로 유연성을 증진해 주는 코스입니다.
롤링 스트레칭	허리 주변 근육의 유연성을 증진해 주는 코스입니다.
이상근 이완	엉덩이 뒤쪽의 근육을 이완시켜 유연성을 돕는 코스입니다.
PNF 스트레칭	하체 근육의 이완과 근육 운동 동작이 함께 진행되는 코스입니다.
로보 활력	피로가 많이 쌓이는 부분을 주물러주면서 지압해 주는 코스입니다.
로보 회복	목과 허리 위주로 전체적으로 부드럽게 지압하여 다리의 유연성을 돕는 코스입니다.

건강 모드 - 헬스케어 마사지

홈 > 건강 모드 > 헬스케어 마사지 > 모드 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

척추라인	등허리를 중심으로 척추 라인을 따라 지압하는 마사지 코스입니다.
부드러운 척추라인	등허리를 중심으로 척추 라인을 따라 부드럽게 지압하는 저자극 마사지 코스입니다.
부기완화	전신 에어백을 이용하여 부기 완화에 도움을 주는 순환 코스입니다.
숙취	숙취에 도움이 되는 등 부위 주요 지점을 자극하여 도움을 주는 코스입니다.
후두하근 이완	후두골과 목뒤에 붙어 있는 4개의 근육을 집중적으로 이완시키는 정밀 마사지 코스입니다.
회음부 마사지	에어백을 통해 회음 부위를 지압하고 엉덩이를 주물러서 집중적으로 자극하는 마사지 코스입니다.

브레인 마사지 | 멘탈 마사지

건강 모드 - 브레인 마사지

홈 > 건강 모드 > 브레인 마사지 > 모드 선택 > 음원 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

심상	나만의 휴양지에서 XD 심상 사운드와 함께 자유롭게 상상하고 싶은 분들을 위한 마사지 코스입니다.
집중력	과도한 학업 및 업무로 인해 피로한 두뇌에 휴식을 제공하고, 심신을 재충전하고 싶은 분들을 위한 마사지 코스입니다.
웰빙	일상에서 과도한 스트레스를 받아 휴식을 취하고 싶은 분들을 위한 마사지 코스입니다.
이완훈련	심신에 쌓인 긴장과 스트레스 해소를 원하는 분들을 위해 점진적 근육 이완 요법을 활용하여 개발된 마사지 코스입니다. ※점진적 근육 이완 요법 : 신체적인 근육의 긴장을 의도적으로 감소시켜 마음의 긴장까지 해소하는 기법
호흡이완	중요한 시험이나 발표를 앞둔 분들을 위해 호흡 이완 요법을 활용하여 개발된 마사지 코스입니다. ※호흡 이완 요법 : 의식적으로 호흡을 조절하여 마음을 이완시키고 과도한 긴장과 흥분을 낮추는 기법
굿모닝	아침잠이 많아 하루를 상쾌하게 시작하기 어려운 분들을 위한 아침 특화 마사지 코스입니다.
굿나잇	잠들기 전에 하루 동안 쌓인 피로를 풀면서 생각을 정리하고 싶은 분들을 위한 저녁 특화 마사지 코스입니다.

건강 모드 - 멘탈 마사지

홈 > 건강 모드 > 멘탈 마사지 > 모드 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

마음위로	이미 지나간 일들에 대한 후회로 마음이 우울한 고객을 위한 공감 힐링 마사지 코스입니다.
마음희망	막연한 걱정으로 불안과 초조함을 느끼는 고객을 위한 공감 힐링 마사지 코스입니다.
자존감	스스로 작아 보이고 답답할 때 마음을 위로해 주고 자존감 회복에 도움을 주는 코스입니다.
감사	일상의 소중한 것들을 되새겨 보면서 기분을 전환하는 데 도움을 주는 코스입니다.
용서	나 자신을 위한 적극적인 용서를 제안하며 음악을 통해 위로하는 코스입니다.
트라우마	과거 기억의 괴로움을 겪는 분들에게 마음의 안정을 선사하는 코스입니다.
사랑	마사지와 마음의 여유를 통해 현재의 나를 사랑하는 방법을 제안하는 코스입니다.
열정	내 마음속에 존재하던 그릿을 마사지와 함께 느껴볼 수 있도록 제안하는 코스입니다.

수동 모드

수동 모드

홈 > 수동 모드 > 마사지 방식 선택 > 마사지 범위 선택 > 마사지 시작

마사지 방식	지압, 주무름, 두드림, 손날, 복합, 리듬 중에 선택하여 받을 수 있습니다.
XD 강도	마사지볼의 돌출 정도를 사용자의 체형에 맞게 단계별로 조절할 수 있습니다.
마사지 속도	등 마사지부의 마사지 속도를 단계별로 조절할 수 있습니다. 등 각도나 다리 각도를 추가적으로 조절하면 더욱 효과적인 마사지를 받을 수 있습니다.
마사지 간격	등 마사지부의 마사지볼 간격을 단계별로 조절할 수 있습니다. ※ 마사지 방식 - 주무름, 복합 모드는 마사지볼 간격 조절이 불가능합니다.
마사지 범위	전체, 목 · 어깨, 등 · 허리, 허리 · 엉덩이, 고정 중에 선택하여 받을 수 있습니다.
롤링 속도	발바닥 롤링 속도를 단계별로 조절할 수 있습니다.

자동 모드

자동 모드

홈 > 자동 모드 > '부위, 스트레칭, 수면, 유저, 스포츠' 중 선택 > 모드 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

부위	목/어깨	목, 어깨 부위를 주무름과 스트레칭으로 이완시키는 코스입니다.
	등/척추	등, 척추 주변 부위를 지압과 주무름으로 이완시키는 코스입니다.
	허리/엉덩이	허리, 엉덩이 주변부를 지압과 주무름으로 이완시키는 코스입니다.
	하체	허리 및 다리 부위에 집중적으로 다양한 마사지를 제공하는 코스입니다.
스트레칭	하체 스트레칭	골반을 지지한 상태에서 하지를 당겨 하체 위주로 강하게 스트레칭을 해 주는 코스입니다.
	척추 스트레칭	척추 주변부 마사지와 함께 머리 뒤편을 지지하고 하지를 당겨 척추를 강하게 스트레칭해 주는 코스입니다.
	슬로우 스트레칭	강한 스트레칭이 부담스러운 분을 위해 부드럽게 완화된 스트레칭 이완 코스입니다.
	에어 스트레칭	에어백 위주로 부드러운 마사지를 제공하는 이완 코스입니다.
수면	자연 수면	30분간 부드럽고 단조로운 전신 마사지 및 각도 변화를 통해 수면을 유도하는 코스입니다.
	미니 낮잠	20분 이하의 효과적인 낮잠을 유도하기 위해 부드러운 두드림을 반복적으로 하는 코스입니다.
	해먹 수면	마사지체어의 스윙 패턴을 통해 해먹에서 잠드는 듯 안락한 마사지를 제공하는 코스입니다.
	야간 저소음	소음에 민감한 야간에도 사용할 수 있는 에어백을 제외한 전신 주무름 코스입니다.
유저	CEO	과도한 스트레스에 시달리는 CEO를 위한 목, 어깨 위주의 피로회복 마사지 코스입니다.
	시니어	부드러운 저자극 마사지를 선호하는 시니어를 위한 안전한 마사지 코스입니다.
	육아맘	육아로 피로한 목과 허리를 집중적으로 마사지하고 팔, 다리, 골반부 특수 에어백 패턴 마사지를 제공하는 코스입니다.
	수험생	오래 앉아있어 불편해진 수험생의 허리와 목, 어깨에 상쾌한 마사지를 제공하는 코스입니다.
스포츠	골프	골프 라운딩 후 피로한 팔, 다리, 발바닥에 강한 마사지를 제공하는 코스입니다.
	필라테스	전신과 다리 각도의 변화를 통해 코어 근육인 엉덩이와 아랫배를 자극하여 바른 자세와 근 이완에 도움을 주는 코스입니다.
	요가	유연한 몸을 만들어 주는 요가 동작을 응용한 다이나믹한 마사지 및 스트레칭을 제공하는 코스입니다.
	드라이빙	장시간 운전으로 피로한 상체를 위주로 부드러운 마사지를 제공하는 코스입니다.

XD PRO 모듈 설명

바디프렌드만의 독보적인 신개념 XD 마사지 시스템

1. 넓고, 깊은 XD 마사지

- XD 모듈의 긴 회전축을 이용하여 넓은 부위의 주무를 마사지를 제공합니다.
- 마사지볼이 X자를 그리며 섬세하고 깊이감 있는 마사지를 제공합니다.

2. 인체 공학적인 XD의 마사지 각도

- 마사지 방식에 따른 각도를 조절하여 신체 부위별 마사지를 제공합니다.
- 큰 근육에는 강력하게, 작은 근육에는 부드러운 마사지를 제공합니다.
- 실제 사람의 손으로 받는 것과 유사한 각도의 마사지를 구현합니다.

XD PRO

사용자 체형 분석을 통한 맞춤형 마사지 시스템

1. 빠르고 정확한 체형 인식

- 마사지 모듈이 체형을 따라 하강하면서 인체의 굴곡과 압력을 센싱 하여 정확한 어깨 인식이 가능합니다.
- 마사지 모드 진행 중에도 사용자가 실시간으로 어깨의 위치를 조절할 수 있습니다.

2. 섬세하고 부드러운 마사지감

- 고성능 센서를 사용하여 기존 XD 모듈보다 더욱 섬세하고 정교한 마사지를 제공합니다.
- 정밀한 체형 인식에 통해 다양한 마사지 방식의 구현이 가능합니다.



로보 모드 프로그램

로보 모드

양쪽 다리 마사지부가 독립적으로 구동하는 것이 특징으로, 좌/우 다리부의 서로 다른 움직임으로 특화된 마사지를 제공해주는 프로그램입니다.



장요근 이완



사이클



이상근 이완



PNF 스트레칭



햄스트링 이완



롤링 스트레칭



로보 활력



로보 회복

장요근 이완	장요근은 오랫동안 앉아있는 직장인, 학생들에서 굳어 있기 쉬운 코어 근육으로 로보 다리 마사지부의 정적 스트레칭 동작을 통해 코어 근육을 이완시키고 스트레스를 줄여줍니다.
사이클	사이클을 타는 동작을 구현하여 사용자의 다리를 움직여 주고, 주위 근육을 이완시켜 하체의 유연성을 증가시켜 주는 프로그램입니다.
햄스트링 이완	좌식 생활에 익숙해져 있는 현대인에게서 굳어 있기 쉬운 근육을 로보 다리 마사지부의 특화된 스트레칭 동작으로 허벅지 뒤 근육의 유연성을 증진해 줍니다.
롤링 스트레칭	요추 주변 근육의 유연성을 증진하기 위한 프로그램입니다. 허리를 회전하는 동작을 통해 요추 주변 근육을 이완 시켜줍니다.
이상근 이완	엉덩이 뒤쪽의 근육으로 이상근이 굳어져 있는 경우 불편감을 느낄 수 있습니다. 스트레칭 프로그램을 통해 근육의 유연성을 증진해 보시기 바랍니다.
PNF 스트레칭	하체 근육의 이완과 음성 안내를 통한 근육 운동 동작을 더 해 하체 근육에 활력을 증진해 주는 프로그램입니다. ※ PNF 스트레칭 모드는 가벼운 힘을 가하여 근육의 이완을 유도하는 모드입니다. 반드시 가이드의 음성 안내에 따라 주시고, 마사지체어에 무리가 가는 과도한 힘은 가하지 않도록 사용에 유의하여 주시기를 바랍니다.
로보 활력	피로가 많이 쌓이는 부분을 시원하게 주물러주면서 지압해 주어 무기력함에 활력을 제공합니다.
로보 회복	목과 허리 위주로 전체적으로 부드럽게 지압하여 피로 회복을 도와주고, 하체의 개별 움직임을 통해 다리의 유연성과 근피로를 풀어줍니다.

브레인 마사지 프로그램


브레인 마사지

바이노럴 비트를 비롯한 XD 브레인 사운드와 스페셜 마사지를 통해 뇌의 휴식을 유도하는 바디프랜드만의 심신(心身) 관리 솔루션입니다.

※ 바이노럴 비트(Binaural beats):

서로 다른 주파수의 사운드를 각각 귀에 제공할 때 두뇌에서 인지되는 제3의 사운드.

뇌파와 동조하여 뇌의 휴식과 이완에 도움을 줍니다.

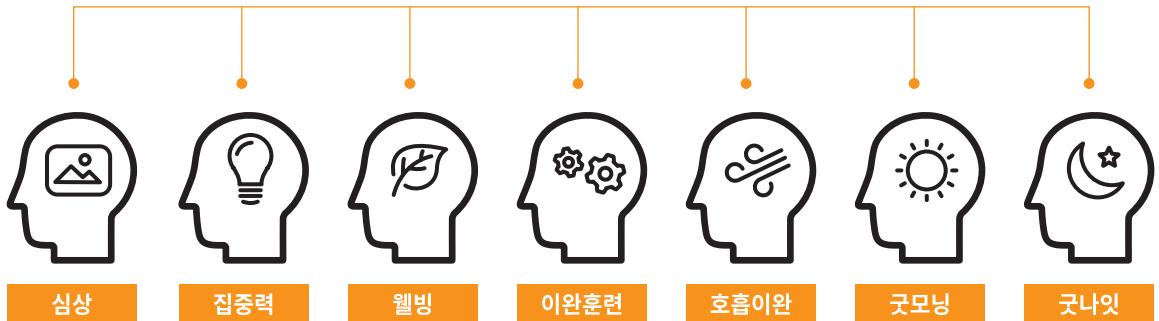

브레인 마사지 - 초보자 모드

바이노럴 비트를 비롯한 XD 브레인 사운드와 함께 편하게 마사지를 받고 싶은 분들을 위한 프로그램입니다.

심상	복잡한 일상에서 벗어나 나만의 휴양지에서 자유롭게 상상하고 싶은 분들을 위한 프로그램입니다. XD 브레인 사운드와 부드러운 전신 위주의 마사지 패턴으로 브레인 마사지를 처음 받으시는 분들에게 추천드립니다.
집중력	과도한 학업 및 업무로 인해 피로한 두뇌에 휴식을 제공하고, 심신을 재충전하고 싶은 분들을 위한 프로그램입니다. XD 브레인 사운드와 목, 어깨 등 상체 위주의 마사지 패턴으로 휴식하면서 몸과 두뇌의 피로를 풀고 재충전하시기 바랍니다.
웰빙	일상에서 과도한 스트레스를 받아 휴식을 취하고 싶은 분들을 위한 프로그램입니다. XD 브레인 사운드와 이에 최적화된 마사지 패턴으로 누적된 스트레스를 해소하시기 바랍니다.

※ '브레인 마사지 - 집중력, 웰빙'은 자동으로 각도가 변경되는 모드입니다. 자동 각도 안내 제공 후, 수동으로 각도 조절이 가능합니다.

※ 최적의 브레인 마사지를 위해 모드 중간에 힐링 음악을 바꾸는 것을 자제해 주시기 바랍니다.

브레인 마사지 프로그램

브레인 마사지 - 전문가 모드

적극적으로 심신을 이완하고 싶은 분들을 위해 근육 이완과 호흡 이완을 쉽게 따라 할 수 있도록 안내 멘트가 함께 제공되는 프로그램입니다.

이완훈련	심신에 쌓인 긴장과 스트레스 해소를 원하는 분들을 위해 점진적 근육 이완 요법을 활용하여 개발된 프로그램입니다. 마사지와 연동된 근육 이완 안내 멘트에 따라 몸의 긴장뿐만 아니라 마음의 긴장도 쉽게 해소하시기 바랍니다. ※ 점진적 근육 이완 요법 : 신체적인 근육의 긴장을 의도적으로 감소시켜 마음의 긴장까지 해소하는 기법
호흡이완	중요한 시험이나 발표를 앞둔 분들을 위해 단계별 호흡 이완 요법을 활용하여 개발된 프로그램입니다. 마사지와 연동된 호흡 안내 멘트에 따라 과도하게 긴장된 몸과 마음을 보다 쉽게 이완하시기 바랍니다. ※ 호흡 이완 요법 : 의식적으로 호흡을 조절하여 마음을 이완시키고 과도한 긴장과 흥분을 낮추는 기법

브레인 마사지 - 특화 모드

긍정적인 생각과 함께 하루를 시작하고 정리하고 싶은 분들을 위해 긍정 확언 안내 멘트가 제공되는 프로그램입니다.

굿모닝	아침잠이 많아 하루를 상쾌하게 시작하기 어려운 분들을 위한 아침 특화 프로그램입니다. 활기찬 전신 마사지로 잠들어 있던 심신을 깨우고, 긍정적인 생각을 유도하는 안내 멘트를 통해 하루를 기분 좋게 시작하시기 바랍니다.
굿나잇	잠들기 전에 하루 동안 쌓인 피로를 풀면서 생각을 정리하고 싶은 분들을 위한 저녁 특화 프로그램입니다. 부드러운 전신 마사지로 오늘의 피로를 해소하고, 복잡한 생각을 비울 수 있는 안내 멘트를 통해 하루를 기분 좋게 정리하시기 바랍니다.

멘탈 마사지 프로그램

멘탈 마사지

신체의 좌우에 리드미컬한 자극을 주는 마사지와 힐링 메시지, 공감 음악으로 마음을 치유해 주는 프로그램입니다. 당신의 사랑에 감사의 마음을 더해 국내 정상급 가수의 노래와 메시지로 당신의 마음을 위로합니다.



마음위로	인순이	이미 지나간 일들에 대한 후회로 마음이 우울한 고객을 위한 공감 힐링 마사지입니다. 공감 음악과 메시지로 우울한 기분을 위로하고 양측 두드림이 가미된 전신 마사지로 감정을 긍정적으로 전환하는 데 도움을 줍니다.
마음희망	김신의	막연한 걱정으로 불안, 초조함을 느끼는 고객을 위한 공감 힐링 마사지입니다. 불안, 초조로 긴장된 전신 근육을 양측 두드림 마사지로 이완시키고 힐링 메시지로 감정을 효과적으로 조절하는 데 도움을 줍니다.
자존감	전초아	내 마음처럼 되지 않는 일들에 반복해서 자책하고, 내가 너무 작아 보이는 날, 내 안의 허전함을 채워주고 나 자신을 다독여 주며 마음에 여유를 제공해 주는 프로그램입니다.
감사	서영은	자꾸 짜증 나고 답답할 때, 주변의 상황만 탓하게 될 때, 주변이 아닌 내 안으로 시선을 바꾸고 잠시 잊고 있었던 일상의 소중한 것들을 되새겨 보면서 기분을 전환하는 데 도움을 주는 프로그램입니다.
용서	전초아	오랫동안 가까운 사람에 대한 감정으로 지금도 힘든 시간을 겪는 분들에게 음악을 통해 위로하고 나 자신을 위한 적극적인 용서를 제안하는 프로그램입니다.
트라우마	인순이	예상치 못하게 발생했던 그날의 사고, 그 일에 대한 기억으로 지금도 괴로움을 겪는 분들에게 몸의 자극과 음악을 통해 마음을 안정하고 현재의 시점에서 바라보는 프로그램입니다.
사랑	서영은	지금 바디프랜드에서 여유를 느끼고 소중한 사람들의 이야기를 들어보시기를 바랍니다. 현재의 나를 사랑하고 미래의 나를 행복하게 만들 수 있는 가장 효과적인 방법입니다.
열정	김신의	처음처럼 항상 불타오르는 열정은 아니지만 내 마음속에 언제나 자리 잡고 있는 지속되는 힘이 그릿입니다. 지금 바디프랜드에서 그릿을 느껴보시기 바랍니다. 내 안의 그릿이 더욱 선명해집니다. ※ 그릿 (GRIT) : 재능보다는 노력의 힘을 강조하는 심리학 용어로 평범한 지능이나 재능을 가진 사람도 열정적 끈기로 노력하면 최고의 성취를 이룰 수 있다는 의미를 담고 있습니다.

제품 규격 및 사양

본 제품 사양은 성능 향상이나 개선을 위하여 별도의 고지없이 일부 변경될 수 있습니다.

모델명	BFR-9010
정격전압	100-250 V~, 50-60 Hz
소비전력	360 W
USB	5 V, 2.0 A
오토 타이머	10 / 20 / 30 분
에어백 범위	어깨 / 등 · 허리 / 팔 / 골반 / 회음부 / 허벅지 / 종아리 / 발등 / 발 뒤꿈치
롤링 범위	발바닥
마사지볼 범위	목·엉덩이
리모컨	10 inch 해상도 : 1920 X 1200
스피커	스테레오 스피커 2 ch, 20 W
제품 무게	165.3 kg
세웠을 때	165 (길이) X 91 (넓이) X 121 (높이) cm
눅혔을 때	200 (길이) X 91 (넓이) X 99 (높이) cm
일반적 명칭	전기마사지기

고장 신고 전 확인사항

제품에 이상이 발생하였을 경우 서비스 센터에 의뢰하기 전 아래 사항을 먼저 확인해 주시기 바랍니다.

증상	원인	해결방법
메인 전원을 켜는데도 작동이 안 되는 경우	리모컨 또는 내측키 전원 버튼 미실행	전원 버튼을 누르십시오
	프로그램을 선택 안 한 경우	프로그램을 선택 및 실행하십시오
	전원 플러그 접촉 불량	전원 플러그를 콘센트에 정확히 꽂으십시오
	전원 플러그, 전원 케이블 파손	
	퓨즈가 탄 경우	A/S센터에 연락하십시오
	전자 회로 이상	
작동 중 소음이 발생한 경우	일반적인 기계음 발생 - 에어 펌프 진동음, 에어 흡입/토출음 - 에어백 팽창으로 인한 사출 소음 - 솔레노이드 밸브 개폐음 - 시트 마찰음	제품이 정상적으로 작동하는 소리로 고장이 아닙니다
	오랜 시간 사용한 경우	다시 시작하십시오 (30분 후)
	오랜 시간 사용으로 인한 마모	A/S 센터에 연락하십시오
작동 중 동작이 갑자기 멈춘 경우	갑작스러운 전원 공급 차단	전원을 다시 실행하십시오
	작동 시간 종료	다시 시작하십시오 (30분 후)
각도 변경 중 갑자기 멈춘 경우	끼임 감지 센서 및 장애물 여부 확인	장애물을 제거하고 재실행합니다
	과도한 사용, 무리한 충격	다시 시작하십시오 (30분 후)
작동 중 마사지볼이 내피 천에 걸리거나 튕기는 경우	마사지볼과 시트의 마찰	주무름 동작시 마사지볼로 인한 일반적인 현상으로 고장이 아닙니다
원위치로 복귀가 안 될 경우	종료 중에 리모컨 버튼을 누른 경우	전원을 다시 실행하십시오
	과도하게 작동시킨 경우	A/S 센터에 연락하십시오
리모컨 과열	오랜 시간 사용한 경우	다시 시작하십시오 (30분 후)
전원 케이블 과열	과도한 부하	다시 시작하십시오 (30분 후)
	다른 비정상 원인	A/S 센터에 연락하십시오
에어백 작동이 안 되는 경우	에어 연결 호스가 이탈한 경우	A/S 센터에 연락하십시오
	에어 관련 전원 선 끊어짐	

고객 서비스 안내

A/S센터 : 02 3448 8980

무상 A/S 품목	마사지체어 내부의 마사지부를 운용하는 기계/기구류
	메인보드류, 각종 모터류, 에어펌프류
	내부 전기, 전자 배선 및 에어 호스류
유상 A/S 품목	외부 시트 및 내부 시트, 외피/내피 전체, 고객의 사용빈도로 인한 변색, 탈색, 찢어짐, 낡음 또는 반려동물에 의해 파손이 발생한 시트류 (인조가죽, 천연가죽, 천으로 구성된 외피, 내피 부분)
	※본 제품의 외부시트는 천연가죽 재질입니다. 가죽의 경우 사용빈도 및 보관상태에 따라 수명이 달라질 수 있으며, 가죽 외피의 손상이 확인되면 구매처로 연락하여 교체 후 사용하시기 바랍니다.
	리모컨 / 케이블 고객의 사용빈도로 인한 노후 증상, 임의 개봉 또는 떨어뜨림 등으로 발생한 고장, 파손 기타 고객의 요청사항으로 인한 마사지체어 이동, 고객의 요청사항으로 인한 분해/조립이 필요할 시, 비용이 청구될 수 있습니다.

서비스 기간

- 01 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우,
설치 일로부터 정해진 기간 내에 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 02 공동 이용시설이나 영업용으로 사용 시 별도 단축 적용됩니다.

유상 서비스에 대한 안내

다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 01 제품 내에 물, 음료수, 커피, 기타 이물질이 투입하여 고장이 발생하였을 경우
- 02 제품에 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 03 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 04 바디프랜드 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 05 사용 전압을 잘못 사용하여 고장이 발생하였을 경우
- 06 고객이 제품을 임의 분해하여 파손된 경우
- 07 바디프랜드 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 08 천재지변에 의한 고장이 발생하였을 경우
- 09 사용 설명서 내에 있는 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 10 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 11 고객의 사용빈도나 부주의로 수명이 단축된 소모품
- 12 지속적인 햇빛, 자외선 노출로 인해 외관 사출이 탈색 및 변색된 경우

※단, 소비자 과실이나 사용으로 인한 경우가 아님을 소비자가 증명하거나, 당사의 AS 선정 기준에 적합한 경우
무상 A/S에 준할 수 있습니다.

반품 및 교환 불가 사유

본 제품은 설치하는 전자제품으로 하기와 같은 사유로 반품 및 교환이 불가합니다.

(설치 후 사용 시 제품의 가치가 현저히 하락하여, 새 제품으로의 판매가 불가능)

- 01 개인 변심(색상, 가격 변동 등)으로 인한 교환 및 반품 불가
- 02 제품의 중요한 수리를 요하는 하자가 아닌 경우, 설치 후 교환 및 반품 불가 (A/S로 진행)
- 03 개인차(마사지 강도, 신체 사이즈 등)로 인한 교환 및 반품 불가 (구매 전 제품 테스트 권장)

제품 보증서

- 01 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 02 무상 서비스 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기를 바랍니다.
- 03 본 제품을 개인, 가정용으로만 사용하시기를 바랍니다.
- 04 본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.
- 05 본 보증서는 재발행하지 않습니다.

제품명	전기마사지기	모델명	
제조일자	년 월 일	제조번호	
구입처명		구입처 연락처	
설치일자	년 월 일	무상보증기간	년 월 일

고객란	성 명 :	
	주 소 :	
	연락처 :	

- ※ 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우, 구입일로부터 산정된 보증기간의 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
- ※ 본 제품을 가정용 이외의 용도로 사용할 경우, 보증기간은 단축 적용됩니다.
- ※ 유/무상 서비스 기준은 당사가 규정한 A/S 품목에 준하여 적용됩니다. (고객 서비스 안내 페이지 참고.)
- ※ 마사지체어의 품질보증 기간은 설치일로부터 1년입니다.


 본 사용 설명서를 폐기할 때는 해당 지역의 분리수거 규정에 따라 처분하여 주십시오.



메모

QUANTUM

제품명	전기 마사지기
모델명	BFR-9010
A/S 연락처	02)3448-8980
매뉴얼 넘버	231213

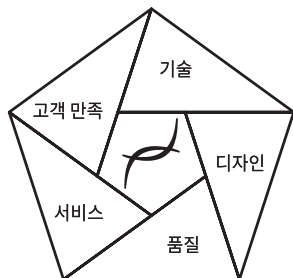

바디프랜드 펜타곤 PENTAGON

완전무결한 오감초격차 전략으로 10년 더 건강하게!

오각형은 가장 완벽하고 안정된 모양으로 완전성을 상징합니다.

바디프랜드는 황금비를 갖춘 오각형(Pentagon)을 기술 · 디자인 · 품질 · 서비스 · 고객 만족에 이르는 5가지 분야에 적용, 누구도 따라올 수 없을 정도의 격차를 뜻하는 '오감초격차(五感超格差)' 전략으로 건강수명 10년 연장의 꿈을 실현해 가고 있습니다.

집에서 편안하게 마사지를 받으며 측정된 데이터를 바탕으로 맞춤형 건강 서비스를 제공하는 '디지털 헬스케어' 더 나아가 IoT 기술에 기반한 '홈 헬스케어 플랫폼'으로서 성장해 가는 바디프랜드와 함께 건강한 라이프스타일을 즐기시기 바랍니다.