


The PHANTOM

바디프랜드
마사지체어
더팬텀
사용 설명서

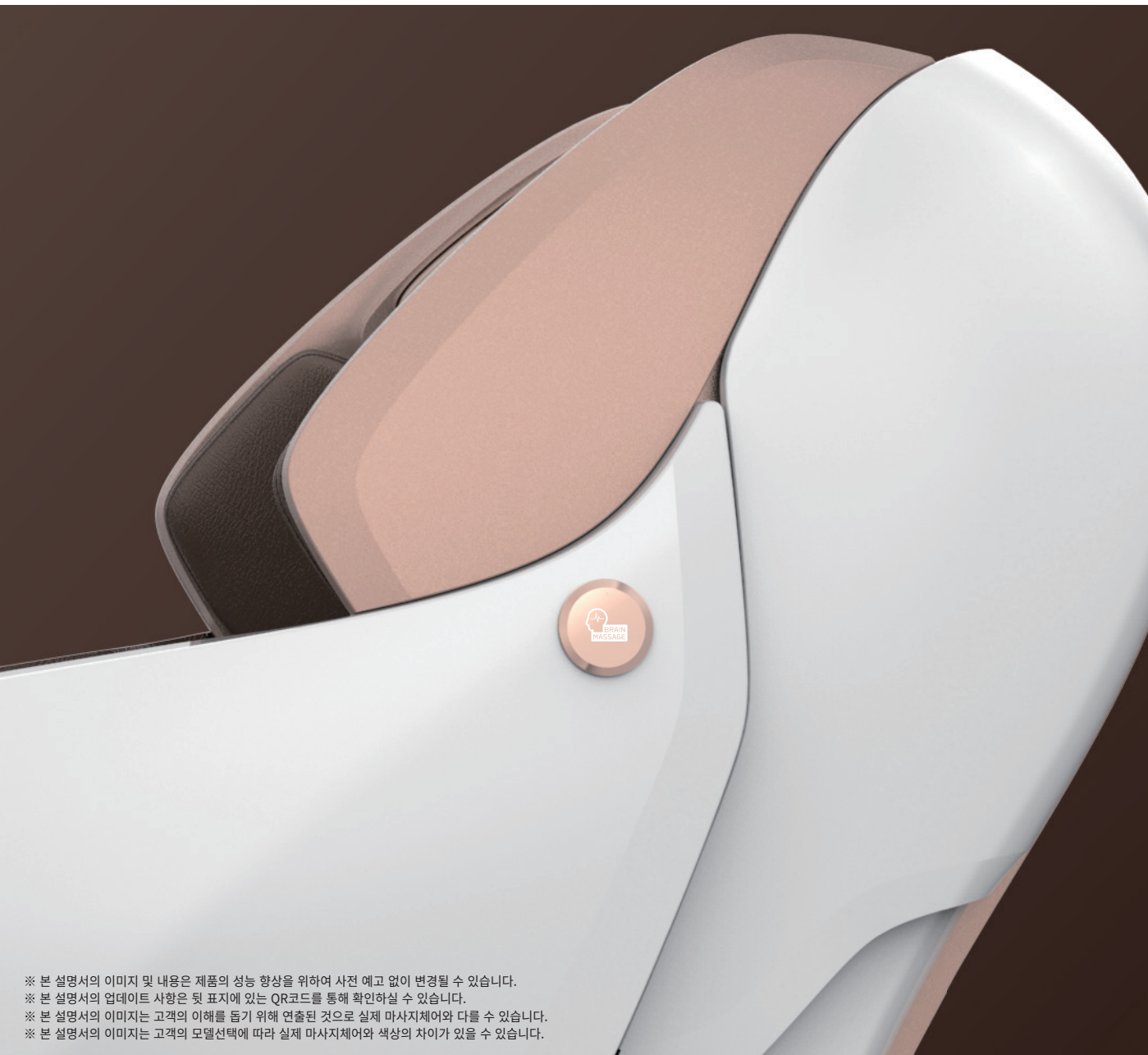

- ※ 본 설명서의 이미지 및 내용은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- ※ 본 설명서의 업데이트 사항은 뒷 표지에 있는 QR코드를 통해 확인하실 수 있습니다.
- ※ 본 설명서의 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 실제 마사지체어와 다를 수 있습니다.
- ※ 본 설명서의 이미지는 고객의 모델선택에 따라 실제 마사지체어와 색상의 차이가 있을 수 있습니다.



BODYFRIEND

인사말

바디프랜드 마사지체어 [더팬텀]을 구입해주신 고객님께 깊은 감사드립니다.

사용하시기 전에 사용 설명서를 읽어 보신 후 보다 안전하고 편리한 사용을 하시기 바랍니다.

또한, 본 제품은 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 그럴 경우 본 사용 설명서의 내용 및 이미지와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

※ 제품을 사용하기 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하기 바랍니다.

※ 본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 본 제품의 이미지 및 사양은 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 특징



XD PRO



헬스케어 마사지



브레인 마사지



멘탈 마사지



선호 모드



허벅지/회음부
마사지



온열 마사지볼



부위별 마사지 조절



날개형 어깨 에어백



3 STEP 자석지압
발바닥 롤링 마사지



자석 손지압



끼임 감지 센서



발바닥 온열



스마트폰
App 리모컨



블루투스 스피커

XD PRO

XD PRO 모듈의 고성능 센서가 마사지 부위를 세세하게 인식하여 더욱 섬세하고 정교한 마사지를 제공해 줍니다.

부위별 마사지 조절

부위별로 마사지 속도 및 에어 강도를 쉽게 조절할 수 있습니다.

정전 보호 버튼

마사지체어가 작동 중에 전원 공급이 끊겨 멈췄을 시, 버튼을 누르면 원상 복귀됩니다.

목차

	제품 특징	02
사용 전 안내 사항	안전을 위한 주의 사항	04
	제품 각 부분 명칭 이동 및 설치	13
	제품 연결 방법	14
리모컨 설명	리모컨 버튼 설명	15
	리모컨 작동 설명	17
모드 설명	헬스케어 마사지 브레인 마사지	24
	자동 모드	25
	수동 모드 멘탈 마사지	26
기능 설명	XD PRO 모듈 설명	27
제품 사양	제품 규격 및 사양	28
고장 진단 및 조치	고장 신고 전 확인 사항	29
	고객 서비스 안내	30
제품 보증서	제품 보증서	31

안전을 위한 주의 사항

※ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

※ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



경고

화상, 화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이기 위해



주의

부상의 위험을 방지하기 위해

사용 전 주의사항



경고

목욕탕이나 습기가 많은 곳을 피하여 설치 및 사용하시기 바랍니다.




감전, 화재, 변형, 곰팡이, 고장 등의 원인이 됩니다.

먼지가 많거나 녹이 슬 수 있는 장소를 피하여 설치 및 사용하시기 바랍니다.




감전, 화재, 변형, 곰팡이, 고장 등의 원인이 됩니다.

직사광선 아래 또는 실내 온도가 40°C를 초과하는 환경에서는 사용하지 마십시오.

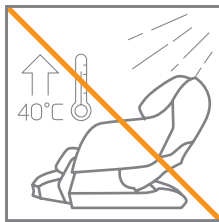


화재, 고장의 원인이 됩니다.

실외에 설치하지 마십시오.

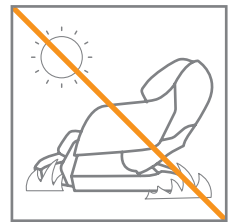

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

난방 기구 근처나 열 발생 장치 등의 근처에서 사용하지 마십시오.

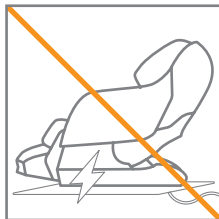

제품 손상, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

바닥이 평평하고 안정된 장소에 설치 및 사용하시기 바랍니다.




안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의 사항

사용 전 주의사항

⚠ 경고

사용하기 적당한 공간과 환기가 잘 되는 곳에 설치하시기 바랍니다.

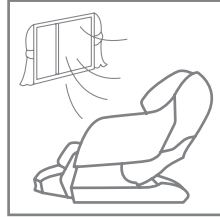

변형, 곰팡이, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품을 임의로 분해하여 사용하지 마십시오.



안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

다른 전기제품 또는 의료제품과의 혼용을 자제하여 주시기 바랍니다.




안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품에 이물질을 쏟거나 뿌리지 마십시오.




안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

본 제품 위에 무게가 많이 나가는 제품을 올려놓지 마십시오.

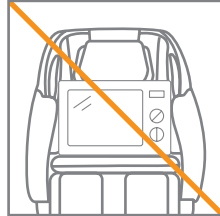

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

유아나 반려동물 등이 본 제품의 하단부, 후면부, 다리 조정부 등으로 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다.

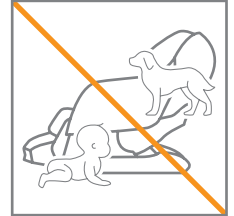

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

기술자의 도움 없이 기기를 설치하거나 수리하지 마십시오.



안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

본 제품은 설명서에 기재된 용도 이외에 사용하지 마십시오.



안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.


안전을 위한 주의 사항

사용 전 주의사항

⚠ 주의


제품을 전원 케이블로 운반하거나, 손으로 케이블을 잡아당기지 마십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

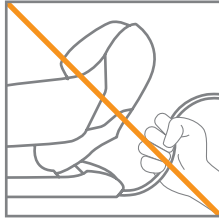


감전의 위험을 피하기 위해 본 제품을 보호 접지된 전원 콘센트에만 연결하십시오.

감전, 상해의 원인이 됩니다.

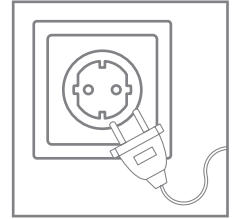


사용하기 전에 제품의 전원 상태를 확인하시기 바랍니다.

제품의 올바른 사용이 가능합니다.

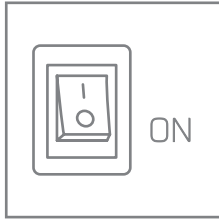


전원은 교류 220V 전용 콘센트를 사용하십시오.

고장 또는 누전 시 감전의 원인이 됩니다.

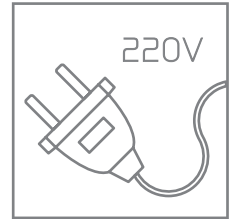


본 제품을 전원 분리가 어려운 곳에 설치하지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

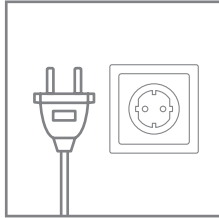


전원 플러그를 분리할 때 케이블을 잡아당기지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

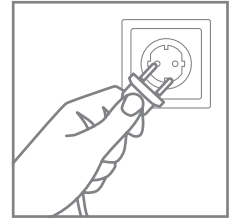


제품의 안전 센서 동작 상태와 제품 복귀 전 유아나 반려동물이 근처에 있는지 확인한 후 사용하십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

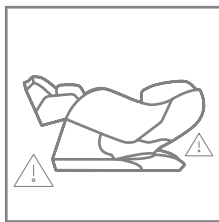

청바지 등의 짙은 색상 옷을 입고 사용 시 제품 시트에 이염이 될 가능성이 있으니 주의하시기 바랍니다.

시트 이염의 원인이 됩니다.

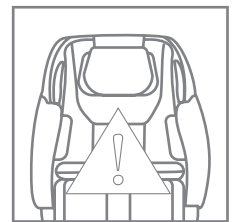


안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의사항

⚠ 경고


제품의 조작 방법 및 발생 가능한 부작용 사례를 확인하시기 바랍니다.

제품의 올바른 사용이 가능합니다.

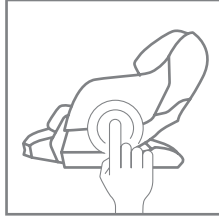

전원 플러그를 꽂거나 뽑을 때 젖은 손은 감전의 위험이 있습니다.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

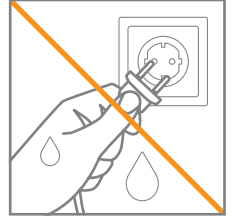

사용자의 몸이 젖은 상태에서 제품을 사용하지 마십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.




과도한 식사 후 바로 사용하지 마십시오.

부상의 원인이 됩니다.




사용 중 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

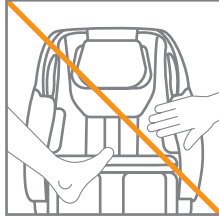


신체의 특정 부분을 집중적으로 사용 시 몸에 무리가 올 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

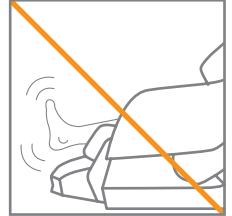


제품을 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하시기 바랍니다.

고장 또는 누전 시 감전의 원인이 됩니다.

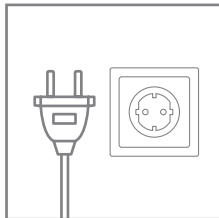


유아나 어린이의 사용을 자제하여 주시기 바랍니다.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

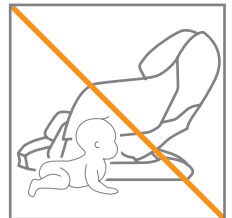


머리, 팔꿈치, 가슴, 배, 무릎 등의 부위에 사용하지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

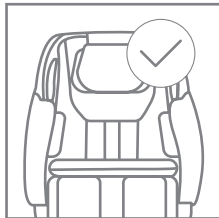

마사지볼이 작동하는 동안 올바른 위치에서 작동될 수 있도록 조작해 주시기 바랍니다.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

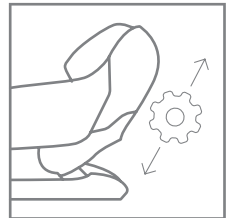


안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의사항

⚠ 경고

사용 중 제품에서 내려오실 때는
제품의 각도가 완전히 복귀된 후
내리시기 바랍니다.

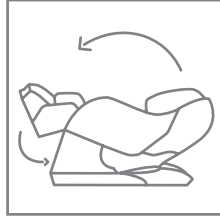


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.

사용 중 통증이나 고통이 심할
시에는 즉시 사용을 멈추고,
사용자의 건강 상황에 맞는 후속
조치를 취해 주시기 바랍니다.




부상 등의 원인이 됩니다.

연속적으로 사용 시에는
몸에 무리가 갈 수도 있으니,
사용자의 건강 상태에 맞추어
선택하시기 바랍니다.

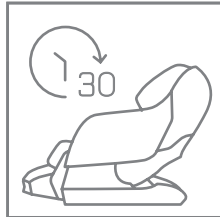


부상의 원인이 됩니다.

제품이 작동할 때는 어린이나
반려동물이 주변에서 놀지
않도록 주의하십시오.

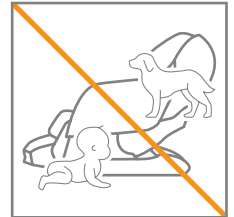


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.

에어로졸(스프레이) 제품을
사용하거나 산소를 사용하는
곳에서는 작동시키지 마십시오.

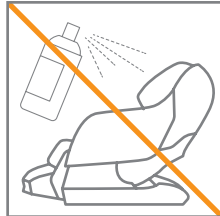

제품 손상, 화재, 폭발, 고장의
원인이 됩니다.

장신구를 착용한 상태에서
사용하지 마십시오.

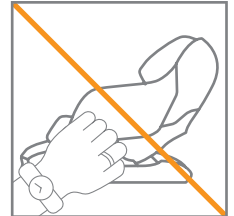

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상,
고장 등의 원인이 됩니다.

사용 중 긴머리가 끼이지 않도록
주의하십시오.




안전사고, 부상의 원인이 됩니다.

제품에 물건을 떨어뜨리거나 빈
공간에 물건을 집어넣지 않도록
주의하십시오.



안전사고, 부상, 제품 손상, 화재,
고장 등의 원인이 됩니다.

본 제품에 손상된 케이블, 플러그가
있거나 혹은 제대로 작동하지
않거나 물에 빠진 경우에는 작동
시키지 마시고 검사 및 수리를 위해
서비스 센터에 연락하십시오.

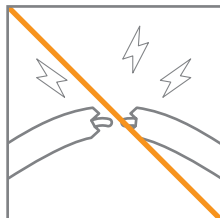

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

온열 기능 사용 시, 화상에
주의하십시오.




저온화상 등의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의사항

⚠ 경고

바른 자세로 착석한 후 제품을
사용하시기 바랍니다.

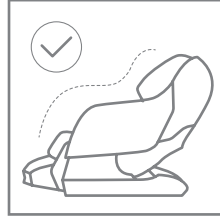

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상,
고장 등의 원인이 됩니다.

제품의 커버가 찢어지거나
벗겨진 상태에서 사용하지
마십시오.



안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.


⚠ 주의

한 번에 두 사람 이상이
사용하지 않도록 하십시오.




안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.

주변의 온도가 급격하게
변화되는 곳에서는 사용을
자제하여 주시기 바랍니다.

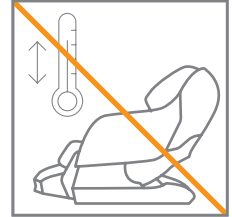


부상, 상해의 원인이 됩니다.

120kg이상 하중을 가하지
않도록 주의하시기 바랍니다.

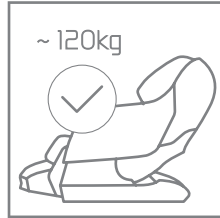

안전사고, 변형, 소음, 가죽 마모,
고장 등의 원인이 됩니다.

신장이 150cm이하이거나
190cm이상인 사람은
마사지감이 다를 수 있습니다.

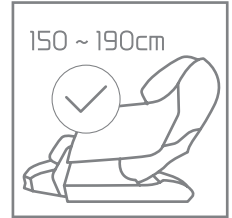

마사지부의 밀착 부족, 통증, 부상
등의 원인이 됩니다.

제품 위에 서 있지 마십시오.
앉은 상태에서만 사용하시기
바랍니다.



안전사고, 부상, 상해, 제품 손상,
고장 등의 원인이 됩니다.

마사지 받은 후에 잠이 드셨을
때는 저체온을 주의하시기
바랍니다.



안전사고, 부상 등의 원인이 됩니다.


안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의사항

⚠ 주의

제품의 케이블이 손상되거나
과도하게 구부러지지 않도록
주의하십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이
됩니다.

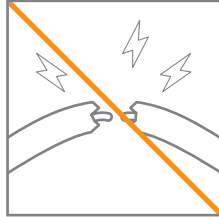


제품의 안전한 사용을 위해 낮은
강도의 마사지에서 시작하시기
바랍니다.

부상의 원인이 됩니다.



제품의 다리 마사지부를 손으로
들지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.

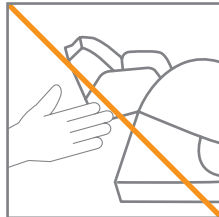


제품 후면부에 기대거나
매달리지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.



반려동물이 전원 케이블을 물지
않도록 주의하십시오.

감전, 제품 손상, 고장 등의 원인이
됩니다.

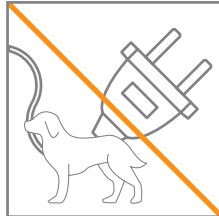


제품이 리클라이닝 될 때 다리
마사지부 위에 서있지 않도록
주의하십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.



전원 플러그를 콘센트에 꽂기
전에 전원 스위치가 꺼짐으로
되어 있는지 확인하시기
바랍니다.

감전, 제품 손상, 고장 등의 원인이
됩니다.

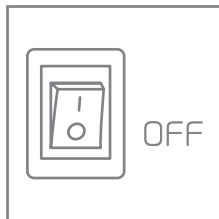


제품 후면부, 팔 마사지부,
다리 마사지부 위에 걸터앉지
마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.




리모컨은 지정된 위치에
보관하시고, 힘으로
잡아당기거나 충격을 주지
마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.

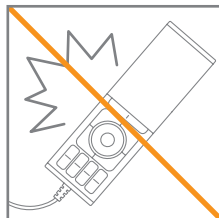

리모컨 버튼을 빠른 속도로
연타하지 마시고, 버튼이
눌려 있는 상태가 되지 않도록
주의하십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.

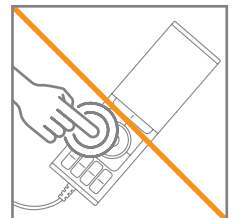


안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의사항

⚠ 주의


블루투스 스피커 사용 시, 너무 큰 볼륨으로 장시간 사용하지 마십시오. (*일부 제품 해당)

청력 손상의 원인이 됩니다.

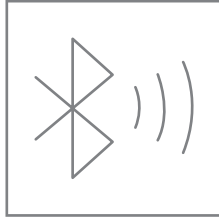

태블릿 거치대를 손으로 잡고 일어나지 마십시오. (*일부 제품 해당)

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

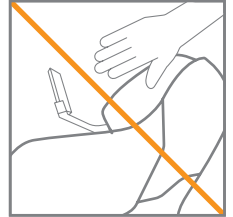


제품을 물세척하지 마십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.




제품을 청소하거나 손질할 때는 전원 플러그를 뽑고 진행하시기 바랍니다.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

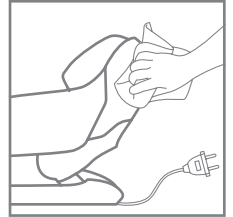


제품을 청소할 때 부드러운 천으로 가볍게 닦아주고, 신나 등의 유기용제나 화공약품 등을 사용하지 마십시오.

제품 손상의 원인이 됩니다.

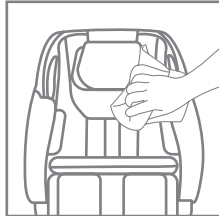


천연가죽 시트는 반드시 가죽 전용 클리너로 닦으시기 바랍니다. (*일부 제품 해당)

제품 손상의 원인이 됩니다.

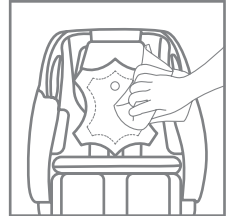

USB 충전단자를 사용하여 충전 시, 차폐 케이블을 사용하여 주시기 바랍니다. (*일부 제품 해당)

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

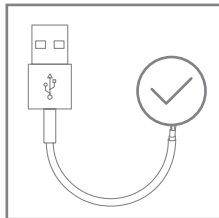

※ 차폐 케이블은 외부에서 유입되는 노이즈와 내부에서 발생하는 노이즈를 억제하기 위해 전선에 알루미늄 호일을 감싸거나 구리나 스틸을 그물망 형태로 촘촘하게 엮어 보호한 케이블을 의미합니다.

안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의사항

금기사항

• 마사지체어를 사용하면 안되는 고객

- 혈전증(thrombosis)과 색전증(embolism), 중증 하지 정맥류 등 의사로부터 사용이 부적절하다고 진단받은 자
- 임신 초기인 자(1기, 초기 3개월)
- 심장, 신장 및 간에 중증 질환이 있는 자
- 조현병 또는 다른 정신 질환이 있는 자
- 뇌전증 또는 뇌질환이 있는 자
- 혼자 거동이 불가능한 자

• 마사지체어 사용 시 전문의 진단이 필요한 고객

- 임신 초기를 제외한 임신부 중 제품의 사용으로 인해 부작용이 우려되는 자
- 정상보다 체온이 높으면서 오한, 발열 등 급성염증 증상을 동반한 자
- 중증 피부 질환 (욕창, 화상) 등이 있는 자
- 악성 종양 등이 있는 자
- 고령, 급격한 체중 감소 혹은 기타 질환으로 근감소가 있는 자
- 의사의 진료 및 치료를 받고 있어 안정을 필요로 하는 자
- 급성 디스크 및 급성 경추염좌 (cervical sprain)진단을 받은 자
- 중증의 골다공증이 있는 자
- 이식형 심장박동기 등 인체 이식형 전자의료기기를 사용하고 있는 자
- 의사표현이 자유롭지 못한 자
- 거동이 불편한 자
- 기타 몸의 이상을 느끼고 있는 자

온열 기능 사용 시 주의사항

- 장시간 사용 시, 피부에 저온화상 등 위험이 있을 수 있으니 연속으로 사용하지 마십시오.
- 온열이 작동되는 부위에는 맨살이 닿지 않게 해주세요.
- 피부가 약한 아이들이나 노인, 환자들은 보호자의 보호가 필요하며 더욱더 주의하여 사용하시기 바랍니다.
- 온열 기능을 켜놓은 상태에서 잠들지 마십시오.

제품 사용 시 발생 가능한 부작용 사례

• 제품 사용 중에 다음과 같은 부작용이 발생할 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.


- 제품에 의한 찰과상, 타박상(좌상) 등
- 알레르기 증상 및 화상 등
- 제품의 과도한 사용 및 압력으로 인한 근육 및 힘줄 손상 등
- 노인성 척추골절 및 염좌 등

제품 각 부분 명칭 | 이동 및 설치

박스 개봉

본 제품은 3개의 박스로 구성되어 있습니다. 구성품을 잘 확인하시길 바랍니다.

- **본체박스** : 제품 본체, 등/엉덩이 시트, 머리 시트, 어깨 마사지부, 악세서리 박스 (리모컨, 전원 케이블, 매뉴얼)
- **팔 마사지부**
- **다리 마사지부**

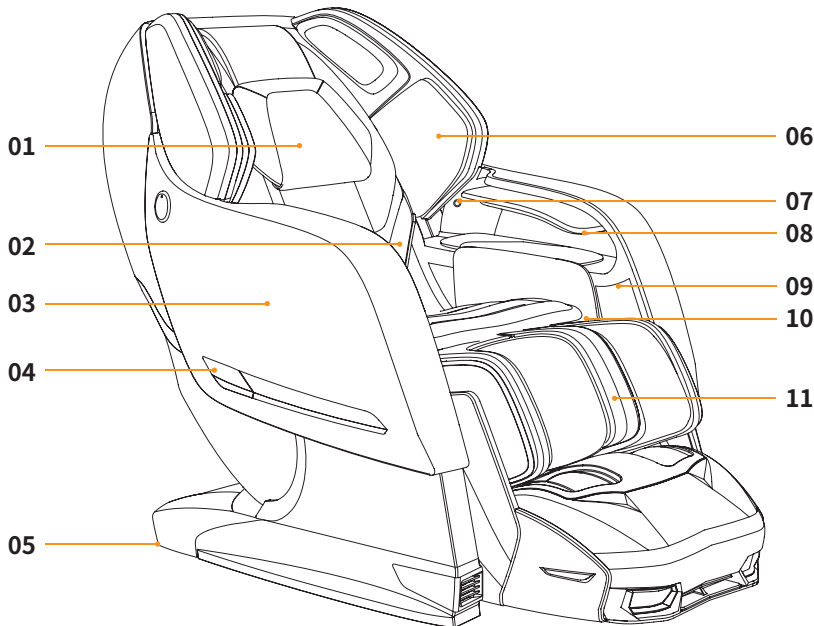


외부구성

- 01 머리 시트
- 02 등 시트
- 03 사이드 패널
- 04 LED 조명
- 05 이동 바퀴
- 06 어깨 마사지부
- 07 정전 보호 버튼
 - ※ 마사지체어가 작동 중에 전원 공급이 끊겨 멈췄을 시, 원상복귀를 돕는 버튼입니다.
- 08 팔 마사지부
- 09 리모컨 수납
- 10 USB 충전단자
 - ※ 좌측 엉덩이 시트 안쪽에 검정색 원형 마개가 있습니다. 해당 마개를 열면 USB 충전 단자를 확인할 수 있습니다.
- 11 다리 마사지부

이동 방법 및 설치 공간 확인하기

- 제품을 설치하기 전에 충분한 공간이 있는지 확인합니다.
- 제품 주변에 장애물이나 부속물이 없도록 하십시오.
- 제품 머리 후면부가 유리창을 향하지 않도록 설치하십시오.
- 제품을 뒤로 눕혀서 이동하기 편리한 각도로 만들어 원하는 곳으로 이동 후, 천천히 앞으로 내려 설치합니다.
- 설치할 때 제품 밑으로 케이블 선이 깔리지 않도록 주의하시기 바랍니다.


- ※ 제품 무게로 바닥에 흡집 및 이음이 생길 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- ※ 제품 이동 시, 반드시 2인 이상 함께 움직이시기 바랍니다.

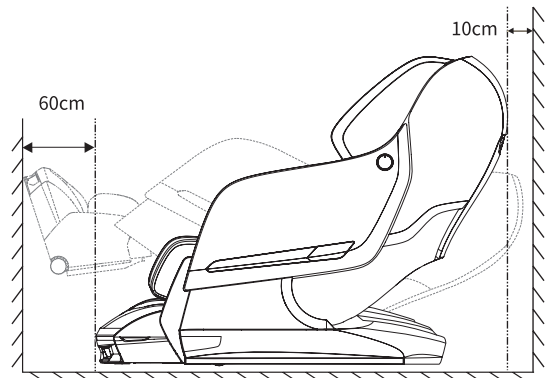

제품 연결 방법


리모컨 연결하기

리모컨 케이블을 오른쪽 사이드 패널 안쪽에 위치한 리모컨 연결단자의 홈에 맞춰 연결합니다.

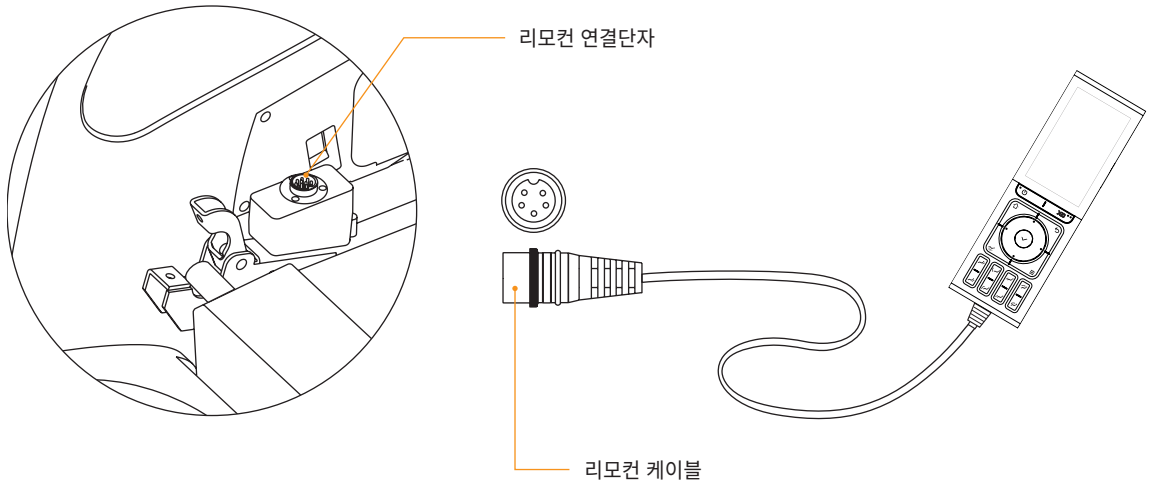


전원 연결하기

전원 케이블을 후면 하단에 위치한 전원 연결단자의 홈에 맞춰 연결합니다.
전원 연결 후 전원 스위치를 켜시면 됩니다.

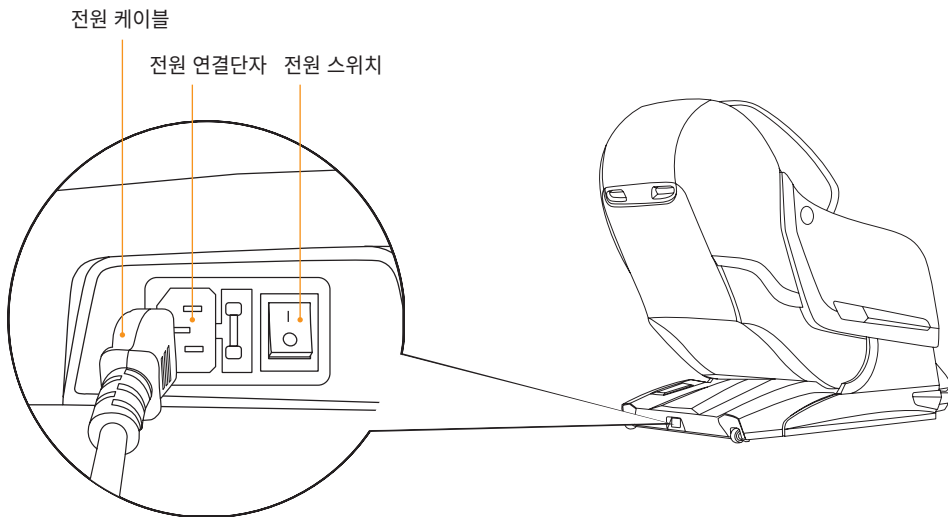







리모컨 버튼 설명

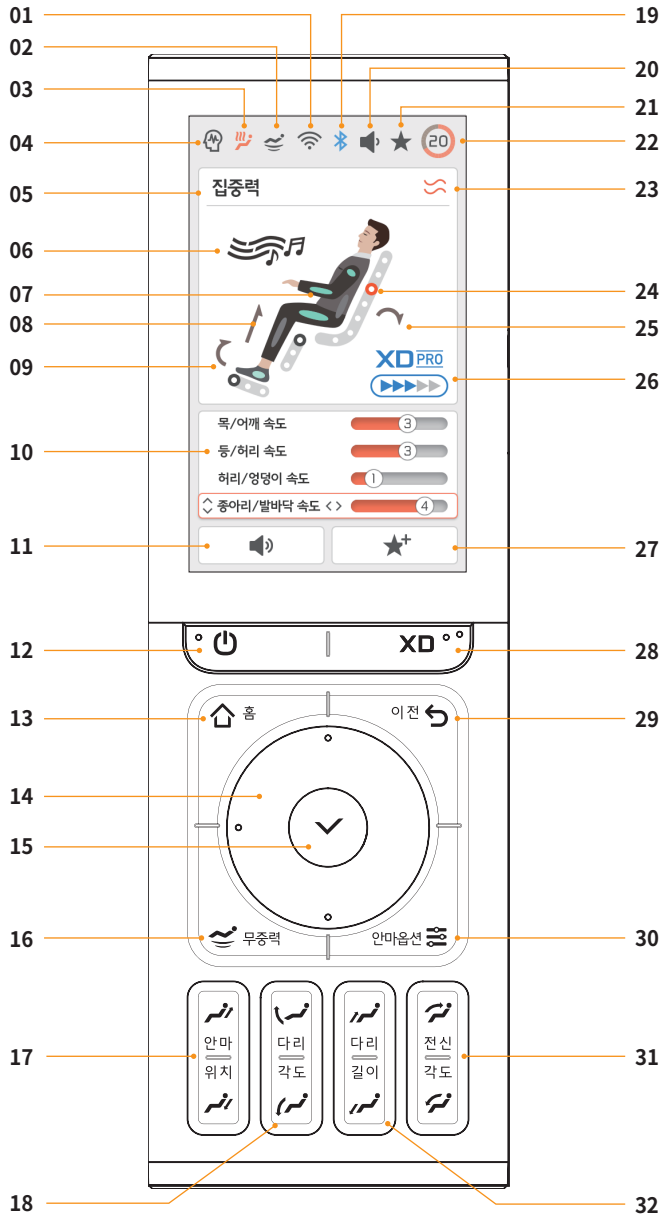

리모컨 구성

- 01 Wi-Fi 연결 표시
- 02 무중력 표시
- 03 온열 표시
- 04 자동/수동 프로그램 표시
- 05 마사지 모드 표시
- 06 음원 재생 표시
- 07 에어백 표시
- 08 다리 길이 조절 표시
- 09 다리 각도 조절 표시
- 10 목/어깨 속도 표시
- 11 등/허리 속도 표시
- 12 종아리/발바닥 속도 표시
- 11 볼륨 조절 (설정 화면 이동)
- 12 전원
- 13 홈
- 14 상하좌우
- 15 확인
- 16 무중력 각도 조절
- 17 안마(마사지) 위치 및 어깨 위치 조절
- 18 다리 각도 조절
- 19 블루투스 연결 표시
- 20 스피커 사운드 표시
- 21 선호 모드 표시
- 22 마사지 시간 표시
- 23 마사지 방식 표시
- 24 마사지 모듈 위치 표시
- 25 전신 각도 조절 표시
- 26 XD 강도 표시
- 27 선호 모드 등록
- 28 XD 강도 조절
- 29 이전
- 30 안마(마사지) 옵션
- 31 전신 각도 조절
- 32 다리 길이 조절


리모컨 버튼 설명

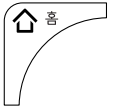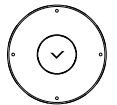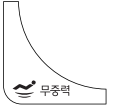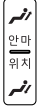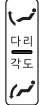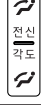	전원/일시정지	전원 : 사용 중 [전원 버튼]을 누르고 안내 화면을 확인한 후, '예'를 선택하면 모든 동작이 멈추게 되며 마사지볼과 기기는 자동으로 원상 복귀됩니다. 일시정지 : 사용 중 [전원 버튼]을 누르면 동작이 일시정지되며, 안내 화면을 확인한 후 '아니요'를 선택하면 마사지가 재실행됩니다. ※[●] 점자 : 시각장애인을 위한 점자가 표기 되어 있습니다.
	XD 단계	마사지볼의 돌출 정도를 사용자의 체형에 맞게 설정할 수 있습니다. ※[●●] 점자 : 시각장애인을 위한 점자가 표기 되어 있습니다.
	홈	사용 중 [홈 버튼]을 누르면 홈 화면이 나옵니다.
	이전	이전 화면으로 돌아갑니다.
	상하좌우 확인	[상/하/좌/우 버튼]으로 이동 및 선택한 뒤 [확인 버튼]으로 실행할 수 있습니다. 홈 화면에서 [상/하 버튼]으로 마사지 부위를 선택한 후, [좌/우 버튼]으로 마사지 속도 단계를 조절할 수 있습니다.
	무중력	무중력 상태와 비슷한 자세로 각도 조절이 되는 기능으로 마사지를 받는 최적의 자세로 만들어줍니다.
	안마(마사지) 옵션	롤링, 온열, 에어 강도를 조절할 수 있습니다.
	안마(마사지) 위치	체형 검색 후 어깨 위치를 조절하는 버튼입니다. 자동 프로그램 선택 시, 마사지 위치를 조절할 수 있습니다. 수동 모드 선택 시, 마사지볼의 상/하 위치를 조절하여 고정할 수 있습니다.
	다리 각도	다리 각도를 조절하는 버튼입니다. ※ 일부 모드에서는 자동 각도 해제 안내 후, 수동으로 각도 조절이 가능합니다. ※ 정확한 다리 길이 측정을 위해 발뭇꿈치를 다리부 안쪽까지 넣어 주시기를 바랍니다.
	다리 길이	다리 길이를 조절하는 버튼입니다. ※ 일부 모드에서는 자동 각도 해제 안내 후, 수동으로 각도 조절이 가능합니다.
	전신 각도	전신 각도를 조절하는 버튼입니다. ※ 일부 모드에서는 자동 각도 해제 안내 후, 수동으로 각도 조절이 가능합니다.

리모컨 작동 설명

시작하기

[전원 버튼] > 모드 선택 후 [확인 버튼] > 체형 검색 및 어깨 위치 조절 > 마사지 시작

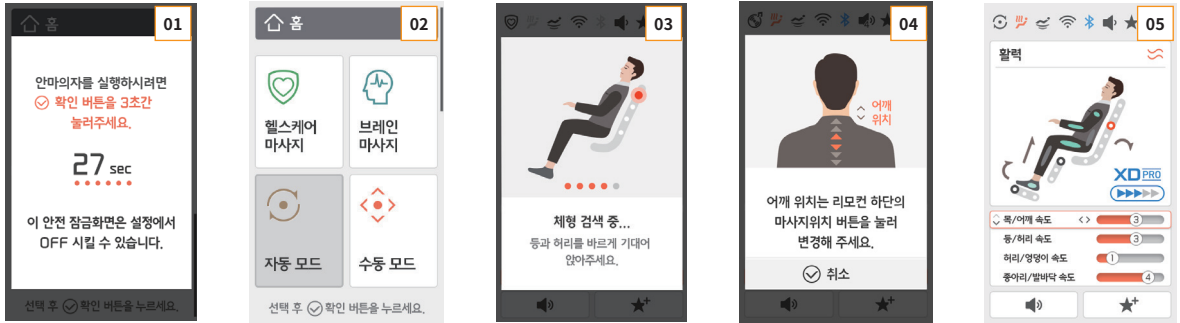

01 안전 잠금

안전상의 이유로 어린이가 함부로 마사지체어 동작을 할 수 없도록 안전 잠금 기능을 제공합니다. 리모컨 전원을 켜고 안전 잠금 화면이 나타나면 [확인 버튼]을 3초 동안 눌러 잠금을 해제한 후 사용할 수 있습니다. 설정에서 해당 기능의 사용 여부를 결정할 수 있습니다.

02 홈 화면

[홈 버튼]을 누르면 나타납니다. 원하는 프로그램을 선택할 수 있고, 그 밖의 마사지 체어 기능을 세부 설정할 수 있습니다.

03 체형 검색 중

마사지가 시작되면 자동으로 체형을 검색하여 사용자의 체형에 맞게 세팅합니다. 등과 허리를 바르게 기대어 앉기 바랍니다.

04 어깨 위치 조절

체형 검색이 끝나면 어깨 위치 조절 화면이 나타납니다. [안마(마사지) 위치 버튼]을 눌러 어깨 위치를 변경한 후 [확인 버튼]을 누릅니다.


※ [확인 버튼]을 누를 경우 마사지는 바로 시작되며, 버튼을 누르지 않을 경우 약 5초 후에 마사지가 자동으로 시작됩니다.

05 마사지 재생 화면

재생 중인 마사지의 상태, 시간 등을 볼 수 있습니다. [상/하 버튼]으로 마사지 부위를 선택하고 [좌/우 버튼]으로 마사지 속도를 조절합니다.

종료하기

[전원 버튼] > 안내 화면 확인 후 '예' 선택 > 마사지 종료

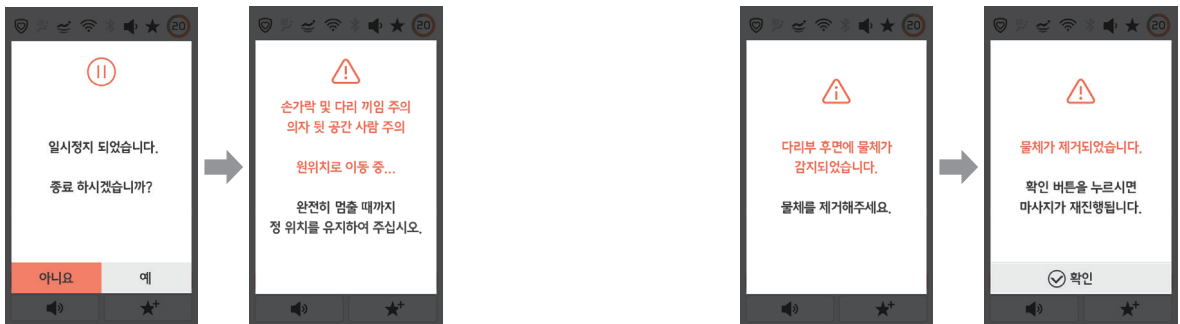

※ 물체가 끼었을 경우에는 물체를 제거한 뒤 리모컨의 [확인 버튼]을 누르면 마사지를 재시작할 수 있습니다.

리모컨 작동 설명

어깨 위치 조절

자동 프로그램 (헬스케어 마사지 / 브레인 마사지 / 자동 모드 / 멘탈 마사지)


01 자동 프로그램 실행 중에 리모컨 하단에 위치한 [안마(마사지) 위치 버튼]을 누르면 재생 중인 마사지, 노래가 멈추고 어깨 위치 재설정을 위한 안내 화면이 나타납니다.

02 [안마(마사지) 위치 버튼] 또는 [상/하 버튼]으로 어깨 위치를 조절한 후, [확인 버튼]을 누르면 마사지가 이어서 실행됩니다.



헬스케어 마사지

홈 > 헬스케어 마사지 > 모드 선택 후 [확인 버튼] > 체형 검색 및 어깨 위치 조절 > 마사지 시작

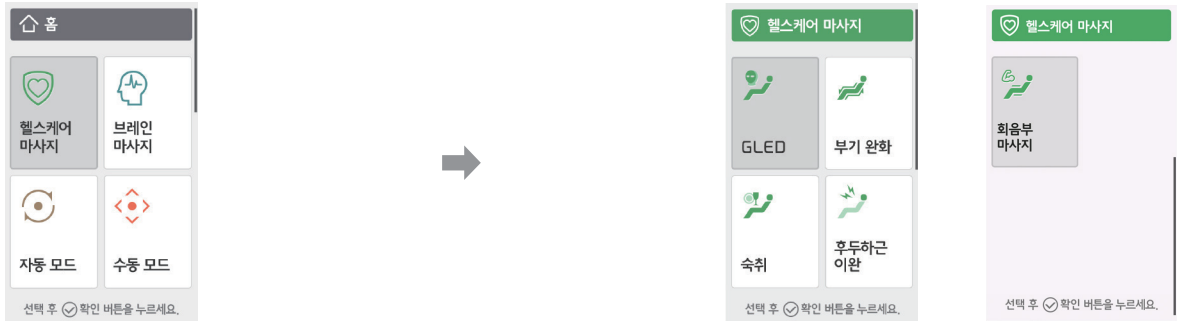

브레인 마사지


홈 > 브레인 마사지 > 모드 선택 후 [확인 버튼] > 음원 선택 후 [확인 버튼] > 체형 검색 및 어깨 위치 조절 > 마사지 시작



리모컨 작동 설명


자동 모드

홈 > 자동 모드 > 부위 / 스트레칭 / 수면 / 유저 / 스포츠 중 선택 후 [확인 버튼] > 모드 선택 후 [확인 버튼] > 체형 검색 및 어깨 위치 조절 > 마사지 시작

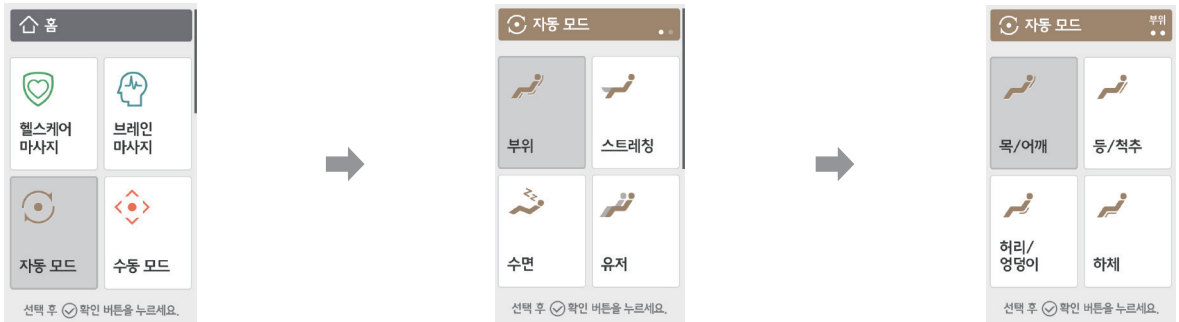


수동 모드

홈 > 수동 모드 > 마사지 범위 선택 > 마사지 방식 선택 > 세부 설정 단계 선택 > 에어 위치 및 강도 0-5단계 선택 > [확인 버튼] > 마사지 시작

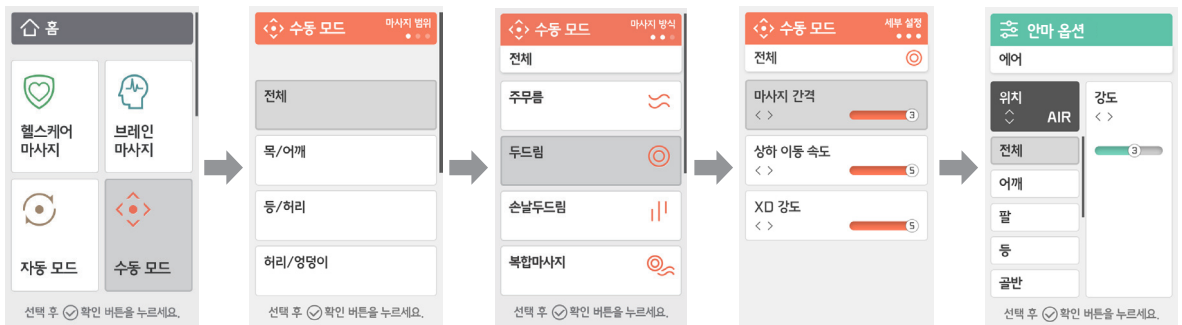

멘탈 마사지

홈 > 멘탈 마사지 > 모드 선택 후 [확인 버튼] > 음원 선택 후 [확인 버튼] > 체형 검색 및 어깨 위치 조절 > 마사지 시작

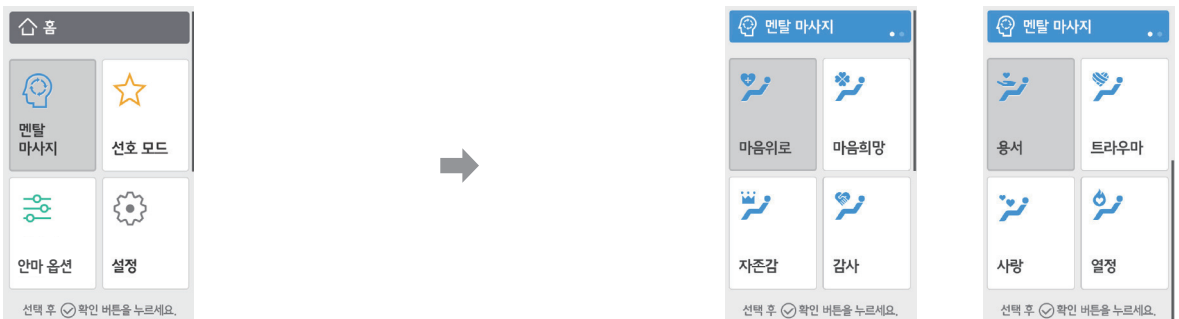

리모컨 작동 설명


선호 모드

01 등록하기 : 원하는 모드 실행 > 맞춤 마사지 설정 > 선호 모드로 등록합니다.

02 실행하기 : 홈 > 선호 모드 > 목록 > 등록된 선호 모드 중 원하는 모드 선택 > [확인 버튼]

03 목록 관리 : 선호 모드는 총 8개까지 등록이 가능합니다. 삭제하고 싶은 모드는 '선호 모드 - 관리'에서 삭제할 수 있습니다.

※ 선호 모드 등록 내용이 변경되면, 새로운 선호 모드로 등록됩니다.

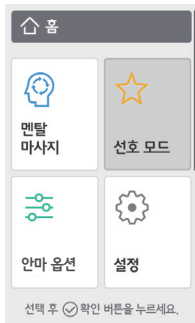

[선호 모드 저장 내역 범위]

자동 프로그램

- 01 모드 선택
- 02 부위별 마사지 강도
- 03 마사지 위치
- 04 XD PRO 강도
- 05 부위별 에어 강도
- 06 음원

수동 모드

- 01 마사지 범위
- 02 마사지 방식
- 03 마사지 간격
- 04 상하 이동 속도
- 05 XD PRO 강도
- 06 마사지 위치
- 07 등 각도 위치
- 08 다리 각도 위치
- 09 부위별 에어 강도

롤링


홈 > 안마 옵션 > 롤링 > 위치 및 속도 0-5단계 선택



온열

홈 > 안마 옵션 > 온열 > 강도 0-3단계 선택

※ 온열 기능은 열선이 설치된 범위에 제한적으로 적용됩니다.

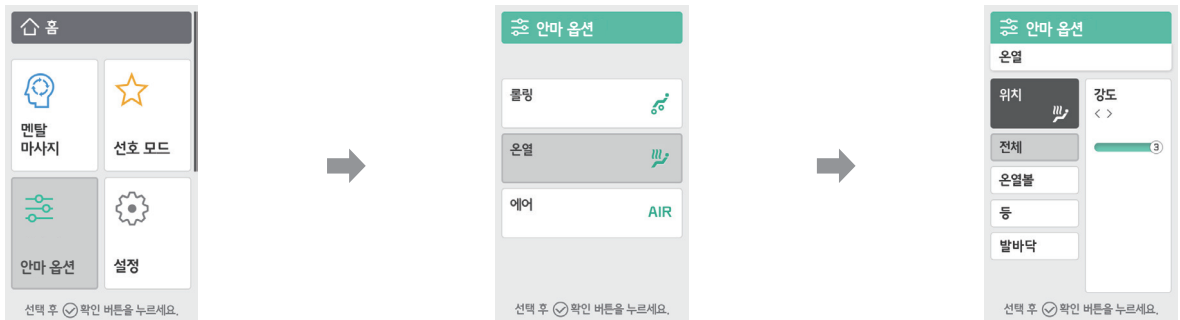

리모컨 작동 설명


에어

홈 > 안마 옵션 > 에어 > 위치 및 강도 0-5단계 선택




마사지체어 시간 변경

홈 > 설정 > 시간 10분/20분/30분 선택

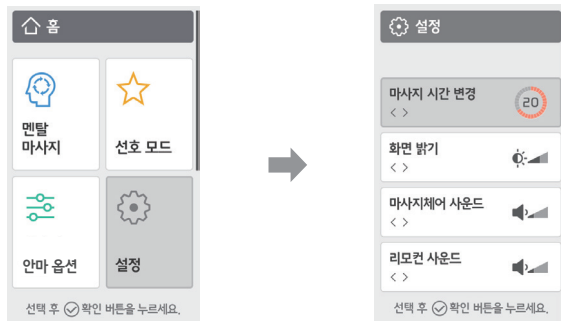


화면 밝기

홈 > 설정 > 화면 밝기 0-5단계 선택

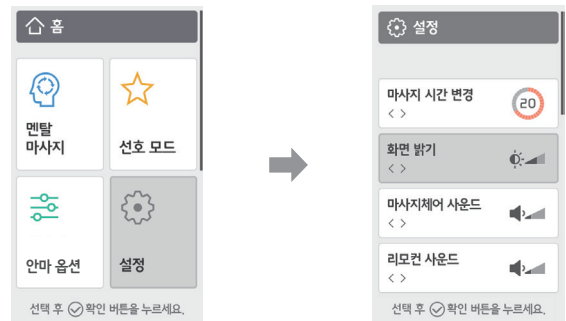


마사지체어 사운드

홈 > 설정 > 사운드 0-5단계 선택

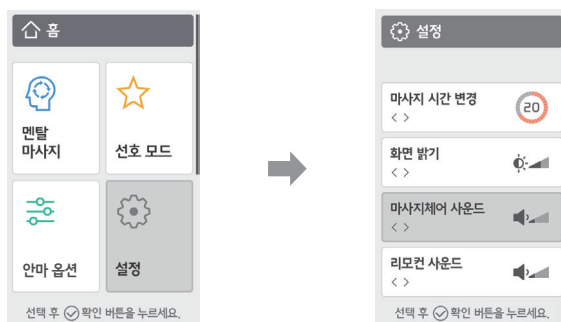

리모컨 사운드


홈 > 설정 > 사운드 0-3단계 선택

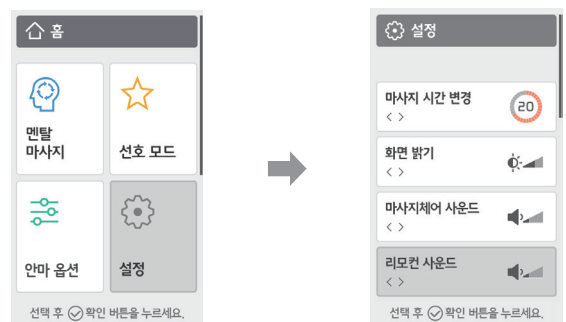

리모컨 작동 설명

LED


홈 > 설정 > 사이드 패널 LED ON/OFF 선택

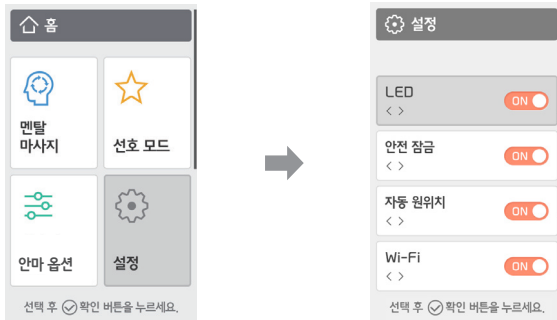

안전 잠금

홈 > 설정 > 안전 잠금 화면 ON/OFF 선택


※ 어린이 사고 방지를 위한 안전 잠금 기능입니다.

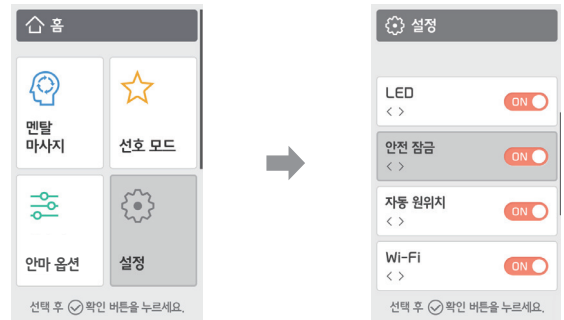

자동 원위치

홈 > 설정 > 자동 원위치 ON/OFF 선택


※ 마사지체어가 초기 상태로 자동 복귀되는 기능입니다.

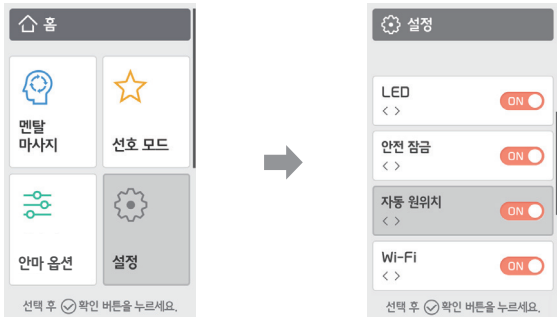

Wi-Fi

홈 화면 > 설정 > Wi-Fi > Wi-Fi 선택 > ON/OFF 선택

※ 최신 소프트웨어로 업데이트하기 위해 Wi-Fi를 ON으로 설정 바랍니다.

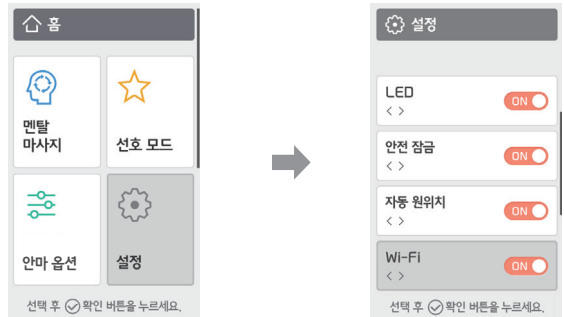

블루투스

홈 > 설정 > 블루투스 > 블루투스 ON/OFF 선택



블루투스 설정방법

- 01 리모컨 설정에서 블루투스를 ON 상태로 만듭니다.
- 02 핸드폰 설정에서 블루투스를 ON 상태로 만듭니다.
- 03 핸드폰에서 기기 검색을 시작 > 핸드폰에 기기명칭이 뜨고 페어링(서로 연결) 시 블루투스에 연결됩니다.


※ 블루투스(PIN) 비밀번호 : 9999

리모컨 작동 설명

소프트웨어 업데이트

홈 > 설정 > 소프트웨어 업데이트

※ 최신 소프트웨어로 업데이트하기 위해 Wi-Fi를 'ON'으로 설정 바랍니다.

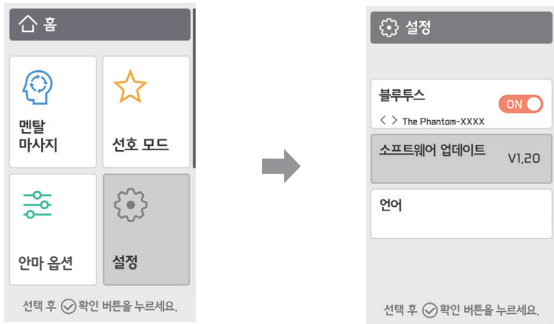

언어


홈 > 설정 > 언어 > 언어 선택 > [확인 버튼]



[App 리모컨 사용방법]

스마트폰으로 간편하게 마사지체어 기능을 선택 및 조절할 수 있습니다.

[안드로이드 - Play 스토어 / iOS - App Store] 또는 [바디프렌드 홈페이지]에서 'The Phantom' App을 다운 받을 수 있습니다.

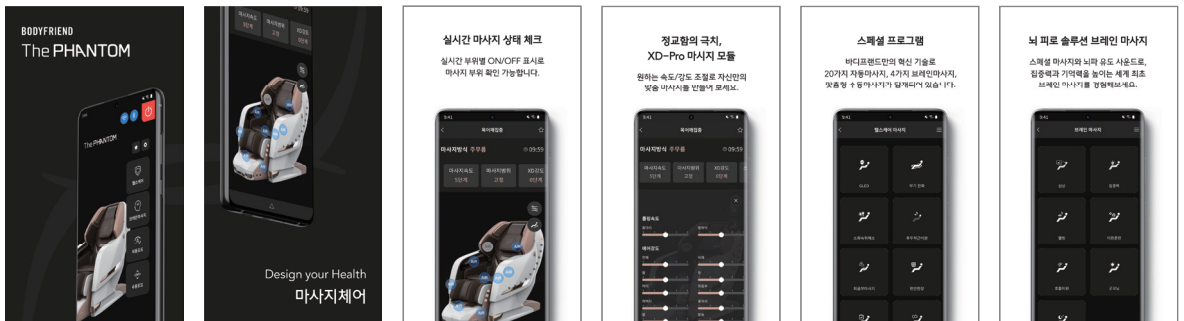

※ 안드로이드 App 이미지입니다. 해당 이미지 및 내용은 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

헬스케어 마사지 | 브레인 마사지

헬스케어 마사지

홈 > 헬스케어 마사지 > 모드 선택 후 [확인 버튼] > 체형 검색 및 어깨 위치 조절 > 마사지 시작

GLEED	스파 마사지를 받는 듯 편안한 마사지 코스입니다. (GLEED 마스크 사용 추천, 별매)
부기 완화	전신 에어백을 이용하여 부기 완화에 도움을 주는 순환 코스입니다.
숙취	숙취해소 등에 도움이 되는 주요 자극점을 마사지하는 코스입니다.
후두하근 이완	후두골과 목 뒤에 붙어 있는 4개의 근육들을 집중적으로 이완시키는 정밀 마사지 코스입니다.
회음부 마사지	에어백을 통해 회음 부위를 지압하고 엉덩이를 주물러서 집중 자극하는 마사지 코스입니다.

브레인 마사지

홈 > 브레인 마사지 > 모드 선택 후 [확인 버튼] > 음원 선택 후 [확인 버튼] > 체형 검색 및 어깨 위치 조절 > 마사지 시작

심상	나만의 휴양지에서 XD 심상 사운드와 함께 자유롭게 상상하고 싶은 분들을 위한 마사지 코스입니다.
집중력	과도한 학업 및 업무로 인해 피로한 두뇌에 휴식을 제공하고, 심신을 재충전하고 싶은 분들을 위한 마사지 코스입니다.
웰빙	일상에서 과도한 스트레스를 받아 휴식을 취하고 싶은 분들을 위한 마사지 코스입니다.
이완훈련	심신에 쌓인 긴장과 스트레스 해소를 원하는 분들을 위해 점진적 근육 이완요법을 활용하여 개발된 마사지 코스입니다. ※점진적 근육 이완요법 : 신체적인 근육의 긴장을 의도적으로 감소시켜 마음의 긴장까지 해소하는 기법
호흡이완	중요한 시험이나 발표를 앞둔 분들을 위해 호흡 이완요법을 활용하여 개발된 마사지 코스입니다. ※호흡 이완요법 : 의식적으로 호흡을 조절하여 마음을 이완시키고 과도한 긴장과 흥분을 낮추는 기법
굿모닝	아침잠이 많아 하루를 상쾌하게 시작하기 어려운 분들을 위한 아침 특화 마사지 코스입니다.
굿나잇	잠들기 전에 하룻동안 쌓인 피로를 풀면서 생각을 정리하고 싶은 분들을 위한 저녁 특화 마사지 코스입니다.

자동 모드

자동 모드

홈 > 자동 모드 > 부위 / 스트레칭 / 수면 / 유저 / 스포츠 중 선택 후 [확인 버튼] > 모드 선택 후 [확인 버튼] > 체형 검색 및 어깨 위치 조절 > 마사지 시작

부위	목/어깨	목, 어깨 부위를 주무름, 스트레칭으로 이완시키는 코스입니다.
	등/척추	등, 척추 주변 부위를 지압과 주무름으로 이완시키는 코스입니다.
	허리/엉덩이	허리, 엉덩이 주변부를 지압과 주무름으로 이완시키는 코스입니다.
	하체	허리 및 다리 부위에 집중적으로 다양한 마사지를 제공하는 코스입니다.
스트레칭	하체 스트레칭	골반을 지지하고 하지를 당겨 하체를 위주로 강하게 스트레칭해 주는 코스입니다.
	척추 스트레칭	척추 주변부 마사지와 함께 머리 뒤편을 지지하고 하지를 당겨 척추를 강하게 스트레칭해 주는 코스입니다.
	슬로우 스트레칭	강한 스트레칭이 부담스러운 분을 위한 부드러운 스트레칭 이완 코스입니다.
	에어 스트레칭	에어백 위주로 부드러운 마사지를 제공하는 이완 코스입니다.
수면	자연 수면	30분간 부드럽고 단조로운 전신 마사지와 각도 변화를 통해 수면을 유도하는 코스입니다.
	미니 낮잠	20분 이하의 효과적인 낮잠을 유도하기 위해 부드러운 두드림을 반복적으로 하는 코스입니다.
	해먹 수면	마사지체어의 스윙 패턴을 통해 해먹에서 잠드는 듯 안락한 마사지를 제공하는 코스입니다.
	야간 저소음	소음에 민감한 야간에도 사용할 수 있는 에어백을 제외한 전신 주무름 코스입니다.
유저	CEO	과도한 스트레스에 시달리는 CEO를 위한 목 어깨 위주의 피로회복 마사지 코스입니다.
	시니어	부드러운 저자극 마사지를 선호하는 시니어를 위한 안전한 마사지 코스입니다.
	육아맘	육아로 피로한 목과 허리를 집중적으로 마사지하고 팔, 다리, 골반부 특수 에어백 패턴 마사지를 제공하는 코스입니다.
	수험생	오래 앉아있어 불편해진 수험생의 허리와 목, 어깨에 상쾌한 마사지를 제공하는 코스입니다.
스포츠	골프	골프 라운딩 후 피로한 팔, 다리, 발바닥에 강한 마사지를 제공하는 코스입니다.
	필라테스	전신, 다리 각도의 변화를 통해 코어근육인 엉덩이, 아랫배를 자극하는 바른 자세와 근 이완에 도움을 주는 코스입니다.
	요가	유연한 몸을 만들어주는 요가 동작을 응용한 다이내믹한 마사지와 스트레칭을 제공하는 코스입니다.
	드라이빙	장시간 운전으로 피로한 상체를 위주로 부드러운 마사지를 제공하는 코스입니다.

수동 모드 | 멘탈 마사지

수동 모드

홈 > 수동 모드 > 마사지 범위 선택 > 마사지 방식 선택 > 세부 설정 단계 선택 > 에어 위치 및 강도 0-5단계 선택 > [확인 버튼] > 마사지 시작

마사지 범위	[전체] [목/어깨] [등/허리] [허리/엉덩이] [종아리/발바닥] [고정] 중 선택하여 받을 수 있습니다.
마사지 방식	[주무름 / 두드림 / 손날두드림 / 복합마사지 / 지압 / 스윙 / 스윙두드림] 중 선택하여 받을 수 있습니다.
마사지 간격	등 마사지부의 마사지볼 간격 넓이를 단계별로 조절할 수 있습니다. ※ [두드림 / 손날두드림 / 지압 / 스윙 / 스윙두드림] 시 해당됩니다.
상하 이동 속도	등 마사지부의 상하 이동 속도를 단계별로 조절할 수 있습니다. 등 각도 / 다리 각도를 추가적으로 조절하면 더욱 효과적으로 마사지를 받을 수 있습니다.
XD 강도	[0-5단계]로 선택하여 받을 수 있습니다.

멘탈 마사지

홈 > 멘탈 마사지 > 모드 선택 후 [확인 버튼] > 음원 선택 후 [확인 버튼] > 체형 검색 및 어깨위 치 조절 > 마사지 시작

마음위로	이미 지나간 일들에 대한 후회로 마음이 우울한 고객을 위한 공감 힐링 마사지 코스입니다.
마음희망	막연한 걱정으로 불안, 초조함을 느끼는 고객을 위한 공감 힐링 마사지 코스입니다.
자존감	스스로 작아보이고 답답할 때 마음을 위로해주고 자존감 회복에 도움을 주는 코스입니다.
감사	일상의 소중한 것들을 되새겨 보면서 기분을 전환시키는데 도움을 주는 코스입니다.
용서	나 자신을 위한 적극적인 용서를 제안하며 음악을 통해 위로하는 코스입니다.
트라우마	과거 기억의 괴로움을 겪는 분들에게 마음의 안정을 선사하는 코스입니다.
사랑	마사지와 마음의 여유를 통해 현재의 나를 사랑하는 방법을 제안하는 코스입니다.
열정	내 마음속에 존재하던 그릿을 마사지와 함께 느껴볼 수 있도록 제안하는 코스입니다.

XD PRO 모듈 설명

바디프랜드만의 독보적인 신개념 XD 마사지 시스템

1. 넓고, 깊은 XD 마사지

- XD 모듈의 긴 회전축을 이용하여 넓은 부위의 주무를 마사지를 제공합니다.
- 마사지볼이 X자를 그리며 섬세하고 깊이감 있는 마사지를 제공합니다.

2. 인체 공학적인 XD의 마사지 각도

- 마사지 방식에 따른 각도를 조절하여 신체 부위별 마사지를 제공합니다.
- 큰 근육에는 강력하게, 작은 근육에는 부드러운 마사지를 제공합니다.
- 실제 사람의 손으로 받는 것과 유사한 각도의 마사지를 구현합니다.

XD PRO


사용자 체형 분석을 통한 맞춤형 마사지 시스템

1. 빠르고 정확한 체형 인식

- 마사지 모듈이 체형을 따라 하강하면서 인체의 굴곡과 압력을 센싱하여 정확한 어깨 인식이 가능합니다.
- 마사지 모드 진행 중에도 사용자가 실시간으로 어깨의 위치를 조절할 수 있습니다.

2. 섬세하고 부드러운 마사지감

- 고성능 센서를 사용하여 기존 XD 모듈보다 더욱 섬세하고 정교한 마사지를 제공합니다.
- 정밀한 체형 인식에 통해 다양한 마사지 방식의 구현이 가능합니다.

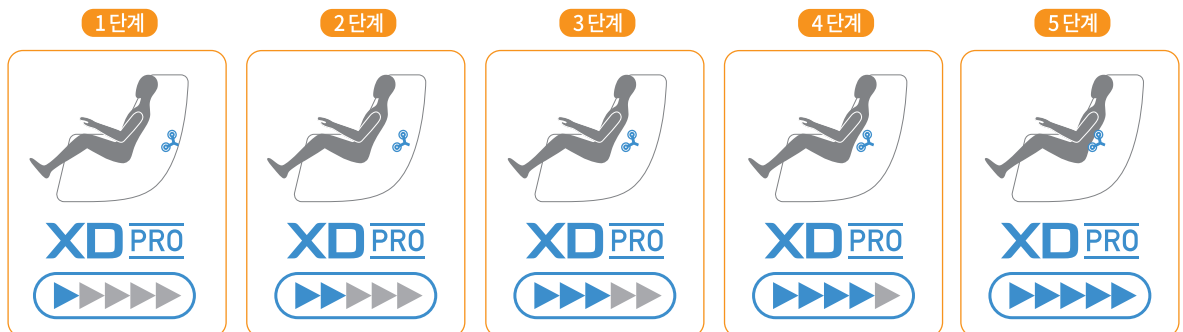

제품 규격 및 사양

본 제품 사양은 성능 향상이나 개선을 위하여 별도의 고지없이 일부 변경될 수 있습니다.

모델명	BFR-8050
주무름	17~23 회/분
주무름 간격	4.5~20 cm
두드림	470~665 회/분
사용 전원	220 V~
정격 소비 전력	170 W
정격 주파수	60 Hz
오토 타이머	10/20/30 분
에어백 범위	어깨/팔/등/골반/허벅지/회음부/종아리/발등/발뒤꿈치
롤링 범위	종아리/발바닥
마사지볼 범위	목 - 엉덩이
제품 무게	145 kg
눅혔을 때(cm)	200(길이) x 85(폭) x 99(높이)
세웠을 때(cm)	163(길이) x 85(폭) x 120(높이)
일반적 명칭	전기마사지기

고장 신고 전 확인사항

제품에 이상이 발생하였을 경우 서비스 센터에 의뢰하기 전 아래 사항을 먼저 확인하여 주세요.

증상	원인	해결방법
메인 전원을 켜는데도 작동이 안 되는 경우	리모컨 또는 내측키 전원 버튼 미실행	전원 버튼을 누르십시오
	프로그램을 선택 안 한 경우	프로그램을 선택 및 실행하십시오
	전원 플러그 접촉 불량	전원 플러그를 콘센트에 정확히 꽂으십시오
	전원 플러그, 전원 케이블 파손	A/S센터에 연락하십시오
	퓨즈가 탄 경우	
	전자 회로 이상	
작동 중 소음이 발생한 경우	일반적인 기계음 발생 - 에어 펌프 진동음, 에어 흡입/토출음 - 에어백 팽창으로 인한 사출 소음 - 솔레노이드 밸브 개폐음 - 시트 마찰음	제품이 정상적으로 작동하는 소리로 고장이 아닙니다
	오랜 시간 사용한 경우	다시 시작하십시오 (30분 후)
	오랜 시간 사용으로 인한 마모	A/S 센터에 연락하십시오
작동 중 동작이 갑자기 멈춘 경우	갑작스러운 전원 공급 차단	전원을 다시 실행하십시오
	작동 시간 종료	다시 시작하십시오 (30분 후)
각도 변경 중 갑자기 멈춘 경우	끼임 감지 센서 및 장애물 여부 확인	장애물을 제거하고 재실행합니다
	과도한 사용, 무리한 충격	다시 시작하십시오 (30분 후)
작동 중 마사지볼이 내피 천에 걸리거나 튕기는 경우	마사지볼과 시트의 마찰	주무름 동작시 마사지볼로 인한 일반적인 현상으로 고장이 아닙니다
원위치로 복귀가 안 될 경우	과도하게 작동시킨 경우	A/S 센터에 연락하십시오
리모컨 과열	오랜 시간 사용한 경우	다시 시작하십시오 (30분 후)
전원 케이블 과열	과도한 부하	다시 시작하십시오 (30분 후)
	다른 비정상 원인	A/S 센터에 연락하십시오
에어백 작동이 안 되는 경우	에어 연결 호스가 이탈한 경우	A/S 센터에 연락하십시오
	에어 관련 전원 선 끊어짐	

무상 A/S 품목	마사지체어 내부의 마사지부를 운영하는 기계/기구류
	메인보드류, 각종 모터류, 에어펌프류
	내부 전기, 전자 배선 및 에어 호스류
유상 A/S 품목	시트류 고객의 사용 빈도로 인한 변색, 탈색, 찢어짐, 낡음 또는 반려동물에 의해 파손 (천, 인조가죽, 천연가죽으로 구성된 외피, 내피 부분) ※본 제품의 시트는 사용 빈도 및 보관 상태에 따라 수명이 달라질 수 있으며, 손상이 확인되면 구매처로 연락하여 교체 후 사용하시기를 바랍니다.
	리모컨 / 케이블 고객의 사용빈도로 인한 노후 증상, 임의 개봉 또는 떨어뜨림 등으로 발생한 고장, 파손
	기타 고객의 요청사항으로 인한 마사지체어 이동, 고객의 요청사항으로 인한 분해/조립이 필요할 시, 비용이 청구될 수 있습니다.

서비스 기간

- 01 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우,
설치 일로부터 정해진 기간 내에 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 02 공동 이용시설이나 영업용으로 사용 시 별도 단축 적용됩니다.

유상 서비스에 대한 안내

다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 01 제품 내에 물, 음료수, 커피, 기타 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
- 02 제품에 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 03 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 04 바디프랜드 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 05 사용 전압을 잘못 사용하여 고장이 발생하였을 경우
- 06 고객이 제품을 임의 분해하여 파손된 경우
- 07 바디프랜드 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 08 천재지변에 의한 고장이 발생하였을 경우
- 09 사용 설명서 내에 있는 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 10 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 11 고객의 사용빈도나 부주의로 수명이 단축된 소모품
- 12 지속적인 햇빛, 자외선 노출로 인해 외관 사출이 탈색 및 변색된 경우

※단, 소비자 과실이나 사용으로 인한 경우가 아님을 소비자가 증명하거나, 당사의 AS 규정 기준에 적합한 경우 무상 A/S에 준할 수 있습니다.

반품 및 교환 불가 사유

본 제품은 설치하는 전자제품으로 하기와 같은 사유로 반품 및 교환이 불가합니다.

(설치 후 사용 시 제품의 가치가 현저히 하락하여, 새 제품으로의 판매가 불가능)

- 01 개인 변심(색상, 가격 변동 등)으로 인한 교환 및 반품 불가
- 02 제품의 중요한 수리를 요하는 하자가 아닌 경우, 설치 후 교환 및 반품 불가 (A/S로 진행)
- 03 개인차(마사지 강도, 신체 사이즈 등)로 인한 교환 및 반품 불가 (구매 전 제품 테스트 권장)

제품 보증서

- 01 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 02 무상 서비스 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기를 바랍니다.
- 03 본 제품을 개인, 가정용으로만 사용하시기를 바랍니다.
- 04 본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.
- 05 본 보증서는 재발행하지 않습니다.

제품명	전기마사지기			모델명	
제조일자	년	월	일	제조번호	
구입처명				구입처 연락처	
설치일자	년	월	일	무상보증기간	년 월 일

고객란	성 명 :	
	주 소 :	
	연락처 :	

- ※ 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우, 구입일로부터 산정된 보증기간의 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
- ※ 본 제품을 가정용 이외의 용도로 사용할 경우, 보증기간은 단축 적용됩니다.
- ※ 유/무상 서비스 기준은 당사가 규정한 A/S 품목에 준하여 적용됩니다. (고객 서비스 안내 페이지 참고.)
- ※ 마사지체어의 품질보증 기간은 설치일로부터 1년입니다.

 본 사용 설명서를 폐기할 때는 해당 지역의 분리수거 규정에 따라 처분하여 주십시오.




The PHANTOM

제품명 전기 마사지기
모델명 BFR-8050
A/S 연락처 02)3448-8980
매뉴얼번호 240612



모바일 사용설명서

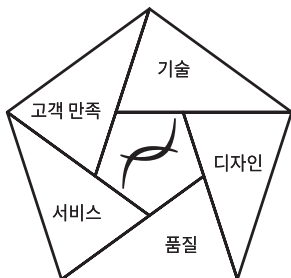

바디프랜드 펜타곤 PENTAGON

완전무결한 오감초격차 전략으로 10년 더 건강하게!

오각형은 가장 완벽하고 안정된 모양으로 완전성을 상징합니다.

바디프랜드는 황금비를 갖춘 오각형(Pentagon)을 기술·디자인·품질·서비스·고객 만족에 이르는 5가지 분야에 적용, 누구도 따라올 수 없을 정도의 격차를 뜻하는 '오감초격차(五感超格差)' 전략으로 건강수명 10년 연장의 꿈을 실현해 가고 있습니다.

집에서 편안하게 마사지를 받으며 측정된 데이터를 바탕으로 맞춤형 건강 서비스를 제공하는 '디지털 헬스케어' 더 나아가 IoT 기술에 기반한 '홈 헬스케어 플랫폼'으로서 성장해 가는 바디프랜드와 함께 건강한 라이프스타일을 즐기시기 바랍니다.