

# DAVINCI

바디프랜드  
마사지체어  
다빈치  
사용 설명서

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \phi \approx 1,61803$$

*Every obstacle is overcome by persistence.  
Leonardo da Vinci*



- ※ 본 설명서의 이미지 및 내용은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- ※ 본 설명서의 업데이트 사항은 뒷 표지에 있는 QR코드를 통해 확인하실 수 있습니다.
- ※ 본 설명서의 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 실제 마사지체어와 다를 수 있습니다.
- ※ 본 설명서의 이미지는 고객의 모델선택에 따라 실제 마사지체어와 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \phi \approx 1,61803$$

# 인사말

바디프랜드 마사지체어 [다빈치]를 구입해 주신 고객님의 깊은 감사드립니다.

사용하시기 전에 사용 설명서를 읽어 보신 후 보다 안전하고 편리한 사용을 하시기 바랍니다.

또한, 본 제품은 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 그럴 경우 본 사용 설명서의 내용 및 이미지와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

※ 제품을 사용하기 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하기 바랍니다.

※ 본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 본 제품의 이미지 및 사양은 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 제품 특징



이탈디자인  
클래버레이션



XD PRO



멘탈 마사지




명상 마사지



체성분 측정



손 지압부  
퀵 버튼

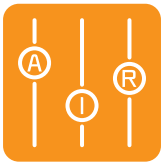

부위별 에어 조절



헬스케어 마사지



3STEP  
발바닥 롤링



3STEP  
무중력 각도 조절



8.7인치  
태블릿 리모컨



게임 감지 센서



4ch 블루투스  
스피커



내측키 컨트롤



온열 히팅

### 체성분 마사지

체성분을 측정하고 분석 결과에 따른 맞춤 마사지를 제공합니다.

### 단계별 무중력 각도 조절

무중력 상태와 비슷한 자세로 3단계 각도 조절이 되는 기능으로 마사지를 받는 최적의 자세로 만들어줍니다.

### 인체 공학적 입체 프레임

S자 프레임과 L자 프레임으로 사용자의 몸에 꼭 맞는 롤링 마사지가 가능합니다.

---

# 목차

	제품 특징	02
사용 전 안내 사항	안전을 위한 주의 사항	04
	제품 각 부분 명칭	14
	이동 및 설치   제품 연결 방법	15
리모컨 설명	태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명	16
기능 설명	XD PRO 모듈 설명	30
제품 사양	제품 규격 및 사양	31
	고장 신고 전 확인 사항	32
고장 진단 및 조치	마사지체어 고객 서비스 안내	33
	태블릿 고객 서비스 안내	34
제품 보증서	제품 보증서	35

## 안전을 위한 주의 사항

※ 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

※ 안전과 관련된 주의 사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



### 경고

화상, 화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이기 위해



### 주의

부상의 위험을 방지하기 위해

## 태블릿 리모컨 주의 사항



### 경고

**화재, 폭발로 인한 사고 발생 및 제품이 파손되거나 인체에 상해를 입을 수 있습니다.**

- 제품에 자석이 내장되어 있습니다. 신용카드 및 의료기기 등 자석에 의해 영향을 받을 수 있는 물건은 안전한 거리를 유지하고 사용 바랍니다. 심장박동기, 제세동기와 같은 의료기기를 사용 중인 경우 의사와 상담한 후 사용하시기 바랍니다.
- 제품이나 배터리에 충격을 주거나 훼손하지 마십시오.
- 삼성전자에서 승인한 배터리, 충전기와 제품 전용 케이블만 사용하시기 바랍니다. (반드시 KC인증을 받은 충전기를 사용 바랍니다.)
- 충전기 연결부나 배터리 연결단자에 금속, 액체, 먼지 등과 같은 이물질이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 유리, 아크릴 등 제품이 파손되거나 연기나 타는 냄새가 발생하면 즉시 사용을 중단하고 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용 바랍니다.
- 배터리를 노출한 상태로 사용하지 마십시오.
- 배터리를 분해하거나 재사용하지 마십시오.
- 유아나 반려동물이 제품을 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 이 제품의 적정 사용 온도는 0~35 °C이며, 적정 보관 온도는 -20~50 °C입니다. 적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서는 제품이 손상되거나 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
- 제품을 고온의 환경이나 화기 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 오랜 시간 화면 일부 또는 전체에 고정된 화면을 사용하지 마십시오. 고정된 화면을 사용하면 잔상(화면 열화) 또는 얼룩 현상이 발생할 수 있습니다.

## 사용 전 주의 사항



### 경고


목욕탕이나 습기가 많은 곳을 피하여 설치 및 사용하시기 바랍니다.

감전, 화재, 변형, 곰팡이, 고장 등의 원인이 됩니다.



먼지가 많거나 녹이 슬 수 있는 장소를 피하여 설치 및 사용하시기 바랍니다.

감전, 화재, 변형, 곰팡이, 고장 등의 원인이 됩니다.

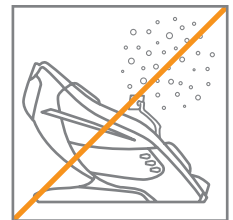


# 안전을 위한 주의 사항

## 사용 전 주의 사항

### ⚠ 경고


직사광선 아래 또는 실내 온도가 40°C를 초과하는 환경에서는 사용하지 마십시오.

화재, 고장의 원인이 됩니다.

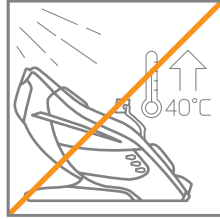


실외에 설치하지 마십시오.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

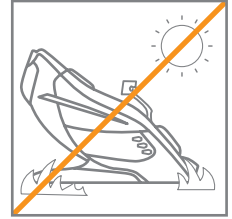

난방 기구 근처나 열 발생 장치 등의 근처에서 사용하지 마십시오.

제품 손상, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

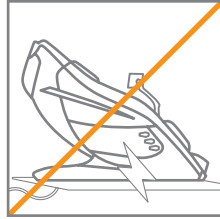


바닥이 평평하고 안정된 장소에 설치 및 사용하기 바랍니다.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.




사용하기 적당한 공간과 환기가 잘 되는 곳에 설치하시기 바랍니다.

변형, 곰팡이, 고장 등의 원인이 됩니다.

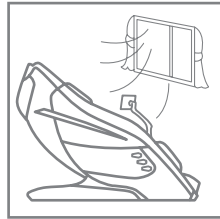


제품을 임의로 분해하여 사용하지 마십시오.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

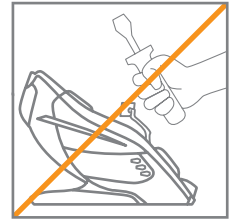


다른 전기제품 또는 의료제품과의 혼용을 자제하여 주시기 바랍니다.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

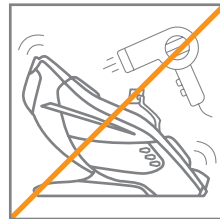


제품에 이물질을 쏟거나 뿌리지 마십시오.

변형, 제품 손상, 안전사고, 부상 등의 원인이 됩니다.

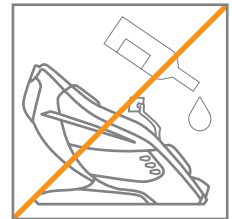


본 제품 위에 무게가 많이 나가는 제품을 올려놓지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

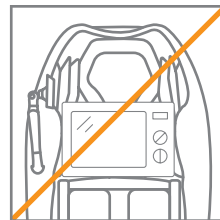

유아나 반려동물 등이 본 제품의 하단부, 후면부, 다리 조정부 등으로 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

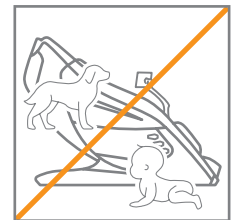


# 안전을 위한 주의 사항

## 사용 전 주의 사항

### ⚠ 주의

기술자의 도움 없이 기기를  
설치하거나 수리하지 마십시오.

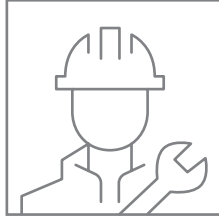


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.

본 제품은 설명서에 기재된 용도  
이외에 사용하지 마십시오.




안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.

제품을 전원 케이블로  
운반하거나, 손으로 케이블을  
잡아당기지 마십시오.

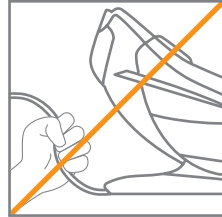


감전, 화재, 고장 등의 원인이  
됩니다.

감전의 위험을 피하기 위해  
본 제품을 보호 접지된 전원  
콘센트에만 연결하십시오.

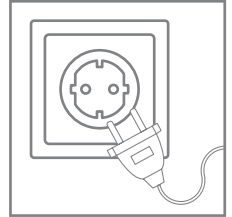


감전, 상해의 원인이 됩니다.

사용하기 전에 제품의 전원  
상태를 확인하시기 바랍니다.

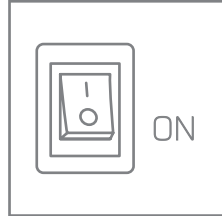


제품의 올바른 사용이 가능 합니다.

전원은 교류 220 V 전용  
콘센트를 사용하십시오.

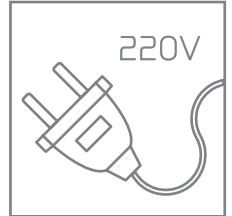


고장 또는 누전 시 감전의 원인이  
됩니다.

본 제품을 전원 분리가 어려운  
곳에 설치하지 마십시오.

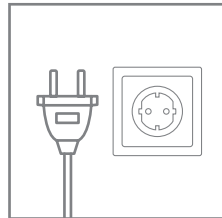


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 분리할 때  
케이블을 잡아당기지 말고  
반드시 전원 플러그를 잡고  
빼십시오.

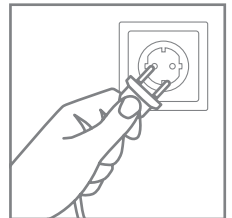


감전, 화재, 고장 등의 원인이  
됩니다.

제품의 안전 센서 동작 상태와  
제품 복귀 전 유아나 반려동물이  
근처에 있는지 확인한 후  
사용하십시오.

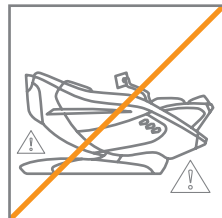

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.

청바지 등의 짙은 색상 옷을  
입고 사용 시, 제품 시트에  
이염이 될 가능성이 있으니  
주의하시기 바랍니다.

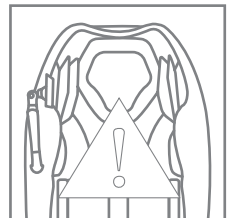

시트 이염의 원인이 됩니다.


# 안전을 위한 주의 사항

## 사용 시 주의 사항

### ⚠ 경고


제품의 조작 방법 및 발생 가능한 부작용 사례를 확인하시기 바랍니다.

제품의 올바른 사용이 가능 합니다.

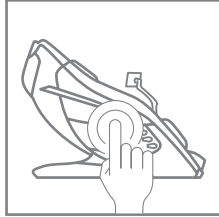


전원 플러그를 꽂거나 뺄 때 젖은 손은 감전의 위험이 있습니다.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

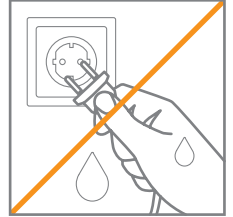

사용자의 몸이 젖은 상태에서 제품을 사용하지 마십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

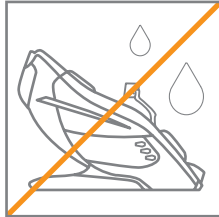


과도한 식사 후 바로 사용하지 마십시오.

부상의 원인이 됩니다.




사용 중 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

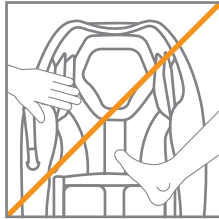


신체의 특정 부분을 집중적으로 사용 시 몸에 무리가 올 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

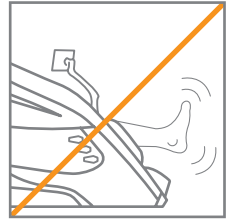


제품을 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하시기 바랍니다.

고장 또는 누전 시 감전의 원인이 됩니다.

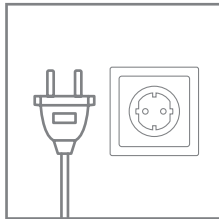


유아나 어린이의 사용을 자제하여 주시기 바랍니다.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

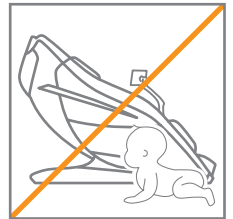

머리, 팔꿈치, 가슴, 배, 무릎 등의 부위에 사용하지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

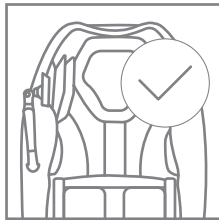

마사지볼이 작동하는 동안 올바른 위치에서 작동될 수 있도록 조작해 주시기 바랍니다.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.






# 안전을 위한 주의 사항

## 사용 시 주의 사항

### ⚠ 경고

사용 중 제품에서 내려오실 때는  
제품의 각도가 완전히 복귀된 후  
내리시기 바랍니다.

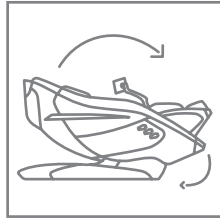


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.

사용 중 통증이나 고통이 심할  
시에는 즉시 사용을 멈추고,  
사용자의 건강 상황에 맞는 후속  
조치를 취해 주시기 바랍니다.




부상 등의 원인이 됩니다.

연속적으로 사용 시에는  
몸에 무리가 갈 수도 있으니,  
사용자의 건강 상태에 맞추어  
선택하시기 바랍니다.

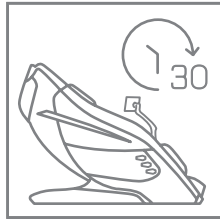


부상의 원인이 됩니다.

제품이 작동할 때는 어린이나  
반려동물이 주변에서 놀지  
않도록 주의하십시오.

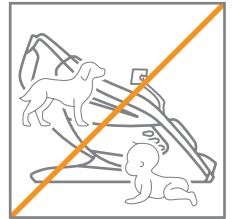


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.

에어로졸(스프레이) 제품을  
사용하거나 산소를 사용하는  
곳에서는 작동시키지 마십시오.

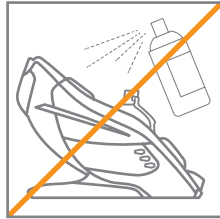


제품 손상, 화재, 폭발, 고장의  
원인이 됩니다.

장신구를 착용한 상태에서  
사용하지 마십시오.

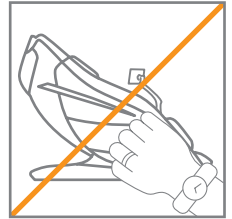

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상,  
고장 등의 원인이 됩니다.

사용 중 긴머리가 끼이지 않도록  
주의하십시오.

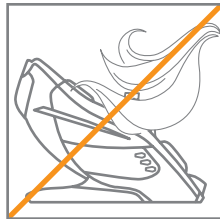


안전사고, 부상의 원인이 됩니다.

제품에 물건을 떨어뜨리거나 빈  
공간에 물건을 집어넣지 않도록  
주의하십시오.



안전사고, 부상, 제품 손상, 화재,  
고장 등의 원인이 됩니다.

본 제품에 손상된 케이블, 플러그가  
있거나 혹은 제대로 작동하지  
않거나 물에 빠진 경우에는 작동  
시키지 마시고 검사 및 수리를 위해  
서비스 센터에 연락하십시오.

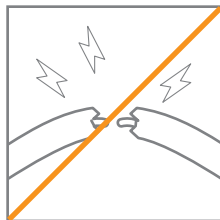

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

온열 기능 사용 시, 화상에  
주의하십시오.



저온화상 등의 원인이 됩니다.




# 안전을 위한 주의 사항

## 사용 시 주의 사항

### ⚠ 경고

바른 자세로 착석한 후 제품을  
사용하시기 바랍니다.

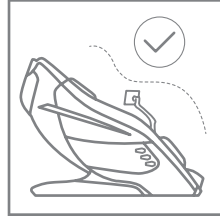

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상,  
고장 등의 원인이 됩니다.


제품의 커버가 찢어지거나  
벗겨진 상태에서 사용하지  
마십시오.



안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.


### ⚠ 주의

한 번에 두 사람 이상이  
사용하지 않도록 하십시오.

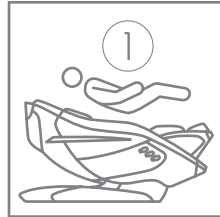

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.

주변의 온도가 급격하게  
변화되는 곳에서는 사용을  
자제하여 주시기 바랍니다.

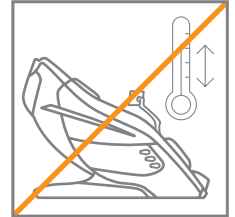

부상, 상해의 원인이 됩니다.

120 kg 이상 하중을 가하지  
않도록 주의하시기 바랍니다.



안전사고, 변형, 소음, 가죽 마모,  
고장 등의 원인이 됩니다.

신장이 150 cm 이하이거나  
190 cm 이상인 사람은  
마사지감이 다를 수 있습니다.



마사지부의 밀착 부족, 통증, 부상  
등의 원인이 됩니다.

제품 위에 서 있지 마십시오.  
앉은 상태에서만 사용하시기  
바랍니다.



안전사고, 부상, 상해, 제품 손상,  
고장 등의 원인이 됩니다.

마사지 받은 후에 잠이 드셨을  
때는 저체온을 주의하시기  
바랍니다.



안전사고, 부상 등의 원인이 됩니다.


# 안전을 위한 주의 사항

## 사용 시 주의 사항

### ⚠ 주의

제품의 케이블이 손상되거나  
과도하게 구부러지지 않도록  
주의하십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이  
됩니다.

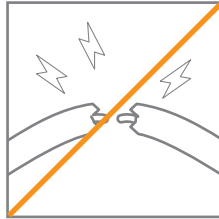


제품의 안전한 사용을 위해 낮은  
강도의 마사지부터 시작하시기  
바랍니다.

부상의 원인이 됩니다.



제품의 다리 마사지부를 손으로  
들지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.

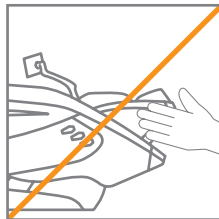


제품 후면부에 기대거나  
매달리지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.




반려동물이 전원 케이블을 물지  
않도록 주의하십시오.

감전, 제품 손상, 고장 등의 원인이  
됩니다.

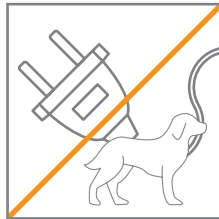


제품이 리클라이닝 될 때 다리  
마사지부 위에 서있지 않도록  
주의하십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.

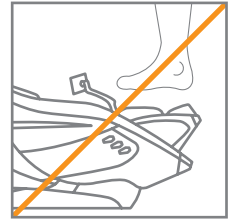


전원 플러그를 콘센트에 꽂기  
전에 전원 스위치가 꺼짐으로  
되어 있는지 확인하시기  
바랍니다.

감전, 제품 손상, 고장 등의 원인이  
됩니다.

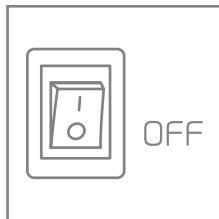


제품 후면부, 팔 마사지부,  
다리 마사지부 위에 걸터앉지  
마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.

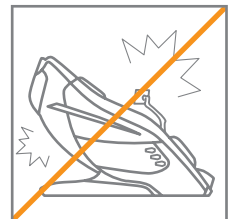


블루투스 스피커를 이용 시 너무  
큰 볼륨으로 장시간 사용하지  
마십시오. (\*일부 제품 해당)

청력 손상의 원인이 됩니다.

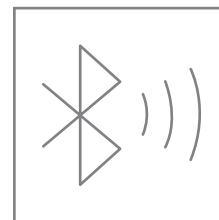

태블릿 거치대를 손으로  
잡고 일어나지 마십시오.  
(\*일부 제품 해당)

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장  
등의 원인이 됩니다.

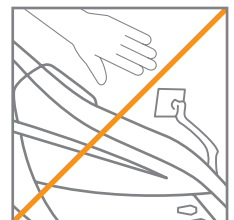


# 안전을 위한 주의 사항

## 사용 시 주의 사항

### ⚠ 주의

제품을 물세척하지 마십시오.

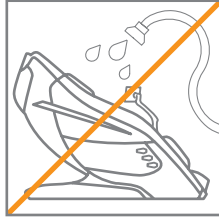


감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품을 청소하거나 손질할 때는 전원 플러그를 뽑고 진행하시기 바랍니다.



안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품을 청소할 때 부드러운 천으로 가볍게 닦아주고, 신나 등의 유기용제나 화공약품 등을 사용하지 마십시오.

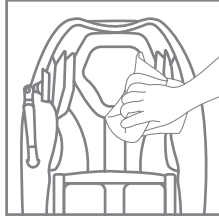


제품 손상의 원인이 됩니다.

천연가죽 시트는 반드시 가죽 전용 클리너로 닦으시기 바랍니다. (\*일부 제품 해당)



제품 손상의 원인이 됩니다.

USB 충전 단자를 사용하여 충전 시, 차폐 케이블을 사용하여 주시기 바랍니다. (\*일부 제품 해당)

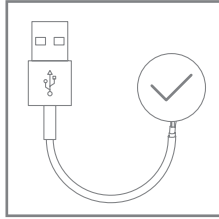

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

※ 차폐 케이블은 외부에서 유입되는 노이즈와 내부에서 발생하는 노이즈를 억제하기 위해 전선에 알루미늄 호일을 감싸거나 구리나 스틸을 그물망 형태로 촘촘하게 엮어 보호한 케이블을 의미합니다.

---

# 안전을 위한 주의 사항

## 사용 시 주의 사항

---

### 금기 사항

---

#### • 마사지체어를 사용하면 안되는 고객

- 혈전증(thrombosis)과 색전증(embolism), 중증 하지 정맥류 등 의사로부터 사용이 부적절하다고 진단받은 자
- 임신 초기인 자(1기, 초기 3개월)
- 심장, 신장 및 간에 중증 질환이 있는 자
- 조현병 또는 다른 정신 질환이 있는 자
- 조절되지 않는 뇌전증 또는 뇌질환이 있는 자
- 혼자 거동이 불가능한 자

#### • 마사지체어 사용 시 전문의 진단이 필요한 고객

- 임신 초기를 제외한 임신부 중 제품의 사용으로 인해 부작용이 우려되는 자
- 정상보다 체온이 높으면서 오한, 발열 등 급성염증 증상을 동반한 자
- 중증 피부 질환 (욕창, 화상) 등이 있는 자
- 악성 종양 등이 있는 자
- 고령, 급격한 체중 감소 혹은 기타 질환으로 근감소가 있는 자
- 의사의 진료 및 치료를 받고 있어 안정을 필요로 하는 자
- 급성 디스크 및 급성 경추염좌 (cervical sprain)진단을 받은 자
- 중증의 골다공증이 있는 자
- 이식형 심장박동기 등 인체 이식형 전자의료기기를 사용하고 있는 자
- 의사표현이 자유롭지 못한 자
- 거동이 불편한 자
- 기타 몸의 이상을 느끼고 있는 자

---

### 온열 기능 사용 시 주의 사항

---

- 장시간 사용 시, 피부에 저온화상 등 위험이 있을 수 있으니 연속으로 사용하지 마십시오.
- 온열이 작동되는 부위에는 맨살이 닿지 않게 해주세요.
- 피부가 약한 아이들이나 노인, 환자들은 보호자의 보호가 필요하며 더욱더 주의하여 사용하시기 바랍니다.
- 온열 기능을 켜놓은 상태에서 잠들지 마십시오.

---

### 제품 사용 시 발생 가능한 부작용 사례

---

#### • 제품 사용 중에 다음과 같은 부작용이 발생할 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.

- 제품에 의한 찰과상, 타박상(좌상) 등
- 알레르기 증상 및 화상 등
- 제품의 과도한 사용 및 압력으로 인한 근육 및 힘줄 손상 등
- 노인성 척추골절 및 염좌 등

# 안전을 위한 주의 사항

## 체성분 측정 시 주의 사항

※ 체성분 검사는 일반적인 건강 상태 유지 또는 개선을 목적으로 하는 일상적 건강관리용(웰니스) 검사로 식약처에서 구분하고 있으며, 의료기기가 아닙니다.

### ⚠ 경고

- 다음과 같은 의료용 전자기기와 절대로 함께 사용하지 마십시오.  
이러한 의료용 전자기기를 오작동 시킬 우려가 있으며, 생명에 현저한 장애를 야기할 위험이 있습니다.
- 페이스메이커 등의 체내 삽입형 의료용 전자기기
- 인공심폐 등의 생명유지용 의료용 전자기기
- 심전계 등의 휴대형 의료용 전자기기
- 임산부가 사용할 경우 담당 의사 또는 전문가와 상담 후에 사용하십시오.
- 본 제품은 의료기기가 아니므로 질병의 유무를 판단할 수 없으며, 질병의 유무를 판단하기 위해서는 의사의 검진이 필요합니다.
- 체중 감량이나 운동, 식이요법을 실시할 경우에는 자가 진단을 하지 말고 반드시 의사나 전문가의 지시를 받아주십시오.

### ⚠ 주의

- 단주파수를 사용하거나 Microwave를 사용하는 치료기 또는 의료기기가 1m 이내에 존재하는 곳에 설치하지 마십시오.
- 고주파 치료기를 연결하여 사용하지 마십시오.
- 측정 도중 측정자의 신체가 다른 사람이나 금속 등의 도전체에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 전극에 인체가 아닌 다른 물체를 연결하고 측정하지 마십시오.
- 오염성 질병이나 감염될 수 있는 질병이 있는 분은 가급적 제품을 접촉하거나 사용하지 마십시오.
- 사용 후에는 부드러운 천으로 닦아줍니다.
- 음식을 찌꺼기나 음료수와 같은 액체가 제품에 들어가지 않도록 주의하십시오.

## 무선 충전 시 주의 사항

※ 무선 충전 기능은 충전 패드가 탑재된 제품에 한해서 적용됩니다. (탑재 제품 모델명 : BFB-8210)



- 무선 충전 기능을 지원하는 모바일 기기의 중앙부를 마사지체어 우측 팔 마사지부에 있는 충전 패드에 맞춰 올립니다.  
충전부에 제대로 맞추지 않을 경우 충전 속도가 느려지거나 충전이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 모바일 기기에 두꺼운 재질의 커버를 장착하고 사용할 경우 제대로 충전되지 않을 수 있으니 커버를 분리한 후 사용하십시오.
- 제품의 상태나 주변 온도 및 환경에 따라 충전 효율이나 속도가 달라질 수 있습니다.
- 무선 충전 중에 모바일 기기에 유선 충전기를 연결할 경우 무선 충전 기능이 지원되지 않습니다.
- 모바일 기기 뒷면과 커버 사이에 신용카드, 교통카드, 도어록 카드, 음식물 쓰레기 종량제 카드 등을 넣은 상태로 제품에 올리지 마십시오.
- 자성을 이용한 제품은 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속류를 제품 위에 올려놓지 마십시오.
- 제품이 변형되거나 고장날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.
- 제품에서 발열이 심할 경우 애플리케이션이나 제품 사용을 잠시 중단하십시오.
- 제품에서 열이 발생한 상태로 피부와 오랜 시간 접촉하게 될 경우 붉은 반점, 색소침착 등 저온화상의 우려가 있습니다.

# 제품 각 부분 명칭

## 박스 개봉

본 제품은 4개의 박스로 구성되어 있습니다. 구성품을 잘 확인하시길 바랍니다.

- 본체 박스 : 제품 본체, 등/엉덩이 시트, 머리 시트, 액세서리 박스 (전원 케이블, 태블릿 거치대, 매뉴얼)
- 팔 마사지부
- 다리 마사지부
- 태블릿 박스 : 태블릿 리모컨

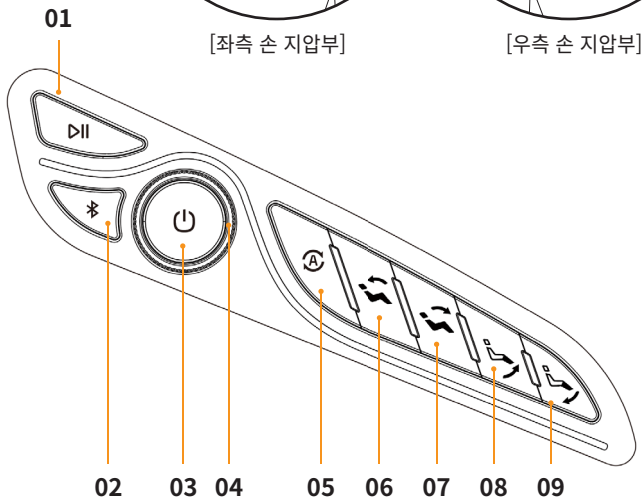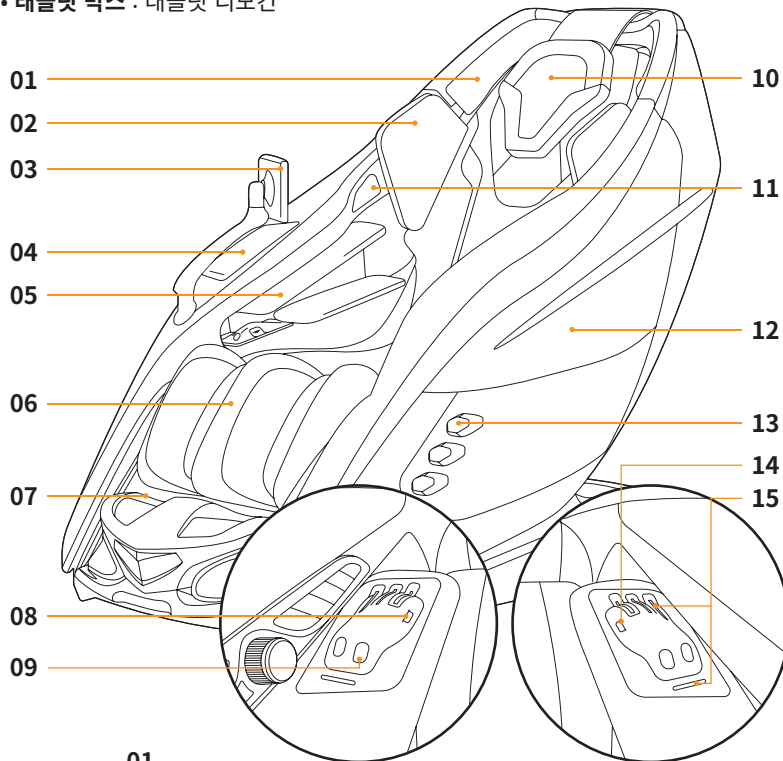

## 외부구성

- 01 리어 스피커
- 02 어깨 마사지부
- 03 태블릿 리모컨
- 04 트레이 / 무선 충전 패드  
※ 무선 충전 기능은 충전 패드가 탑재된 제품에 한해서 적용됩니다.  
(모델명 : BFB-8210)
- 05 팔 마사지부
- 06 다리 마사지부
- 07 발 체성분 단자
- 08 좌측 손 지압부 버튼  
※ 무중력 1-3단계 조절  
※ 3초 이상 누를 시 원위치로 이동  
※ 무중력 각도 실행 중에 손 지압부 버튼이나 내측키를 누르면 각도 조정이 정지됩니다.
- 09 손 체성분 단자
- 10 머리 시트
- 11 프런트 스피커
- 12 사이드 패널
- 13 LED 조명
- 14 우측 손 지압부 버튼  
※ 마사지 재생/일시정지  
※ 3초 이상 누를 시 전원 ON/OFF
- 15 손 지압부 LED


## 내측키

- 01 마사지 재생/일시정지
- 02 블루투스 ON/OFF  
※ 별도 모바일 기기 연결 시
- 03 전원 ON/OFF
- 04 볼륨 조절 (다이얼)
- 05 자동 모드  
※ 목/어깨 > 등/척추 > 하체 스트레칭
- 06 전신 각도 눕힘
- 07 전신 각도 세움
- 08 다리 각도 올림
- 09 다리 각도 내림

## 제품 연결 방법 | 이동 및 설치

### 전원 연결하기


전원 케이블을 제품 후면 하단에 있는 전원 연결단자의 홈에 맞춰 연결합니다.  
마사지체어의 전원을 켜고, 태블릿 리모컨 전원을 켜 실행시킵니다.

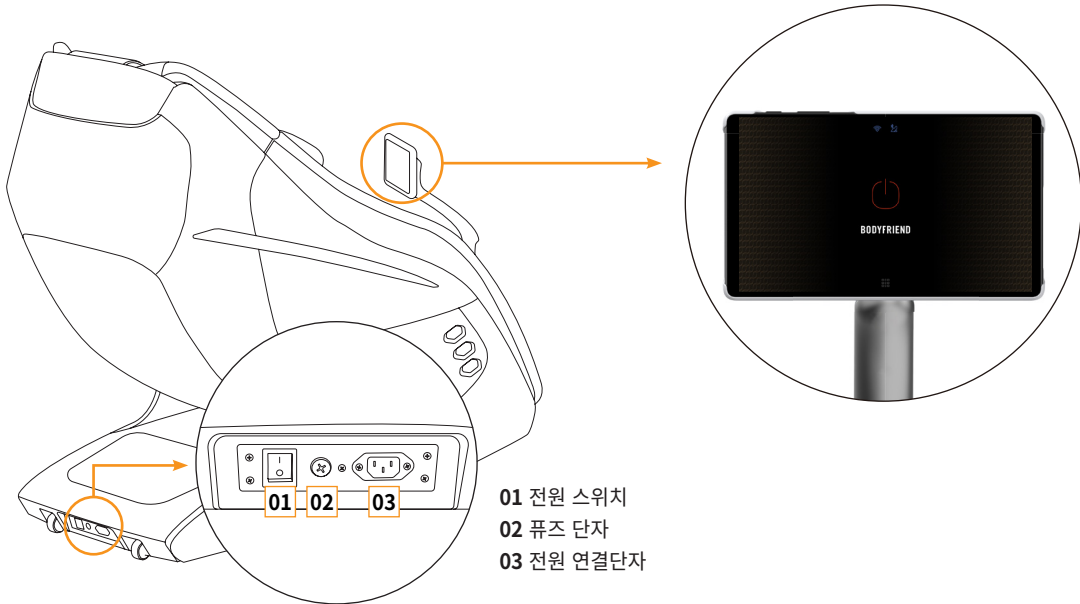

### 이동 방법 및 설치 공간 확인하기

- 제품을 설치하기 전에 충분한 공간이 있는지 확인합니다.
- 제품 주변에 장애물이나 부속물이 없도록 하십시오.
- 제품 머리 후면부가 유리창을 향하지 않도록 설치하십시오.
- 제품을 뒤로 눕혀서 이동하기 편리한 각도로 만들어 원하는 곳으로 이동 후, 천천히 앞으로 내려 설치합니다.
- 설치할 때 제품 밑으로 케이블 선이 깔리지 않도록 주의하시기 바랍니다.

※ 제품 무게로 바닥에 흡집 및 이염이 생길 수 있으니 주의하시기를 바랍니다.  
※ 제품 이동 시, 반드시 2인 이상 함께 움직이십시오.

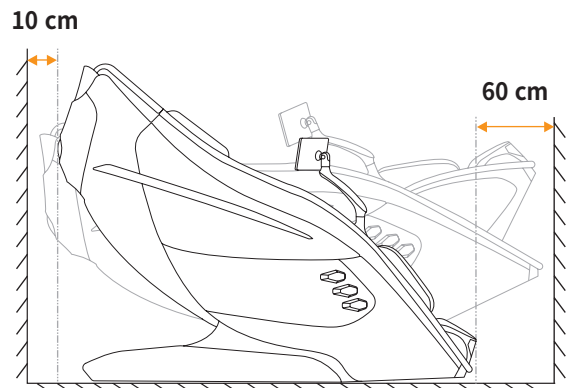



# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명

## 시작하기


01 태블릿 리모컨을 사용하기 위해서는 마사지체어와 블루투스 연결이 필요합니다.

02 마사지체어와 태블릿의 전원이 켜져 있으면 블루투스가 자동으로 연결됩니다.

(자동으로 연결이 안 될 경우 아래의 [수동 연결 방법]을 확인하시기를 바랍니다.)

03 블루투스를 연결한 후 안내에 따라 계정을 등록하십시오.

※ 게스트로 시작할 경우 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.

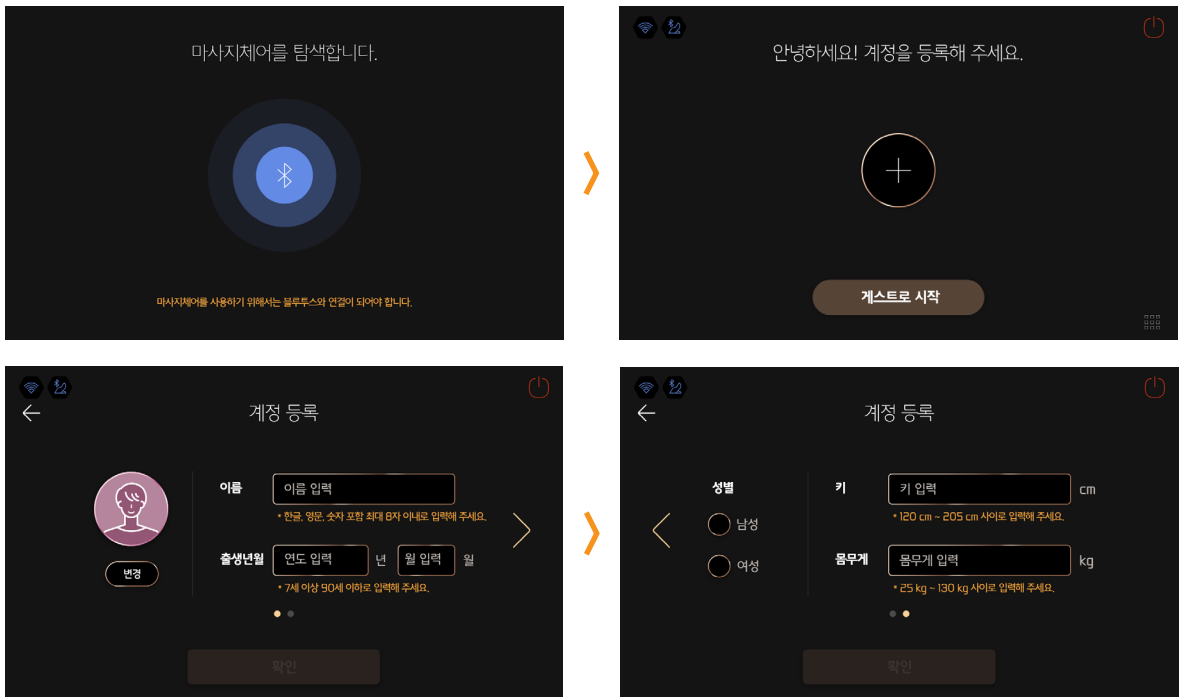

## [수동 연결 방법]

01 블루투스가 자동으로 연결되지 않을 경우, 아래와 같이 수동으로 연결하시기를 바랍니다.


02 화면 상단에 있는 블루투스 아이콘을 눌러 목록에서 연결하고자 하는 마사지체어를 선택하여 연결합니다.

※ 목록에서 연결하고자 하는 마사지체어가 보이지 않을 경우, 마사지체어의 전원이 켜져 있는지 확인하시거나 전원 스위치를 껐다가 다시 켭니다.



# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명

## 홈 화면 구성

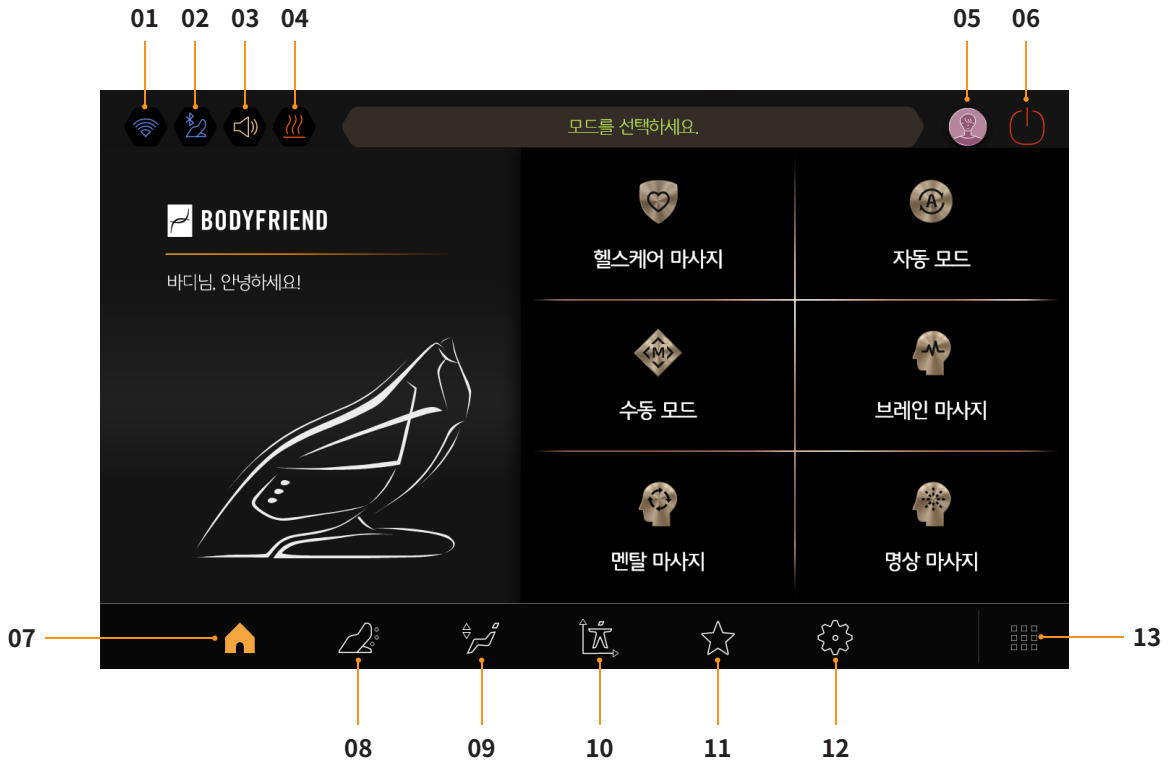

- 01 Wi-Fi 기기 목록** : 연결이 가능한 Wi-Fi 기기 목록을 표시합니다.
- 02 블루투스 목록** : 연결이 가능한 마사지체어 블루투스 목록을 표시합니다.
- 03 볼륨 조절** : 마사지체어 볼륨을 단계별로 조절할 수 있습니다.
- 04 온열 설정** : 온열 시간은 30분이며, [온열볼, 허리, 손바닥, 종아리/발]의 온열을 설정할 수 있습니다.
- 05 사용자 계정** : 사용자 계정 관리 화면으로 이동합니다.
- 06 전원** : 마사지체어의 전원을 켜고 끕니다.
- 07 홈** : 홈 화면으로 이동합니다.
- 08 마사지 재생 화면** : 현재 재생 중인 마사지 화면으로 이동합니다.
- 09 마사지체어 제어 화면** : 마사지체어의 전신 각도, 다리 각도, 다리 길이를 수동으로 조절할 수 있습니다.
- 10 체성분 마사지** : 체성분 마사지 프로그램으로 빠른 이동이 가능합니다.
- 11 선호 모드** : 선호 모드 목록으로 이동합니다.
- 12 설정** : 설정 화면으로 이동합니다.
- 13 앱스(앱서랍)** : 앱스(앱서랍)는 태블릿 리모컨의 기존 앱과 새로 설치하는 모든 앱을 실행할 수 있는 화면입니다.  
일반 태블릿처럼 게임이나 동영상, 음악 등을 즐기면서 마사지를 받을 수 있습니다.

# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명

## 마사지 재생 화면 구성

※ 자동 프로그램 재생 중에는 일부 화면 구성이 다를 수 있습니다.



**01 마사지 모드 표시 :** 현재 재생 중인 마사지 모드를 표시합니다.

**02 마사지 시간 :** 현재 남은 마사지 시간을 표시합니다. 팝업창에서 원하는 마사지 시간을 선택할 수 있습니다.

※ 일부 자동 프로그램은 마사지 시간이 고정되어 있어 조절이 불가능합니다.

**03 마사지 일시정지 :** 현재 재생 중인 마사지를 일시정지하는 버튼입니다.

**04 마사지 종료 :** 현재 재생 중인 마사지를 종료하는 버튼입니다.

**05 롤링 속도 :** 종아리/발바닥의 롤링 속도를 단계별로 조절할 수 있습니다.

**06 마사지 속도 :** 버튼을 누른 상태에서 위아래로 움직여 마사지 속도를 단계별로 조절합니다.

**07 마사지 방식 :** 원하는 마사지 방식을 선택할 수 있습니다.

**08 마사지 간격 :** 등 마사지부의 마사지볼 간격 넓이를 조절할 수 있습니다.

**09 마사지 부위 :** 원하는 마사지 부위를 선택할 수 있습니다.

**10 LED 테라피 :** LED 테라피를 ON/OFF 할 수 있습니다.

**11 에어 강도 :** 에어 마사지의 위치 및 강도를 단계별로 조절할 수 있습니다.

**12 XD 강도 :** 버튼을 누른 상태에서 위아래로 움직여 마사지볼의 돌출 정도를 사용자의 체형에 맞게 단계별로 조절합니다.

**13 마사지 위치 :** 위아래 화살표 버튼으로 마사지 위치를 조절할 수 있습니다.



**14 자동 원위치 :** 마사지 종료 시 마사지체어가 초기 상태로 자동 복귀되는 기능입니다.

OFF 시, 마사지 종료 후 각도를 유지합니다.

# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명

## 헬스케어 마사지

홈 > 헬스케어 마사지 > 원하는 모드 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

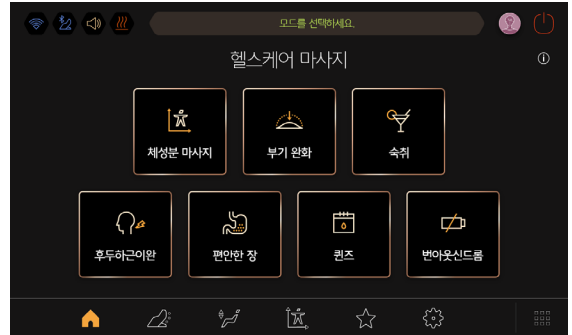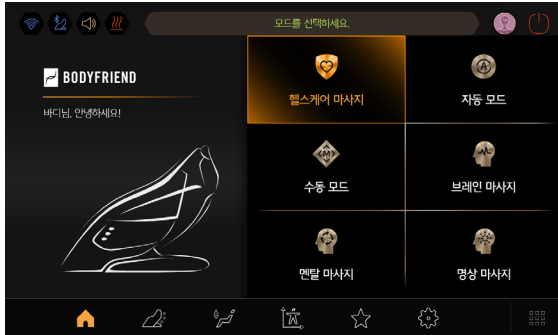


체성분 마사지	체성분을 측정 및 분석하여 맞춤형 마사지를 추천해주는 코스입니다.
부기 완화	전신 에어백을 이용하여 부기 완화에 도움을 주는 순환 코스입니다.
숙취	숙취해소 등에 도움이 되는 주요 자극점을 마사지하는 코스입니다.
후두하근이완	후두골과 목 뒤에 붙어 있는 4개의 근육들을 집중적으로 이완시키는 정밀 마사지 코스입니다.
편안한 장	장에 유익한 자극점과 엉덩이 주변부를 마사지하는 코스입니다.
퀵즈	엉덩이와 허리를 위주로 주물러주는 여성에게 특화된 마사지 코스입니다.
변아웃신드롬	스트레스로 인한 무기력증 극복을 위해 편안한 마사지와 힐링 음악이 함께 제공되는 코스입니다.

# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명


## 체성분 마사지 - 체성분 측정 방법

01 홈 화면 하단에 있는 [체성분 마사지 아이콘]을 선택합니다.  
또는 홈 > 헬스케어 마사지 > 체성분 마사지를 선택합니다.

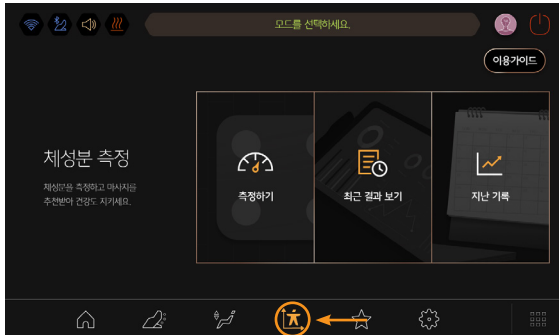


02 [측정하기]를 선택하고 측정에 필요한 정보를 순서대로 입력한 후 [측정 시작]을 누릅니다.

※ 체성분을 측정하기 전에 오른쪽 상단에 있는 [이용 가이드]를 반드시 읽고 정확하게 사용하기 바랍니다.

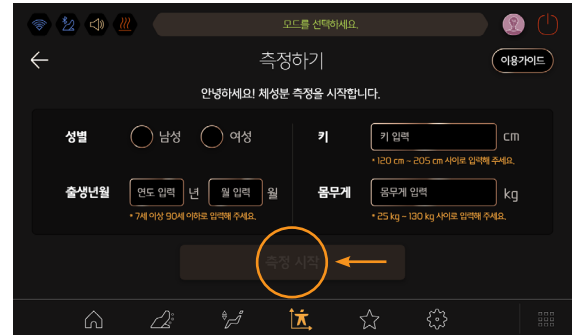


### [올바른 측정 자세]


· 두 발바닥의 중앙을 발 전극에 맞추어 올리고 밀착시킵니다.  
반드시 맨발바닥이 발 전극에 직접 닿아야 합니다.

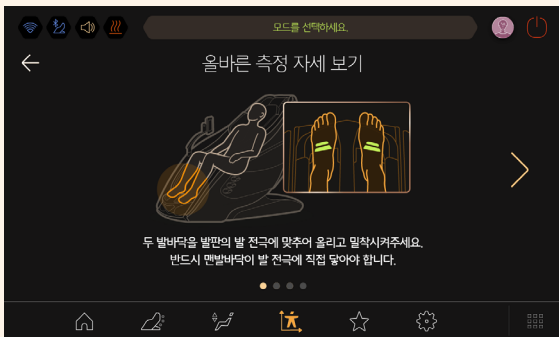


· 두 손을 손 전극 위에 올리고 손바닥이 두 개의 전극 표면에 고르게 닿도록 밀착시킵니다.

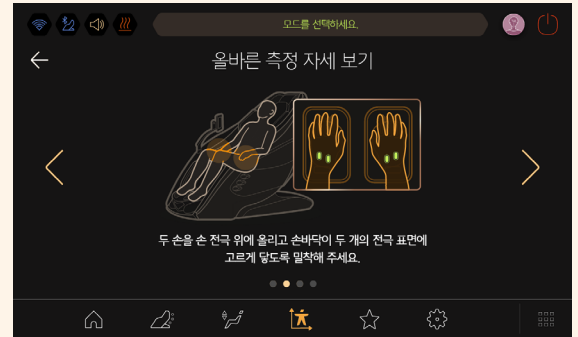

· 왼쪽과 오른쪽 겨드랑이 사이가 닿지 않도록 자세를 유지합니다.

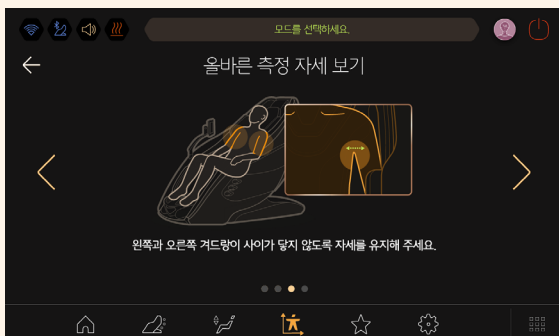


· 양 무릎이 닿지 않도록 자세를 유지합니다.

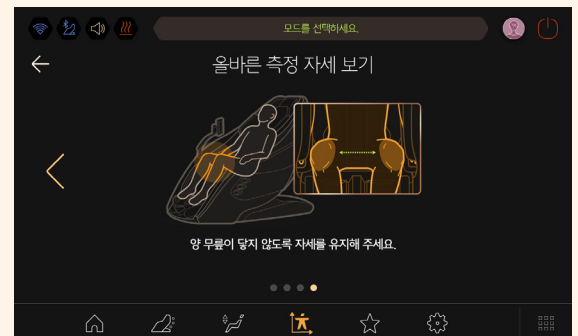

# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명

## 체성분 마사지 - 체성분 측정 방법


03 체성분 측정 전에 주의 사항을 확인합니다.

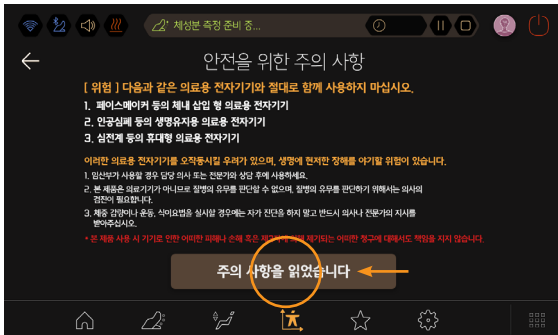

04 체성분 측정을 40초 이내로 진행합니다. 측정하는 동안 몸에 힘을 빼고 편안하게 측정 자세를 유지하십시오.



05 체성분 측정이 완료되면 분석 결과에 따른 체형 맞춤 마사지를 추천해 줍니다.

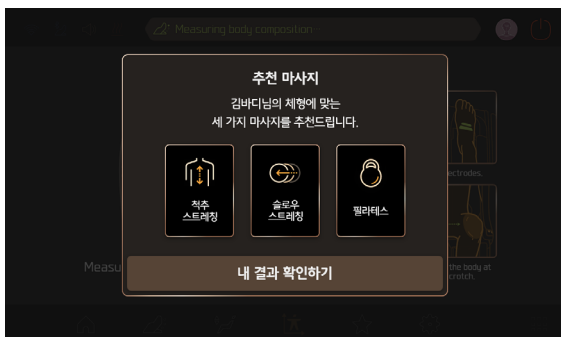

06 자세한 분석 내용은 [최근 결과 보기]에서 확인할 수 있습니다.  
※ 골격근/비만 분석, 영양 분석, 평가 의견



07 [지난 기록]을 통해 사용자의 체중과 근육량, 체지방률의 변화를 주/월/년 단위로 체크해 볼 수 있습니다.



# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명

## 체성분 마사지 - 측정이 실패한 경우

- 사용자 관리/프로필에 입력된 값이 정확한지 확인하시기 바랍니다.
- 가벼운 복장과 올바른 측정 방법으로 다시 시도해 보십시오.
- 손바닥이 습진 등으로 벗겨지거나 각질이 많으면 측정이 실패할 수 있습니다.
- 손이나 발이 건조할 경우 실패할 수 있습니다.
- 꽉 쏘이는 상의를 입은 경우 또는 손목에 시계 등 귀금속이 많은 경우 실패할 수 있습니다.
- 근육이 많아 체지방률이 아주 낮은 경우나 체지방률이 과도하게 높은 경우에는 측정할 수 없습니다.
- 너무 마른 체형인 경우 측정 유효 범위를 벗어나서 측정할 수 없습니다.
- 맨손과 맨발로 측정하시기 바랍니다. 양말이나 스타킹을 착용한 상태로 검사 시 전류가 원활하게 흐르지 않아 정확한 검사가 이루어지지 않습니다.

※ 식사나 운동 전후 등 측정 시기에 오차가 생기는 것은 기계적 오류가 아니며, 측정값에 질문이 있으실 때는 담당자에게 연락바랍니다.

## 체성분 마사지 - 측정 결과값 안내

체중	신체의 모든 체성분 무게를 포함한 중량으로, 측정자의 몸무게를 100 g 단위로 표시합니다.
근육량	체내의 근육량을 나타내는 지표로서 근육량이 증가하면 체지방이 감소하고 에너지 소비가 늘어나 다이어트에 도움을 줍니다.
체지방률	신체에 있어서 지방이 차지하고 있는 비율입니다. 최근에는 일정 수준을 초과한 체지방의 유무로 비만을 정의하고 있습니다. 체지방이 너무 많으면 당뇨병, 고혈압 등에 걸릴 위험이 있습니다.
BMI	체질량지수는 자신의 몸무게(kg)를 키의 제곱(m <sup>2</sup> )으로 나눈 값입니다. 비만도를 나타내는 지수입니다.
체수분	신체의 수분 총량을 총 체중의 비율로 나타낸 것입니다. 나이가 들어감에 따라 체수분의 비율이 변화되며, 개인간의 차이가 있어 조금씩 다를 수 있습니다.
단백질	신체의 모든 세포와 조직을 구성하는 중요 요소입니다. 단백질이 부족하면 모발, 피부, 면역력이 약해지며 피로감과 피부 트러블이 발생할 수 있습니다.
무기질	뼈와 체액의 무기 성분의 총량으로 뼈와 치아를 형성하는 물질입니다. 생체 유지에 없어서는 안 되는 필수 영양소입니다.
체지방	체지방은 체중에서 지방이 차지하는 비율을 뜻합니다. 성인 남성의 적절한 체지방률은 15~18 %, 성인 여성은 20~25 % 입니다.


※ 체성분 결과값은 측정하는 기기마다 다를 수 있습니다.



# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명

## 자동 모드

홈 > 자동 모드 > 원하는 모드 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

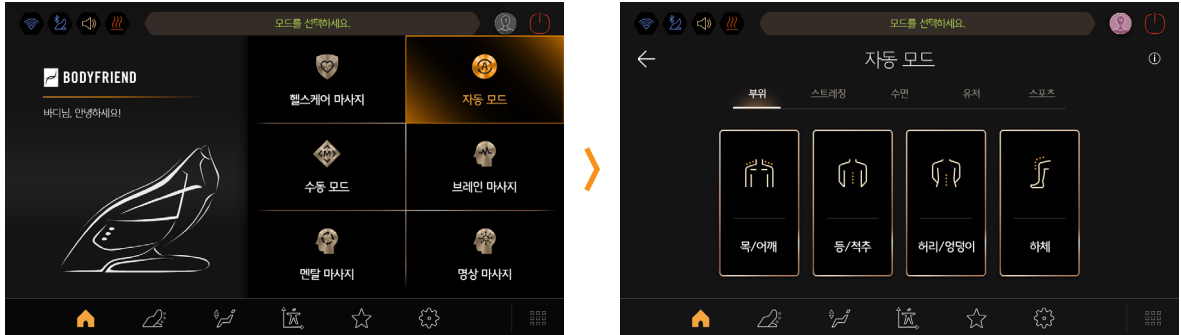


부위	목/어깨	목, 어깨 부위를 주무름, 스트레칭으로 이완시키는 코스입니다.
	등/척추	등, 척추 주변 부위를 지압과 주무름으로 이완시키는 코스입니다.
	허리/엉덩이	허리, 엉덩이 주변부를 지압과 주무름으로 이완시키는 코스입니다.
	하체	허리 및 다리 부위에 집중적으로 다양한 마사지를 제공하는 코스입니다.
스트레칭	하체 스트레칭	골반을 지지하고 하지를 당겨 하체를 위주로 강하게 스트레칭해주는 코스입니다.
	척추 스트레칭	척추 주변부 마사지와 함께 머리 뒤편을 지지하고 하지를 당겨 척추를 강하게 스트레칭해주는 코스입니다.
	슬로우 스트레칭	강한 스트레칭이 부담스러운 분을 위한 부드러운 스트레칭 이완 코스입니다.
	에어 스트레칭	마사지 모듈 작동 없이 에어백을 이용하여 부드러운 마사지를 제공하는 이완 코스입니다.
수면	자연 수면	30분간 부드럽고 단조로운 전신 마사지와 각도 변화를 통해 수면을 유도하는 코스입니다.
	미니 낮잠	20분 이하의 효과적인 낮잠을 유도하기 위해 부드러운 두드림을 반복적으로 하는 코스입니다.
	해먹 수면	마사지체어의 스윙 패턴을 통해 해먹에서 잠드는 듯 안락한 마사지 코스입니다.
	야간 저소음	소음에 민감한 야간에도 사용할 수 있는 에어백을 제외한 전신 주무름 코스입니다.
유저	CEO	과도한 스트레스에 시달리는 CEO를 위한 목어깨 위주의 피로회복 마사지 코스입니다.
	시니어	부드러운 저자극을 선호하는 시니어를 위한 안전한 마사지 코스입니다.
	육아맘	육아로 피로한 목, 허리를 집중 마사지하고 팔다리, 골반부 특수 에어백 패턴 마사지를 제공하는 코스입니다.
	수험생	오래 앉아있어 불편해진 수험생의 허리와 목, 어깨에 상쾌한 마사지를 제공하는 코스입니다.
스포츠	골프	골프 라운딩 후 피로한 팔, 다리, 발바닥에 강한 마사지를 제공하는 코스입니다.
	필라테스	전신, 다리 각도의 변화를 통해 코어근육인 엉덩이, 아랫배를 자극하는 바른 자세와 근이완에 도움을 주는 코스입니다.
	요가	유연한 몸을 만들어주는 요가 동작을 응용한 다이내믹한 마사지와 스트레칭을 제공하는 코스입니다.
	드라이빙	장시간 운전으로 피로한 상체를 위주로 부드러운 마사지를 제공하는 코스입니다.

# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명

## 수동 모드

홈 > 수동 모드 > 원하는 마사지 방식 선택 > 마사지 시작

※ 홈 화면 하단의 두번째 아이콘을 누르면 수동 마사지의 세부 설정 및 빠른 실행이 가능합니다.

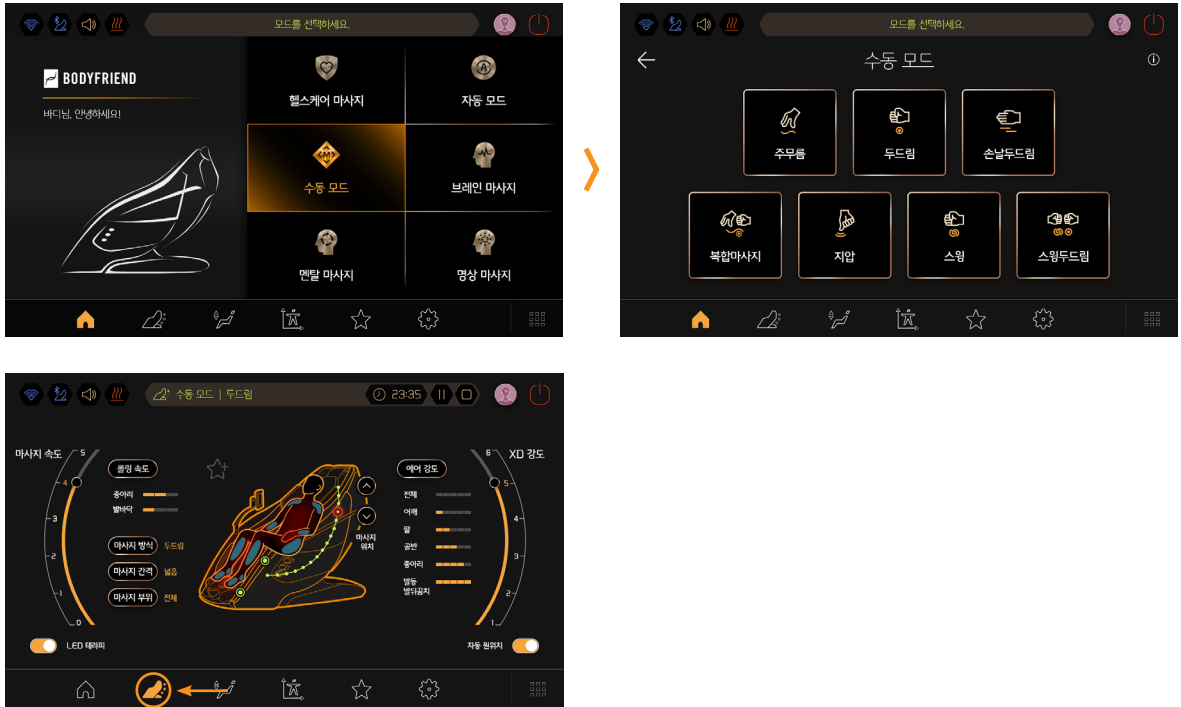


주무름	마사지볼이 안쪽으로 모였다 멀어지며 주물러주는 방식으로 심한 결림 해소와 뭉친 근육 이완에 좋습니다.
두드림	마사지볼이 어깨에서부터 아래로 두드려주는 방식으로 어깨와 등 부위를 전체적으로 풀어주는데 효과적입니다.
손날두드림	마사지볼이 상하로 가볍고 빠르게 움직이는 손날로 두드려주는 방식으로 근피로를 풀어주는데 효과적입니다.
복합마사지	주무름과 두드림이 리드미컬하게 반복되어 주무름과 두드림의 장점을 동시에 느낄 수 있는 마사지입니다.
지압	마사지볼이 상하로 중후하게 눌러주는 방식으로 강하게 뭉친 근육을 섬세하게 풀어줍니다.
스윙	마사지볼이 측면으로 반복적으로 움직이며 주물러주는 방식으로 특정 부위의 근육을 풀어주는데 효과적입니다.
스윙두드림	마사지볼이 측면으로 반복적으로 움직이며 두드리는 방식으로 특정 부위의 근육을 풀어주는데 효과적입니다.

# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명

## 브레인 마사지

홈 > 브레인 마사지 > 원하는 모드 선택 > 음원 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

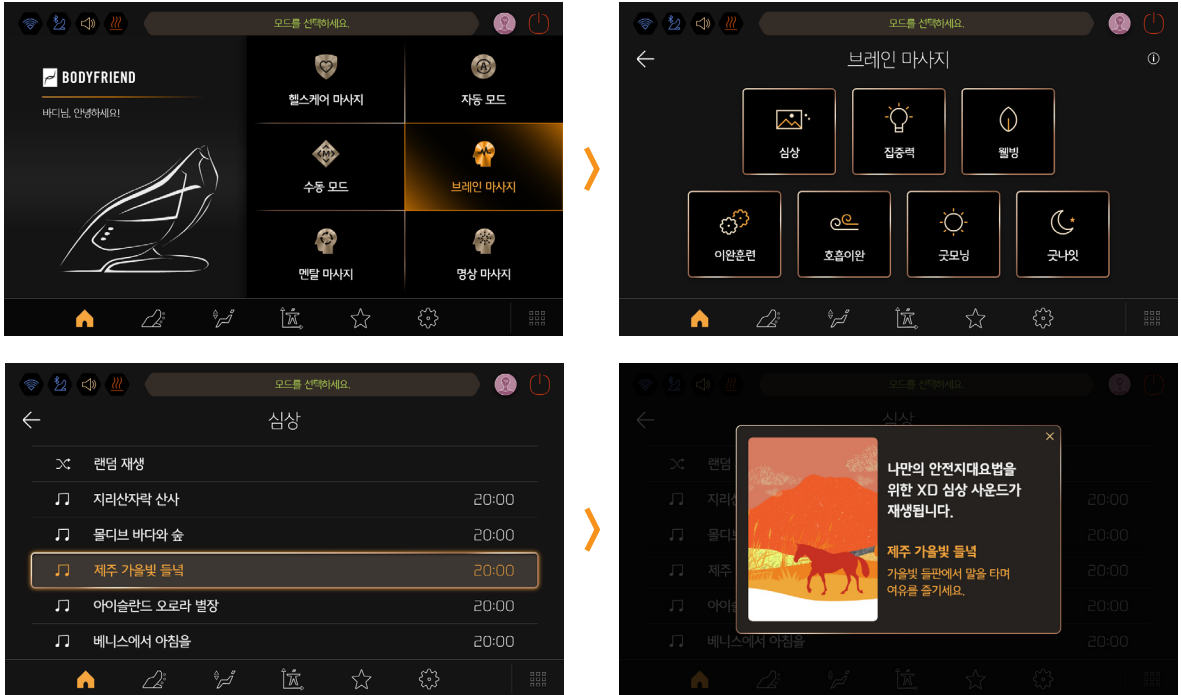


심상	나만의 휴양지에서 XD 심상 사운드와 함께 자유롭게 상상하고 싶은 분들을 위한 초보자 코스입니다.
집중력	과도한 학업 및 업무로 인해 피로한 두뇌에 휴식을 제공하고, 심신을 재충전하고 싶은 분들을 위한 마사지 코스입니다.
웰빙	일상에서 과도한 스트레스를 받아 휴식을 취하고 싶은 분들을 위한 마사지 코스입니다.
이완훈련	<p>심신에 쌓인 긴장과 스트레스 해소를 원하는 분들을 위해 점진적 근육 이완요법을 활용하여 개발된 마사지 코스입니다.</p> <p>※점진적 근육 이완요법 : 신체적인 근육의 긴장을 의도적으로 감소시켜 마음의 긴장까지 해소하는 기법</p>
호흡이완	<p>중요한 시험이나 발표를 앞둔 분들을 위해 호흡 이완요법을 활용하여 개발된 마사지 코스입니다.</p> <p>※호흡 이완요법 : 의식적으로 호흡을 조절하여 마음을 이완시키고 과도한 긴장과 흥분을 낮추는 기법</p>
굿모닝	아침잠이 많아 하루를 상쾌하게 시작하기 어려운 분들을 위한 아침 특화 마사지 코스입니다.
굿나잇	잠들기 전에 하루 동안 쌓인 피로를 풀면서 생각을 정리하고 싶은 분들을 위한 저녁 특화 마사지 코스입니다.

# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명

## 멘탈 마사지


홈 > 멘탈 마사지 > 원하는 모드 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

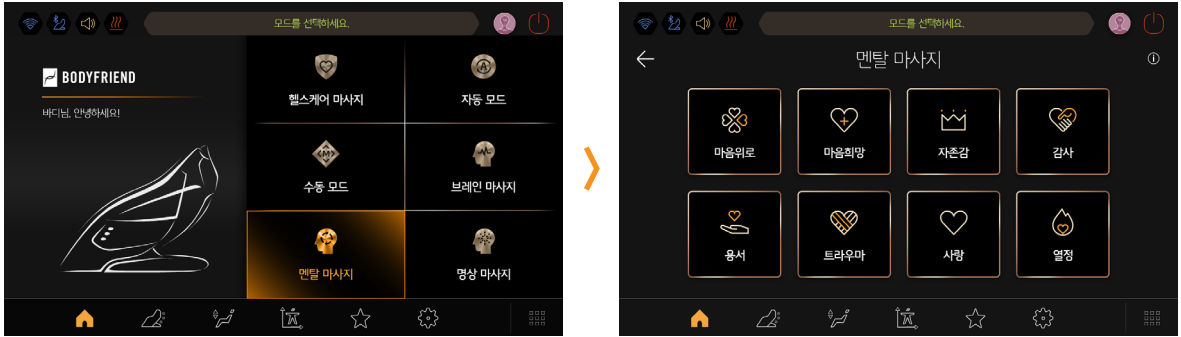

마음위로	이미 지나간 일들에 대한 후회로 마음이 우울한 고객을 위한 공감 힐링 마사지 코스입니다.
마음희망	막연한 걱정으로 불안과 초조함을 느끼는 고객을 위한 공감 힐링 마사지 코스입니다.
자존감	스스로 작아 보이고 답답할 때 마음을 위로해 주고 자존감 회복에 도움을 주는 코스입니다.
감사	일상의 소중한 것들을 되새겨 보면서 기분을 전환시키는데 도움을 주는 코스입니다.
용서	나 자신을 위한 적극적인 용서를 제안하며 음악을 통해 위로하는 코스입니다.
트라우마	과거 기억의 괴로움을 겪는 분들에게 마음의 안정을 선사하는 코스입니다.
사랑	마사지와 마음의 여유를 통해 현재의 나를 사랑하는 방법을 제안하는 코스입니다.
열정	내 마음속에 존재하던 그릿을 마사지와 함께 느껴볼 수 있도록 제안하는 코스입니다.

## 명상 마사지

홈 > 명상 마사지 > 원하는 단계 선택 > 음원 선택 > 자동 체형 검색 > 어깨 위치 세부 조절 > 마사지 시작

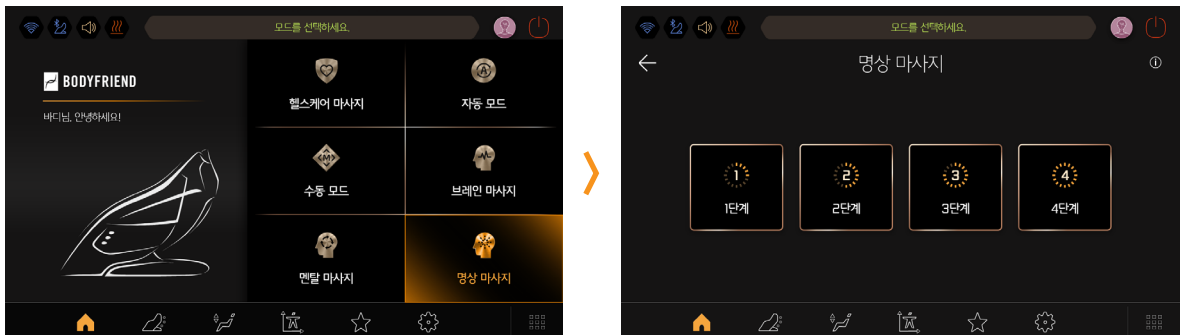

1단계	[감각인지] [바디스캔] [나돌아보기] [알아차림] [호흡] 중 선택하여 받을 수 있습니다.
2단계	[감각수용] [자애] [나돌아보기] [알아차림] [호흡] 중 선택하여 받을 수 있습니다.
3단계	[디스트레스] [수면] [위로] [자기연민] [분별심] 중 선택하여 받을 수 있습니다.
4단계	[수용] [미소] [자비] [평안] [나 돌아보기] 중 선택하여 받을 수 있습니다.

# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명


## 선호 모드

※ 게스트로 사용 시 선호 모드 등록이 불가능합니다. 계정 로그인 후 사용하시기를 바랍니다.

01 등록하기 : 홈 > 원하는 모드 선택 및 시작 > 맞춤 마사지 설정 > ☆ 아이콘을 눌러 선호 모드로 등록합니다.

02 실행하기 : 선호 모드 아이콘 선택 > 원하는 모드 선택 > 마사지 시작

03 목록관리 : 선호 모드는 총 12개까지 등록이 가능합니다. 목록에서 등록된 선호 모드의 순서 이동 및 삭제가 가능합니다.

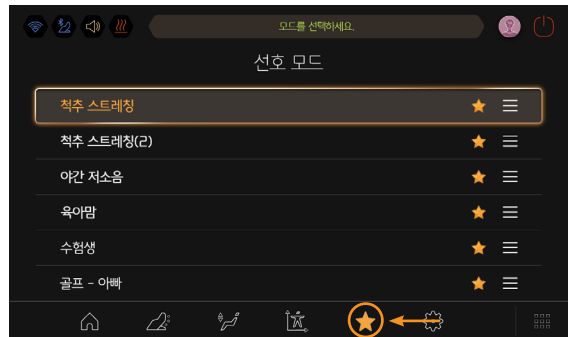

### [선호 모드 저장 내역 범위]

헬스케어 모드, 자동 모드, 브레인 / 멘탈 / 명상 마사지


- 01 마사지 명칭
- 02 어깨 위치
- 03 마사지 속도, XD 강도, 롤링 속도, 에어 강도, 자동 원위치
- 04 온열
- 05 음원 정보 (브레인/멘탈/명상 마사지 해당)

수동 모드

- 01 마사지 방식 명칭
- 02 마사지 방식
- 03 어깨 위치
- 04 마사지 속도, XD 강도, 롤링 속도, 에어 강도, 자동 원위치
- 05 전신 각도, 다리 각도
- 06 온열

## 설정


홈 > 설정 아이콘 선택

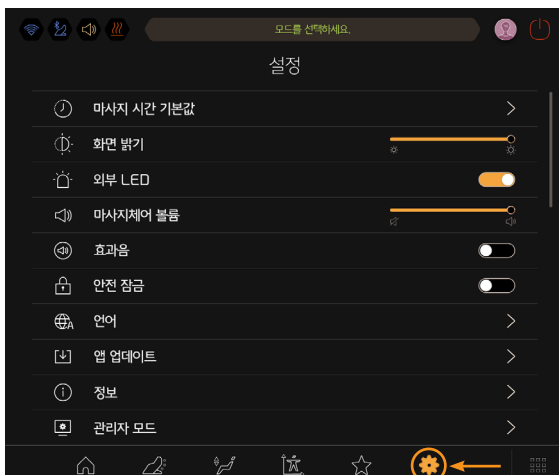


# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명

## 태블릿 리모컨 - 다빈치 마사지체어 블루투스 스피커 연결하기


01

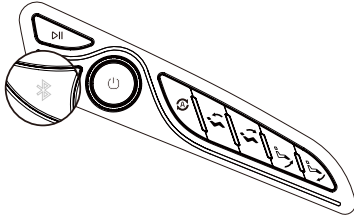


02

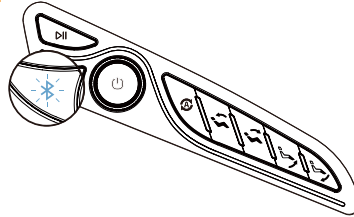


03-1

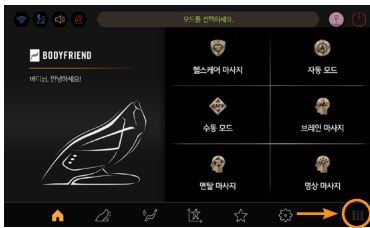


03-2

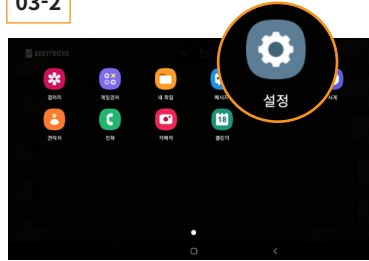


03-3

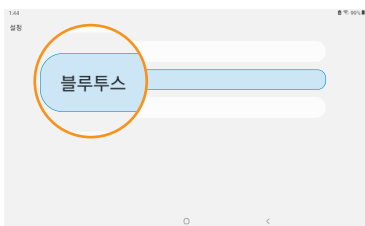

03-4

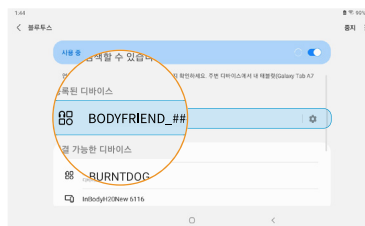

04

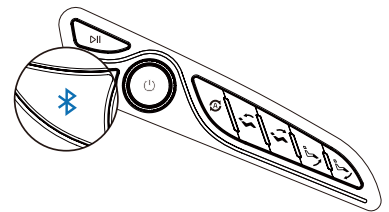

**01** 마사지체어의 전원을 켜고 내측키의 블루투스 버튼을 누릅니다.

**02** 블루투스가 다빈치 태블릿과 연결을 시도하는 동안 마사지체어 내측키의 블루투스 아이콘이 1초에 1번씩 파란색으로 점멸됩니다.

**03** 태블릿 홈 화면 > 앱스(앱서랍) 화면으로 이동 > 설정 > 블루투스 > 검색 > 바디프랜드 블루투스를 찾아 연결합니다.

※ 명칭 : 88 BODYFRIEND\_####

(#####은 제품의 고유 블루투스 번호입니다. 한 공간에 여러 대의 마사지체어가 있을 경우 고유 번호를 확인한 후 연결하시기를 바랍니다.)

**04** 연결이 완료되면 내측키의 파란색 LED가 점등되고 연결 완료음이 출력됩니다.

※ 블루투스 연결이 실패하거나 끊기면 하얀색 LED로 점등됩니다.


※ 연결이 끊어졌을 경우, 같은 방법으로 페어링을 시도하시기를 바랍니다.

※ 리셋을 진행하여도 블루투스 이름이 나타나지 않을 경우, 다른 스마트폰과 연결되어 있는지 확인하십시오.


# 태블릿 리모컨 작동 및 프로그램 설명

## 모바일 기기 - 다빈치 마사지체어 블루투스 스피커 연결하기


01

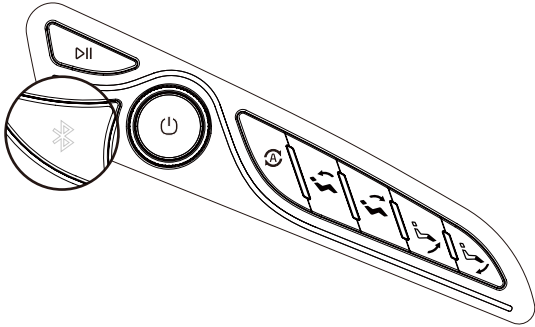


02

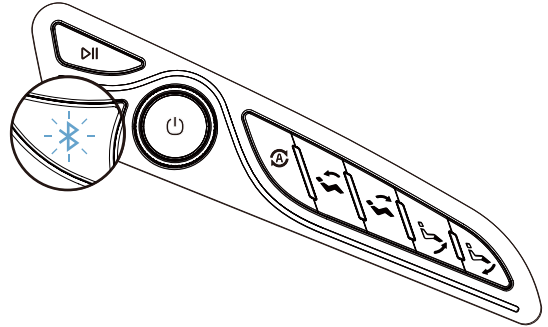

03

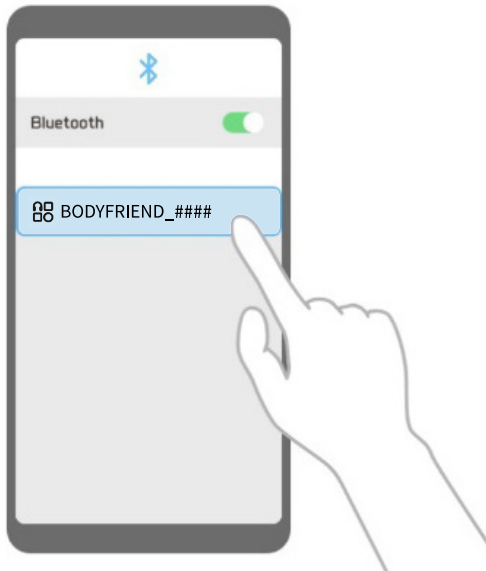

04

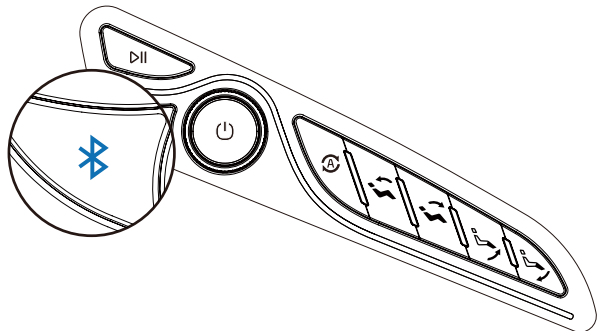

01 마사지체어의 전원을 켜고 내측키의 블루투스 버튼을 누릅니다.

02 블루투스가 모바일 기기와 연결을 시도하는 동안 마사지체어 내측키의 블루투스 아이콘이 1초에 1번씩 파란색으로 점멸됩니다.

03 모바일 기기의 블루투스 설정에 들어가서 바디프랜드 블루투스를 찾아 연결합니다.

※ 명칭 : BODYFRIEND\_####

(####은 제품의 고유 블루투스 번호입니다. 한 공간에 여러 대의 마사지체어가 있을 경우 고유 번호를 확인한 후 연결하시기를 바랍니다.)

04 연결이 완료되면 내측키의 파란색 LED가 점등되고 연결 완료음이 출력됩니다.

※ 블루투스 연결이 실패하거나 끊기면 하얀색 LED로 점등됩니다.

※ 연결이 끊어졌을 경우, 같은 방법으로 페어링을 시도하시기를 바랍니다.

※ 리셋을 진행하여도 블루투스 이름이 나타나지 않을 경우, 다른 스마트폰과 연결되어 있는지 확인하십시오.



# XD PRO 모듈 설명

## 바디프렌드만의 독보적인 신개념 XD 마사지 시스템

### 1. 넓고, 깊은 XD 마사지

- XD 모듈의 긴 회전축을 이용하여 넓은 부위의 주무름 마사지를 제공합니다.
- 마사지볼이 X자를 그리며 섬세하고 깊이감 있는 마사지를 제공합니다.

### 2. 인체 공학적인 XD의 마사지 각도

- 마사지 방식에 따른 각도를 조절하여 신체 부위별 마사지를 제공합니다.
- 큰 근육에는 강력하게, 작은 근육에는 부드러운 마사지를 제공합니다.
- 실제 사람의 손으로 받는 것과 유사한 각도의 마사지를 구현합니다.

## XD PRO

### 사용자 체형 분석을 통한 맞춤형 마사지 시스템

#### 1. 빠르고 정확한 체형 인식

- 마사지 모듈이 체형을 따라 하강하면서 인체의 굴곡과 압력을 센싱하여 정확한 어깨 인식이 가능합니다.
- 마사지 모드 진행 중에도 사용자가 실시간으로 어깨의 위치를 조절할 수 있습니다.

#### 2. 섬세하고 부드러운 마사지감

- 고성능 센서를 사용하여 기존 XD 모듈보다 더욱 섬세하고 정교한 마사지를 제공합니다.
- 정밀한 체형 인식에 통해 다양한 마사지 방식의 구현이 가능합니다.



## 제품 규격 및 사양

본 제품 사양은 성능 향상이나 개선을 위하여 별도의 고지없이 일부 변경될 수 있습니다.

모델명	BFB-8200 / BFB-8210
정격전압	220 V~, 60 Hz
소비전력	230 W
USB	5 V, 1.5 A
충전 출력	최대 15 W (BFB-8210 전용 )
오토 타이머	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 분
에어백 범위	어깨 / 팔 / 골반 / 종아리 / 발등 / 발뒤꿈치
롤링 범위	종아리 / 발바닥
마사지볼 범위	목 - 엉덩이
리모컨	8.7inch   해상도 : 1340 X 800 (WXGA+)
제품 무게	149 kg
세웠을 때	166(길이) X 80(넓이) X 125(높이) cm
눅혔을 때	193(길이) X 80(넓이) X 88.5(높이) cm
일반적 명칭	전기마사지기

## 고장 신고 전 확인사항

제품에 이상이 발생하였을 경우 서비스 센터에 의뢰하기 전 아래 사항을 먼저 확인하여 주세요.

증상	원인	해결방법
메인 전원을 켜는데도 작동이 안 되는 경우	리모컨 또는 내측키 전원 버튼 미실행	전원 버튼을 누르십시오
	프로그램을 선택 안 한 경우	프로그램을 선택 및 실행하십시오
	전원 플러그 접촉 불량	전원 플러그를 콘센트에 정확히 꽂으십시오
	전원 플러그, 전원 케이블 파손	A/S센터에 연락하십시오
	퓨즈가 탄 경우	
	전자 회로 이상	
작동 중 소음이 발생한 경우	일반적인 기계음 발생 - 에어 펌프 진동음, 에어 흡입/토출음 - 에어백 팽창으로 인한 사출 소음 - 솔레노이드 밸브 개폐음 - 시트 마찰음	제품이 정상적으로 작동하는 소리로 고장이 아닙니다
	오랜 시간 사용한 경우	다시 시작하십시오 (30분 후)
	오랜 시간 사용으로 인한 마모	A/S 센터에 연락하십시오
작동 중 동작이 갑자기 멈춘 경우	갑작스러운 전원 공급 차단	전원을 다시 실행하십시오
	작동 시간 종료	다시 시작하십시오 (30분 후)
각도 변경 중 갑자기 멈춘 경우	끼임 감지 센서 및 장애물 여부 확인	장애물을 제거하고 재실행합니다
	과도한 사용, 무리한 충격	다시 시작하십시오 (30분 후)
작동 중 마사지볼이 내피 천에 걸리거나 튕기는 경우	마사지볼과 시트의 마찰	주무름 동작시 마사지볼로 인한 일반적인 현상으로 고장이 아닙니다
원위치로 복귀가 안 될 경우	과도하게 작동시킨 경우	A/S 센터에 연락하십시오
리모컨 과열	오랜 시간 사용한 경우	다시 시작하십시오 (30분 후)
전원 케이블 과열	과도한 부하	다시 시작하십시오 (30분 후)
	다른 비정상 원인	A/S 센터에 연락하십시오
에어백 작동이 안 되는 경우	에어 연결 호스가 이탈한 경우	A/S 센터에 연락하십시오
	에어 관련 전원 선 끊어짐	

# 마사지체어 고객 서비스 안내

A/S센터 : 02 3448 8980

무상 A/S 품목	마사지체어 내부의 마사지부를 운용하는 기계/기구류
	메인보드류, 각종 모터류, 에어펌프류
	내부 전기, 전자 배선 및 에어 호스류
유상 A/S 품목	외부 시트 및 내부 시트, 외피/내피 전체, 고객의 사용 빈도로 인한 변색, 탈색, 찢어짐, 낡음 또는 반려동물에 의해 파손이 발생한 시트류 (인조가죽, 천연가죽, 천으로 구성된 외피, 내피 부분)
	※ 본 제품의 외부 시트는 인조가죽 재질입니다. 인조가죽의 경우 사용 빈도 및 보관 상태에 따라 수명이 달라질 수 있으며, 가죽 외피의 손상이 확인되면 구매처로 연락하여 교체 후 사용 바랍니다.
	리모컨 / 케이블 고객의 사용 빈도로 인한 노후 증상, 임의 개봉 또는 떨어뜨림 등으로 발생한 고장, 파손 기타 고객과 관련한 요청사항으로 인한 마사지체어 이동 및 분해/조립이 필요할 시, 비용이 청구될 수 있습니다.

## 서비스 기간

- 01 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우,  
설치 일로부터 정해진 기간 내에 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 02 공동 이용시설이나 영업용으로 사용 시 별도 단축 적용됩니다.

## 유상 서비스에 대한 안내

다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 01 제품 내에 물, 음료수, 커피, 기타 이물질이 투입하여 고장이 발생하였을 경우
- 02 제품에 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 03 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 04 바디프랜드 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 05 사용 전압을 잘못 사용하여 고장이 발생하였을 경우
- 06 고객이 제품을 임의 분해하여 파손된 경우
- 07 바디프랜드 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 08 천재지변에 의한 고장이 발생하였을 경우
- 09 사용 설명서 내에 있는 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 10 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 11 고객의 사용 빈도나 부주의로 수명이 단축된 소모품
- 12 지속적인 햇빛, 자외선 노출로 인해 외관 사출이 탈색 및 변색한 경우

※ 단, 소비자 과실이나 사용으로 인한 경우가 아님을 소비자가 증명하거나, 당사의 A/S 판정 기준에 적합한 경우 무상 A/S에 준할 수 있습니다.

## 반품 및 교환 불가 사유

본 제품은 설치하는 전자제품으로 하기와 같은 사유로 반품 및 교환이 불가합니다.

(설치 후 사용 시 제품의 가치가 현저히 하락하여, 새 제품으로의 판매가 불가능)

- 01 개인 변심(색상, 가격 변동 등)으로 인한 교환 및 반품 불가
- 02 중요한 수리를 필요로 하는 하자가 아닌 경우, 설치 후 교환 및 반품 불가 (A/S로 진행)
- 03 개인차(마사지 강도, 신체 사이즈 등)로 인한 교환 및 반품 불가 (구매 전 제품 테스트 권장)

# 태블릿 고객 서비스 안내

제공되는 태블릿 서비스는 삼성전자 서비스 센터를 통해 접수 및 처리되며, 해당 기기의 불량으로 인한  
마사지체어 반품·교환은 불가합니다. (태블릿 제품 보증서는 태블릿과 함께 제공된 박스 내의 [간단 사용 설명서]를 확인하여 주시기 바랍니다.)

※ 삼성전자 대표 사이트([www.samsung.com/sec](http://www.samsung.com/sec))에서 제품 정보, 상세 사용 설명서 등을 볼 수 있습니다.

[제품 A/S 관련 문의] A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려주시기 바랍니다.

- 삼성전자 서비스 센터 : 1588-3366
- 고객 불편 상담 : 02-541-3000 / 080-022-3000
- 구매(개통) 후 14일 이내 제품 불량으로 인한 반품 문의 시에는 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하시기 바랍니다.

## [무상 서비스 안내]

제품 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다. (비 고장성, 과실은 제외됨)  
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용		
			제품 보증 기간 이내	제품 보증 기간 이후	
부품 보유 기간 내 정상적인 사용 조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환불	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상 수리		
	제품 구입 시 운송 과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급		
	제품 교환이 불가능한 경우				
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 2회까지 발생한 경우		무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 3회째 발생한 경우			
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우			
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		제품 교환 또는 환급	정액을 감가상각한 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급	
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				

## [유상 서비스 안내]

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증 기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용 설명서를 먼저 확인하시기 바랍니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		제품 보증 기간 이내	제품 보증 기간 이후
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 또는 환불	정액 감가상각 잔여 금액에 10%를 가산하여 환급
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

※ 디스플레이 수리 후 불량 부품을 반납한 경우 수리 비용이 할인될 수 있습니다.

### 01 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템 정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 당사에서 미지정된 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 충전기, 배터리, 헤드셋, 커버류 등)
- 사용 설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

### 02 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 헤드셋, 메모리, 케이블/부착물 등)
- 제품 보증기간 이내 부품의 고장이 발생하더라도 소비자 과실이 함께 발견된 경우

※ 아래와 같은 경우 서비스가 거부될 수 있습니다.

- 임의로 개조, 변조, 복제하거나 사제(모조)부품을 사용한 경우
- 소비자가 회수해 간 미반납 부품으로 재수리를 요구하는 경우
- 동일 단말기를 반복해서 수리 요구하는 경우 등 수리 외 다른 목적의 수리 요구로 추정되는 경우
- 구입(또는 A/S) 당시 부품이 아닌 다른 부품으로 교체된 상태인 경우


# 제품 보증서

- 01 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 02 무상 서비스 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기를 바랍니다.
- 03 본 제품을 개인, 가정용으로만 사용하시기를 바랍니다.
- 04 본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.
- 05 본 보증서는 재발행하지 않습니다.

제품명	전기마사지기	모델명	
제조일자	년 월 일	제조번호	
구입처명		구입처 연락처	
설치일자	년 월 일	무상보증기간	년 월 일

고객란	성 명 :
	주 소 :
	연락처 :

- ※ 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우, 구입일로부터 산정된 보증기간의 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
- ※ 본 제품을 가정용 이외의 용도로 사용할 경우, 보증기간은 단축 적용됩니다.
- ※ 유/무상 서비스 기준은 당사가 규정한 A/S 품목에 준하여 적용됩니다. (고객 서비스 안내 페이지 참고.)
- ※ 마사지체어의 품질보증 기간은 설치일로부터 1년입니다.

 본 사용 설명서를 폐기할 때는 해당 지역의 분리수거 규정에 따라 처분하여 주십시오.




# DAVINCI

제품명 전기 마사지기  
모델명 BFB-8200 / BFB-8210  
A/S 연락처 02)3448-8980  
매뉴얼 넘버 240628



모바일 사용 설명서

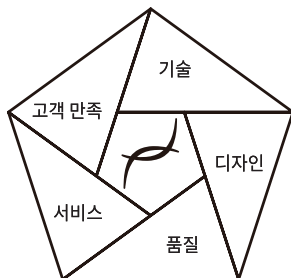

## 바디프랜드 펜타곤 PENTAGON

완전무결한 오감초격차 전략으로 10년 더 건강하게!

오각형은 가장 완벽하고 안정된 모양으로 완전성을 상징합니다.

바디프랜드는 황금비를 갖춘 오각형(Pentagon)을 기술 · 디자인 · 품질 · 서비스 · 고객 만족에 이르는 5가지 분야에 적용, 누구도 따라올 수 없을 정도의 격차를 뜻하는 '오감초격차(五感超格差)' 전략으로 건강수명 10년 연장의 꿈을 실현해 가고 있습니다.

집에서 편안하게 마사지를 받으며 측정된 데이터를 바탕으로 맞춤형 건강 서비스를 제공하는 '디지털 헬스케어' 더 나아가 IoT 기술에 기반한 '홈 헬스케어 플랫폼'으로서 성장해 가는 바디프랜드와 함께 건강한 라이프스타일을 즐기시기 바랍니다.