

BODYFRIEND

FALCON·S

바디프랜드
마사지체어
팔콘S
사용 설명서



※ 본 설명서의 이미지 및 내용은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 본 설명서의 업데이트 사항은 2페이지 또는 뒤표지에 있는 QR코드를 통해 확인하실 수 있습니다.
※ 본 설명서의 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 실제 마사지체어와 다를 수 있습니다.
※ 본 설명서의 이미지는 고객의 모델 선택에 따라 실제 마사지체어와 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

인사말

바디프랜드 마사지체어 [팔콘S]를 구입해 주신 고객님께 깊이 감사드립니다.
사용 설명서를 읽어 보신 후 보다 안전하고 편리하게 사용하기를 바랍니다.
본 설명서의 이미지 및 내용은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
업데이트 사항은 QR코드를 통해 확인하실 수 있습니다.



모바일 사용 설명서

※ 제품을 사용하기 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용 바랍니다.
※ 본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

제품 특징




로보 케어



XD 마사지



헬스 케어

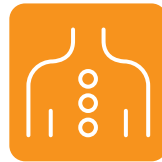

부위별 케어



매일 케어



나만의 케어



멘탈 케어



중아리 온열



내축기




부위별
클릭 ON/OFF




천연 가죽 시트



14개 안전 센서

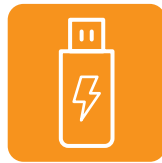

USB 충전

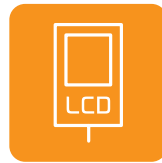

4인치 LCD 리모컨



블루투스 자동 연결

XD 마사지 모듈

마사지볼의 수평 수직 움직임을 컨트롤하며 개인별 체형과 압각에 최적화된 맞춤형 마사지를 제공합니다.

다리 마사지부 개별 동작

좌/우 다리 마사지부의 독립적인 움직임으로 특화된 마사지를 제공해 줍니다.

안전 강화

다리부와 후면부에 총 14개의 안전 센서를 적용하여 사용자의 안전을 강화하였습니다.

목차

사용 전 안내 사항	인사말 · 제품 특징	02
	안전을 위한 주의 사항	04
	제품 각 부분 명칭	13
	이동 및 설치	14
연결 방법	제품 연결 방법	15
	Wi-Fi 연결 방법 - 소프트웨어 업데이트	16
리모컨 설명	리모컨 버튼 설명	17
	리모컨 작동 설명	19
프로그램 설명	로보 케어 · 헬스 케어	27
	부위별 케어 · 매일 케어 · 멘탈 케어	28
기능 설명	XD 모듈 설명	29
제품 사양	제품 규격 및 사양	30
고장 진단 및 조치	고장 신고 전 확인 사항	31
	고객 서비스 안내	32
제품 보증서	제품 보증서	33

안전을 위한 주의 사항

※ 다음 지시된 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기를 바랍니다.
 ※ 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

경고 화상, 화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이기 위해

주의 부상의 위험을 방지하기 위해

사용 전 주의 사항

경고

목욕탕이나 습기가 많은 곳을 피하여 설치 및 사용하시기를 바랍니다.




감전, 화재, 변형, 곰팡이, 고장 등의 원인이 됩니다.

먼지가 많거나 녹이 슬 수 있는 장소를 피하여 설치 및 사용하시기를 바랍니다.




감전, 화재, 변형, 곰팡이, 고장 등의 원인이 됩니다.

직사광선 아래 또는 실내 온도가 40°C를 초과하는 환경에서는 사용하지 마십시오.

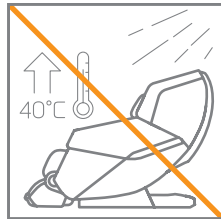


화재, 고장의 원인이 됩니다.

실외에 설치하지 마십시오.

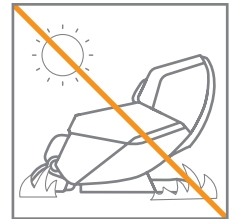


안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

난방 기구 근처나 열 발생 장치 등의 근처에서 사용하지 마십시오.

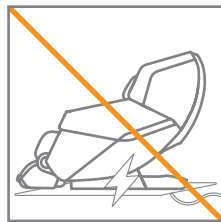


제품 손상, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

바닥이 평평하고 안정된 장소에 설치 및 사용하시기를 바랍니다.

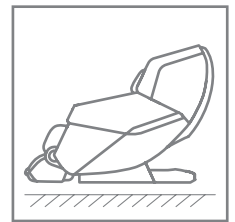


안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

사용하기 적당한 공간과 환기가 잘 되는 곳에 설치하시기를 바랍니다.

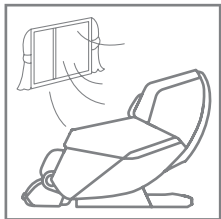

변형, 곰팡이, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품을 임의로 분해하여 사용하지 마십시오.

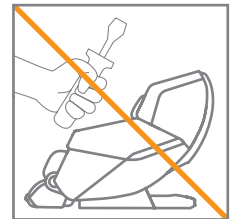


안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의 사항

사용 전 주의 사항

⚠ 경고

다른 전기제품 또는 의료제품과의 혼용을 자제하여 주시기를 바랍니다.

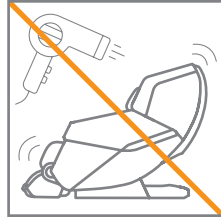


안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품에 이물질이 떨어지거나 뿌리지 마십시오.




안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

본 제품 위에 무게가 많이 나가는 제품을 올려놓지 마십시오.

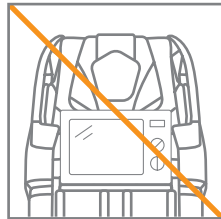

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.


유아나 반려동물 등이 본 제품의 하단부, 후면부, 다리 조정부 등으로 들어가지 않도록 주의하시기를 바랍니다.

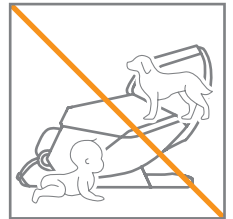

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

기술자의 도움 없이 기기를 설치하거나 수리하지 마십시오.

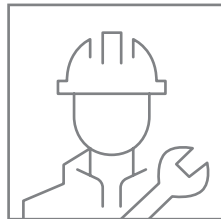


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

본 제품은 설명서에 기재된 용도 이외에 사용하지 마십시오.




안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품을 전원 케이블로 운반하거나, 손으로 케이블을 잡아당기지 마십시오.

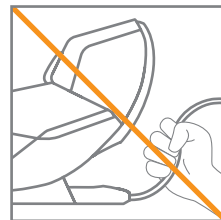


감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품을 보호 접지된 전원 콘센트에만 연결하십시오.

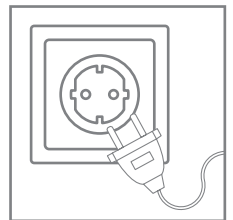


감전, 상해의 원인이 됩니다.

사용하기 전에 제품의 전원 상태를 확인하시기를 바랍니다.

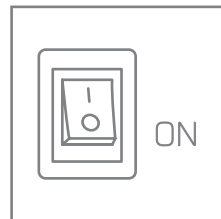

제품의 올바른 사용이 가능합니다.

전원은 교류 220V 전용 콘센트를 사용하십시오.

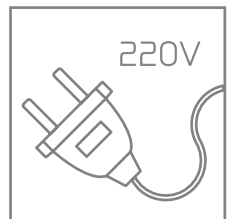


고장 또는 누전 시 감전의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의 사항

사용 전 주의 사항


⚠ 주의

본 제품을 전원 분리가 어려운 곳에 설치하지 마십시오.

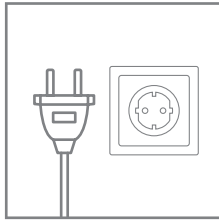


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 분리할 때 케이블을 잡아당기지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼십시오.

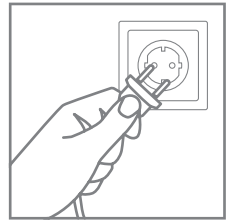


감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품의 안전 센서 동작 상태와 제품 복귀 전 유아나 반려동물이 근처에 있는지 확인한 후 사용하십시오.

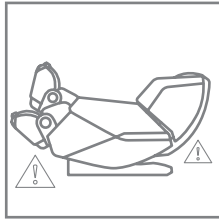

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

청바지 등의 짙은 색상 옷을 입고 사용 시 제품 시트에 이염이 될 가능성이 있으니 주의하시기를 바랍니다.

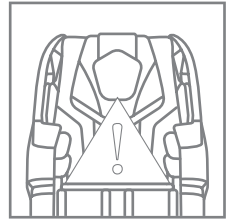


시트 이염의 원인이 됩니다.

사용 시 주의 사항


⚠ 경고

제품의 조작 방법 및 발생할 수 있는 부작용 사례를 확인하십시오.

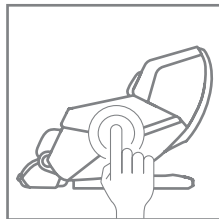

제품의 올바른 사용이 가능합니다.

전원 플러그를 꽂거나 뽑을 때 젖은 손은 감전의 위험이 있습니다.

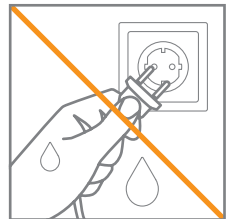

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

사용자의 몸이 젖은 상태에서 제품을 사용하지 마십시오.



감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

과도한 식사 후 바로 사용하지 마십시오.




부상의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의 사항


⚠ 경고

사용 중 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의하시기를 바랍니다.

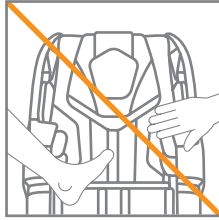


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

신체의 특정 부분을 집중적으로 사용 시 몸에 무리가 올 수 있으니 주의하시기를 바랍니다.

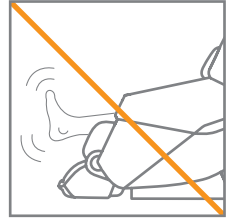


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품을 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하시기를 바랍니다.

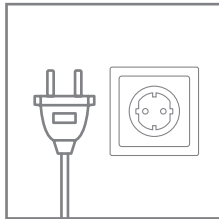


고장 또는 누전 시 감전의 원인이 됩니다.

유아나 어린이의 사용을 자제하여 주시기를 바랍니다.

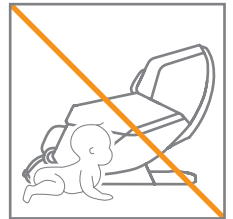


안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

머리, 팔꿈치, 가슴, 배, 무릎 등의 부위에 사용하지 마십시오.

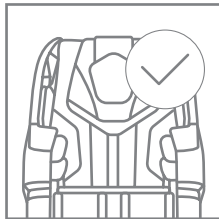


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

마사지볼이 작동하는 동안 올바른 위치에서 작동될 수 있도록 조작하십시오.

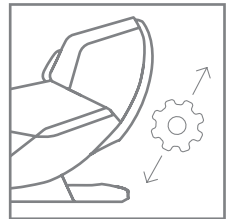


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

사용 중 제품에서 내려오실 때는 제품의 각도가 완전히 복귀된 후 내려오십시오.

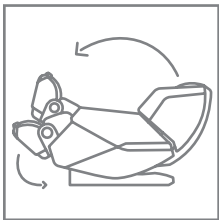


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

사용 중 통증이나 고통이 심할 시에는 즉시 사용을 멈추고, 사용자의 건강 상황에 맞는 후속 조치를 해 주시기를 바랍니다.

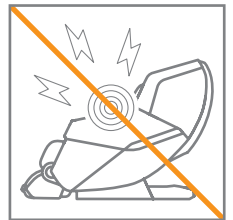


부상 등의 원인이 됩니다.

연속적으로 사용 시에는 몸에 무리가 갈 수도 있으니, 사용자의 건강 상태에 맞추어 선택하시기를 바랍니다.

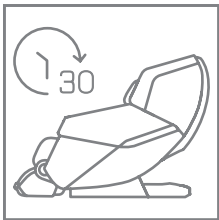

부상의 원인이 됩니다.

제품이 작동할 때는 어린이나 반려동물이 주변에서 놀지 않도록 주의하십시오.

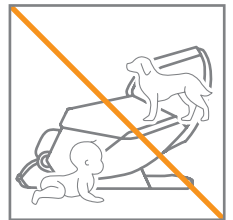

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.


안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의 사항

⚠ 경고

에어로졸 (스프레이) 제품을 사용하거나 산소를 사용하는 곳에서는 작동시키지 마십시오.

제품 손상, 화재, 폭발, 고장의 원인이 됩니다.

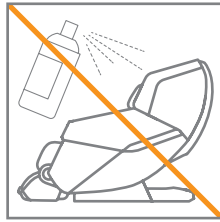


장신구를 착용한 상태에서 사용하지 마십시오.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.




사용 중 긴 머리가 끼이지 않도록 주의하십시오.

안전사고, 부상의 원인이 됩니다.

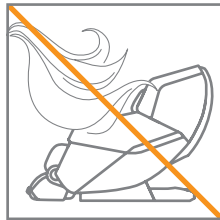


제품에 물건을 떨어뜨리거나 빈 곳에 물건을 집어넣지 않도록 주의하십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

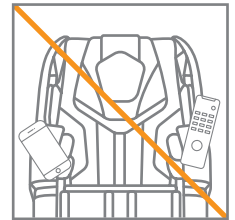

본 제품에 손상된 케이블, 플러그가 있거나 혹은 제대로 작동하지 않거나 물에 빠진 경우에는 작동하지 않고 검사 및 수리를 위해 서비스 센터에 연락하십시오.

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

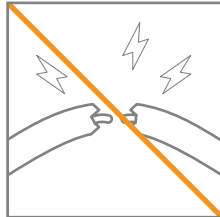


온열 기능 사용 시, 화상에 주의하십시오.

저온화상 등의 원인이 됩니다.




바른 자세로 착석한 후 제품을 사용하시기를 바랍니다.

안전사고, 부상, 상해, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

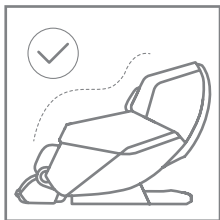

제품의 커버가 찢어지거나 벗겨진 상태에서 사용하지 마십시오.

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

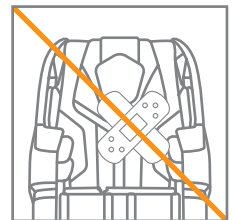


안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의 사항


⚠ 주의

한 번에 두 사람 이상이
사용하지 않도록 하십시오.

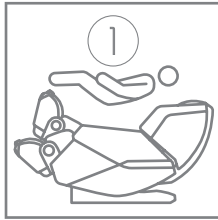


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.

주변의 온도가 급격하게
변화되는 곳에서는 사용을
자제하십시오.

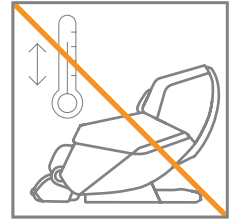


부상, 상해의 원인이 됩니다.

120kg 이상 하중을 가하지
않도록 주의하시기 바랍니다.

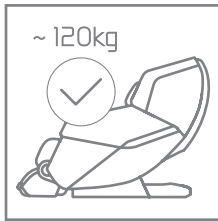

안전사고, 변형, 소음, 가죽 마모,
고장 등의 원인이 됩니다.

신장이 150cm 이하이거나
190cm 이상인 사람은 마사지
감이 다를 수 있습니다.

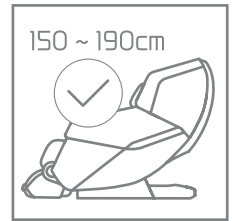

마사지부의 밀착 부족, 통증, 부상
등의 원인이 됩니다.

제품 위에 서 있지 마십시오.
앉은 상태에서만 사용하시기를
바랍니다.




안전사고, 부상, 상해, 제품 손상,
고장 등의 원인이 됩니다.

마사지 받은 후에 잠이 드셨을
때는 저체온을 주의하십시오.



안전사고, 부상 등의 원인이
됩니다.

제품의 케이블이 손상되거나
과도하게 구부러지지 않도록
주의하십시오.

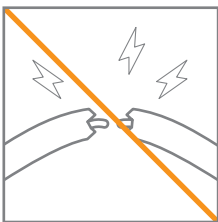


감전, 화재, 고장 등의 원인이
됩니다.

제품의 안전한 사용을 위해
낮은 강도의 마사지부터
시작하시기를 바랍니다.




부상의 원인이 됩니다.

제품의 다리 마사지부를 손으로
들지 마십시오.

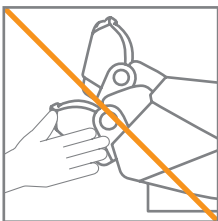

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.

제품 후면부에 기대거나
매달리지 마십시오.

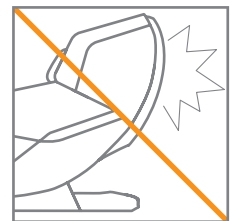


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장
등의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의 사항


⚠ 주의

반려동물이 전원 케이블을 물지 않도록 주의하십시오.

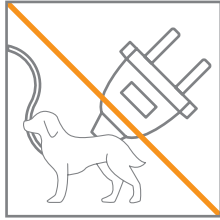


감전, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품이 리클라이닝 될 때 다리 마사지부 위에 서 있지 않도록 주의하십시오.

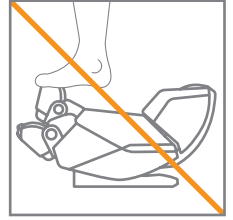


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 콘센트에 꽂기 전에 전원 스위치가 꺼짐으로 되어 있는지 확인하십시오.

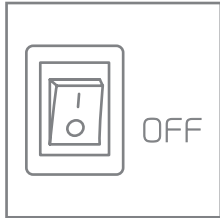


감전, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품 후면부, 팔 마사지부, 다리 마사지부 위에 걸터앉지 마십시오.

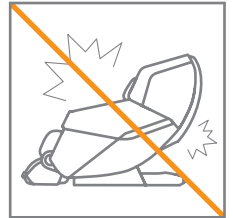


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

리모컨은 지정된 위치에 보관하시고, 힘으로 잡아당기거나 충격을 주지 마십시오.

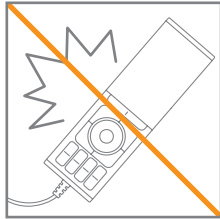


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

리모컨 버튼을 빠른 속도로 연타하지 마시고, 버튼이 눌러 있는 상태가 되지 않도록 주의하십시오.

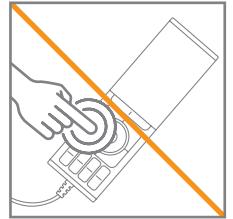

안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

블루투스 스피커 사용 시, 너무 큰 볼륨으로 장시간 사용하지 마십시오. (*일부 제품 해당)

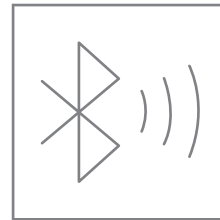


청력 손상의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의 사항


⚠ 주의

제품을 물로 세척하지 마십시오.

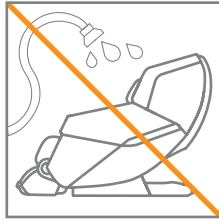


감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품을 청소하거나 손질할 때는 전원 플러그를 뽑고 진행하시기를 바랍니다.

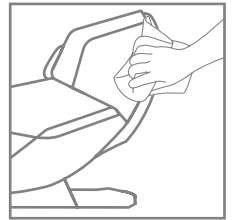


안전사고, 부상, 제품 손상, 고장 등의 원인이 됩니다.

제품을 청소할 때 부드러운 천으로 가볍게 닦아주고, 시너 등의 유기용제나 화학약품 등을 사용하지 마십시오.

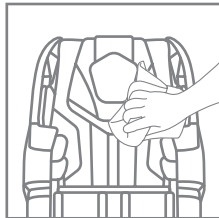


제품 손상의 원인이 됩니다.

천연가죽 시트는 반드시 가죽 전용 클리너로 닦으시기를 바랍니다. (*일부 제품 해당)

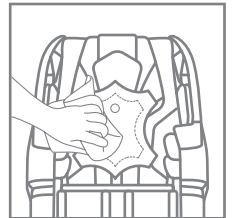

제품 손상의 원인이 됩니다.

USB 충전 단자를 사용하여 충전 시, 차폐 케이블을 사용하여 주시기를 바랍니다. (*일부 제품 해당)

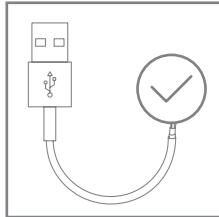

감전, 화재, 고장 등의 원인이 됩니다.

※ 차폐 케이블은 외부에서 유입되는 노이즈와 내부에서 발생하는 노이즈를 억제하기 위해 전선에 알루미늄 포일을 감싸거나 구리나 스틸을 그물망 형태로 촘촘하게 엮어 보호한 케이블을 의미합니다.

안전을 위한 주의 사항

금기 사항

Ⓢ 마사지체어를 사용하면 안 되는 고객

- 혈전증 (thrombosis)과 색전증 (embolism), 중증 하지 정맥류 등 의사로부터 사용이 부적절하다고 진단받은 자
- 임신 초기인 자 (1기, 초기 3개월)
- 심장, 신장 및 간에 중증 질환이 있는 자
- 조현병 또는 다른 정신 질환이 있는 자
- 뇌전증 또는 뇌 질환이 있는 자
- 신체적, 정신적으로 일상생활 동작을 혼자 수행하기 어려운 자

Ⓢ 마사지체어 사용 시 전문의 진단이 필요한 고객

- 임신 초기를 제외한 임신부 중 제품 사용으로 인해 부작용이 우려되는 자
- 제품에 의한 찰과상, 타박상 (좌상) 등
- 제품의 과도한 사용 및 압력으로 인한 근육 및 힘줄 손상 등
- 알레르기 증상 및 화상 등
- 고령, 급격한 체중 감소 혹은 기타 질환으로 근 감소가 있는 자
- 정상보다 체온이 높으면서 오한, 발열 등 급성 염증 증상을 동반한 자
- 중증 피부 질환 (욕창, 화상) 등이 있는 자
- 급성 디스크 및 급성 경추염좌 (cervical sprain) 진단을 받은 자
- 악성 종양 등이 있는 자
- 중증의 골다공증이 있는 자
- 이식형 심장박동기 등 인체 이식형 전자 의료기기를 사용하고 있는 자
- 의사 표현이 자유롭지 못한 자
- 거동이 불편한 자
- 기타 몸의 이상을 느끼고 있는 자

온열 기능 사용 시 주의 사항

- 장시간 사용 시, 피부에 저온화상 등 위험이 있을 수 있으니 연속으로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 가열 표면을 가지고 있습니다. 열에 둔감한 사용자는 기기를 사용할 때 주의하여 주시기를 바랍니다.
- 피부가 약한 아이들이나 노인, 환자들은 보호자의 보호가 필요하며 더욱더 주의하여 사용하시기를 바랍니다.
- 온열 기능을 켜놓은 상태에서 잠들지 마십시오.
- 온열이 작동되는 부위에는 맨살이 닿지 않게 해주세요.

제품 사용 시 발생 가능한 부작용 사례

Ⓢ 제품 사용 중에 다음과 같은 부작용이 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.


- 제품에 의한 찰과상, 타박상 (좌상) 등
- 제품의 과도한 사용 및 압력으로 인한 근육 및 힘줄 손상 등
- 알레르기 증상 및 화상 등
- 노인성 척추골절 및 염좌 등

제품 각 부분 명칭

박스 개봉


본 제품은 2개의 박스로 구성되어 있습니다. 구성품을 잘 확인하시길 바랍니다.

- 본체 박스: 본체, 머리 시트, 어깨 마사지부, 등/엉덩이 시트, 액세서리 박스 (리모컨, 전원 케이블, 매뉴얼)
- 다리 마사지부 박스

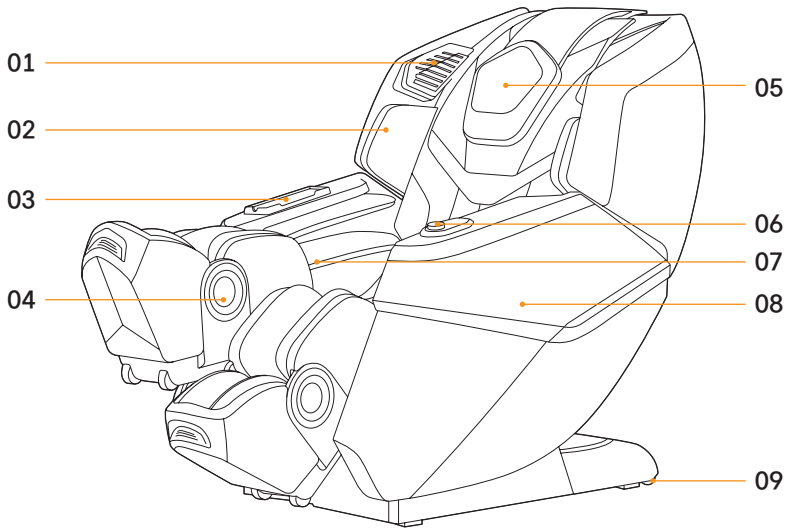

외부 구성

- 01 스피커
- 02 어깨 마사지부
- 03 리모컨 거치대
- 04 다리 마사지부
- 05 머리 시트
- 06 내츱키
- 07 팔 마사지부
- 08 사이드 패널
- 09 이동 바퀴

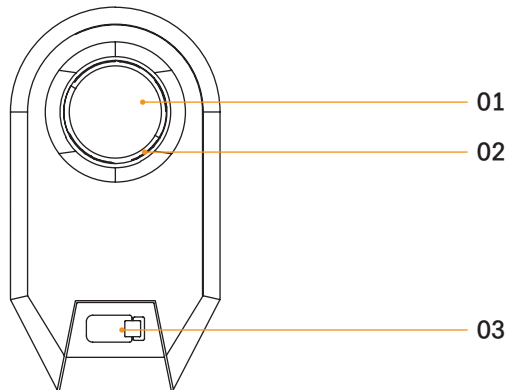

내츱키 구성

- 01 전원 · 로보 케어
 - ※ 전원: 버튼을 길게 눌러 전원을 켜고 끕니다.
 - ※ 로보 케어: 버튼을 순차적으로 눌러 모드를 빠르게 변경할 수 있습니다.
- 02 전신 각도 조절
 - ※ 다이얼을 시계방향으로 돌려 전신 각도를 세우고, 반대로 돌려 눕힐 수 있습니다.
- 03 USB 연결 단자


이동 및 설치

이동 방법 및 설치 공간 확인하기

- 01 제품을 설치하기 전에 충분한 공간이 있는지 확인합니다.
- 02 제품 주변에 장애물이나 부속물이 없도록 하십시오.
- 03 제품 머리 후면부가 유리창을 향하지 않도록 설치하십시오.
- 04 제품을 뒤로 눕혀서 이동하기 편리한 각도로 만들어 원하는 곳으로 이동 후, 천천히 앞으로 내려 설치합니다.
- 05 설치할 때 제품 밑으로 케이블 선이 깔리지 않도록 주의하시기를 바랍니다.

※ 제품의 무게로 바닥에 흠집 및 이염이 생길수 있으니 주의 바랍니다.


※ 제품 이동 시, 반드시 2인 이상 함께 움직입니다.

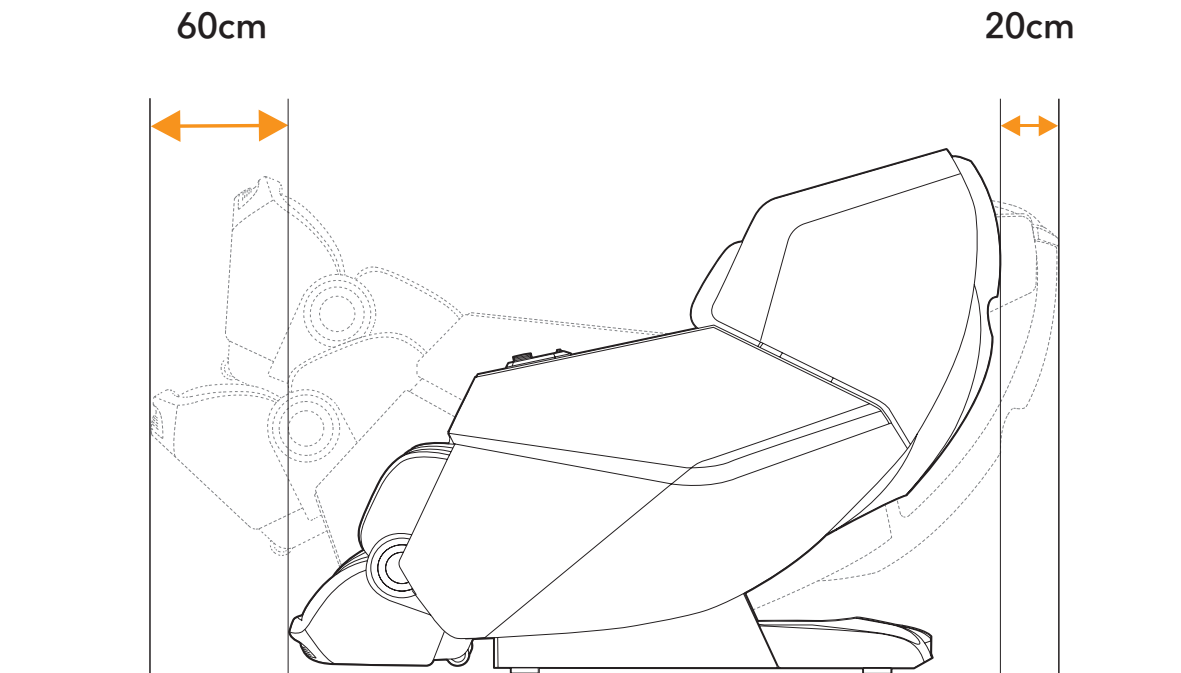

제품 연결 방법


리모컨 연결하기

리모컨 케이블을 오른쪽 사이드 패널 안쪽에 위치한 리모컨 연결 단자의 홈에 맞춰 연결합니다.

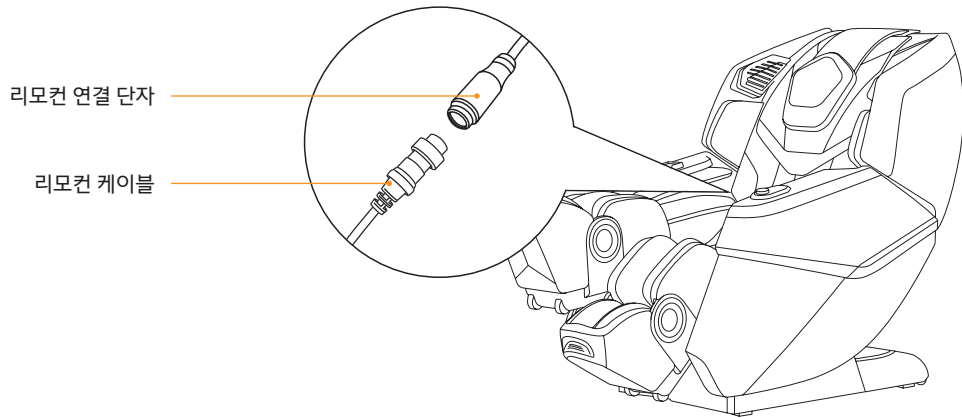

전원 연결하기

전원 케이블을 후면 하단에 위치한 전원 연결 단자의 홈에 맞춰 연결합니다.
전원 연결 후 전원 스위치를 켜시면 됩니다.

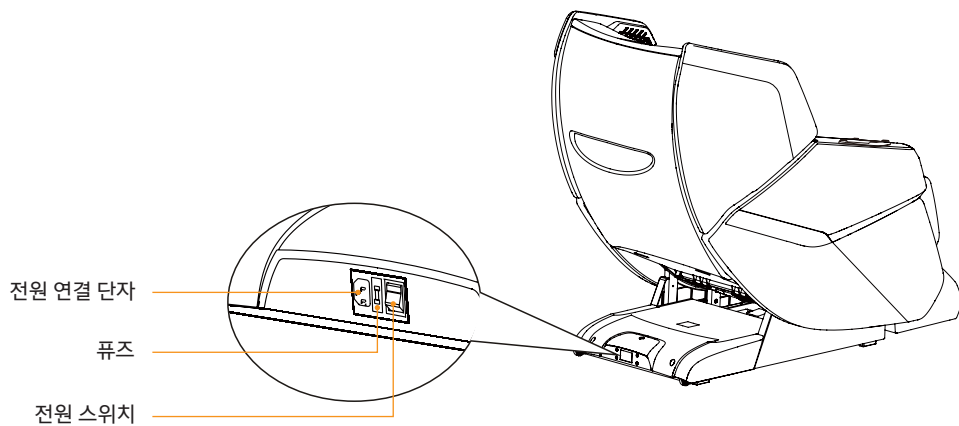

Wi-Fi 연결 방법 - 소프트웨어 업데이트

Wi-Fi 연결하기

[바디프랜드 Wi-Fi 연결 도우미] 앱을 통해 서비스 기사의 방문 없이 최신 소프트웨어로 업데이트가 가능합니다.

1. 연결 전 확인하기


제품과 Wi-Fi 공유기의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.

※ 설치 전 공유기가 2.4GHz를 지원하는지 확인합니다. (5GHz 미지원)

※ 사용 중인 Wi-Fi 공유기의 SSID(공유기 이름) 및 비밀번호를 미리 확인합니다.

2. 앱 설치하기


스마트폰-구글 플레이 스토어 또는 애플 앱 스토어에서 [바디프랜드 Wi-Fi 연결 도우미]를 검색하여 앱을 다운로드합니다. 이후 앱에서 안내하는 방법에 따라 연결을 완료시킵니다.

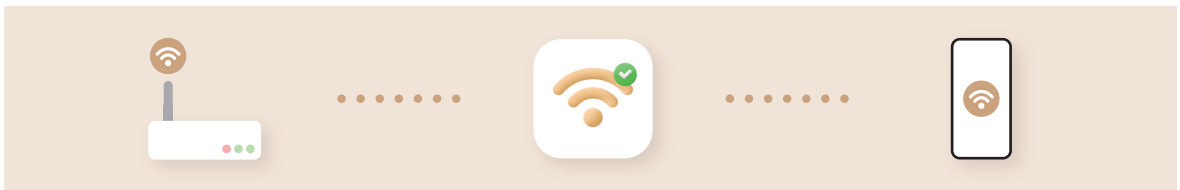

참고 사항

- 01 바디프랜드 본 제품은 2.4GHz만 지원합니다. (5GHz 미지원)
- 02 일부 스마트기기에서는 디바이스 차이로 Wi-Fi 연결이 안 될 수 있습니다.
- 03 Android OS 5.0 이상 / iOS 12.0 이상에서 지원됩니다.
- 04 네트워크 환경 불안정 또는 방화벽 문제로 연결이 되지 않을 수 있습니다.
- 05 인터넷 서비스 제공 업체에서 알려준 방법으로 조치한 후에도 Wi-Fi 연결이 되지 않을 경우 고객센터에 문의하십시오.
- 06 서비스의 기능은 제품 사양에 따라 다를 수 있으며, 앱 업데이트에 따라 사전에 예고 없이 변동될 수 있습니다.
- 07 Wi-Fi 통신을 사용하지 않을 경우 해당 통신 연결을 해제하십시오.
- 08 스마트기기에서 실행되는 소프트웨어가 외부 위협요인(멀웨어 등)으로 인해 변조되는 것을 막기 위해 스마트기기에 백신 프로그램을 설치하여 정기적으로 바이러스 검사를 수행하고, 백신 프로그램을 항상 최신 버전으로 업데이트를 해주십시오.

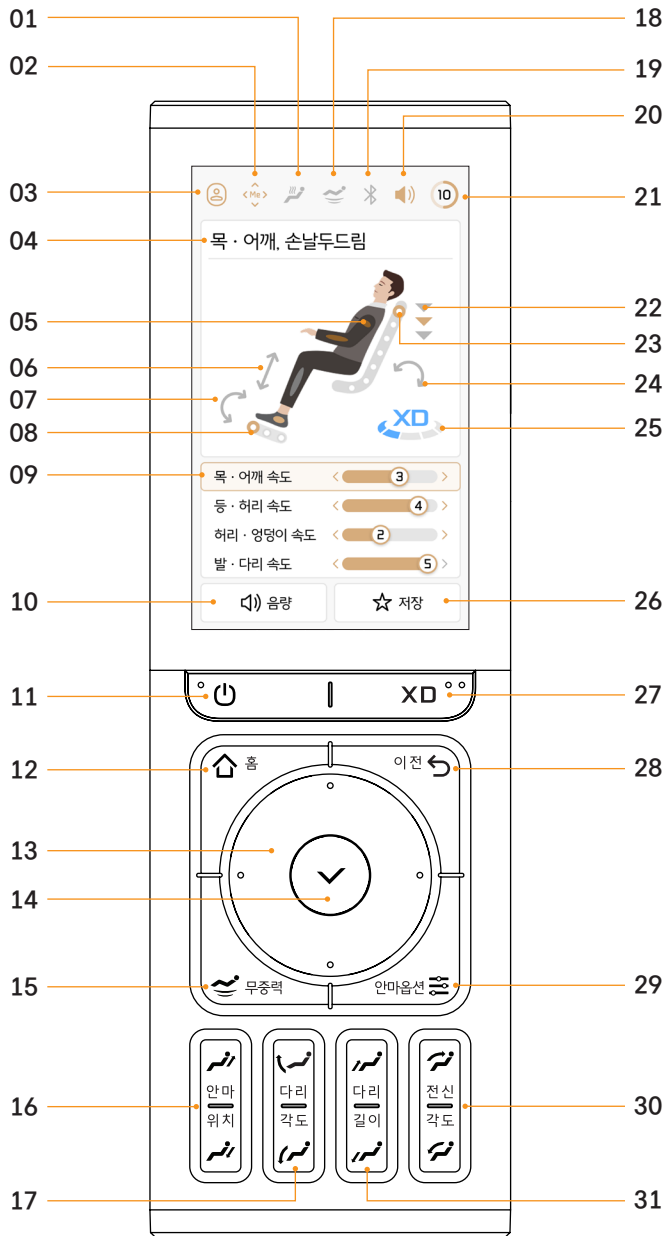



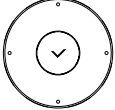

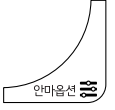
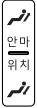

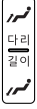

리모컨 버튼 설명



리모컨 구성

- 01 온열 표시
- 02 자동·수동 프로그램 표시
- 03 사용자 계정 표시
- 04 마사지 모드 표시
- 05 에어백 표시
- 06 다리 길이 조절 표시
- 07 다리 각도 조절 표시
- 08 발바닥 롤러 표시
- 09 목·어깨 속도 표시
등·허리 속도 표시
허리·엉덩이 속도 표시
발·다리 속도 표시
- 10 음량 조절
- 11 전원·일시 정지
- 12 홈
- 13 상/하/좌/우
- 14 확인
- 15 무중력 각도 설정
- 16 안마 위치 및 어깨 위치 조절
- 17 다리 각도 조절
- 18 무중력 상태 표시
- 19 블루투스 연결 표시
- 20 음량 표시
- 21 마사지 시간 표시
- 22 어깨 위치 표시
- 23 마사지 모듈 위치 표시
- 24 전신 각도 조절 표시
- 25 XD 단계 표시
- 26 즐겨찾기 저장
- 27 XD 단계 설정
- 28 이전
- 29 안마 옵션
- 30 전신 각도 조절
- 31 다리 길이 조절


리모컨 버튼 설명

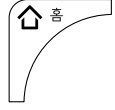	전원 · 일시정지	<p>전원: 사용 중 [전원 버튼]을 누르고 안내 화면을 확인한 후, '예'를 선택하면 모든 동작이 멈추게 되며 마사지볼과 기기는 자동으로 원상 복귀됩니다.</p> <p>일시 정지: 사용 중 [전원 버튼]을 누르면 동작이 일시 정지되며, 안내 화면을 확인한 후 '아니오'를 선택하면 마사지가 재실행됩니다.</p> <p>※ [●] 점자 : 시각장애인을 위한 점자가 표기되어 있습니다.</p>
	XD 단계	<p>마사지볼의 돌출 정도를 사용자의 체형에 맞게 설정할 수 있습니다.</p> <p>※ [●●] 점자 : 시각장애인을 위한 점자가 표기되어 있습니다.</p>
	홈	사용 중 [홈 버튼]을 누르면 홈 화면이 나옵니다.
	이전	이전 화면으로 돌아갑니다.
	상/하/좌/우 확인	<p>[상/하/좌/우 버튼]으로 이동 및 선택한 뒤 [확인 버튼]으로 실행할 수 있습니다.</p> <p>현재 마사지 화면에서 [상/하 버튼]으로 마사지 부위를 선택한 후, [좌/우 버튼]으로 마사지 속도 단계를 조절할 수 있습니다.</p>
	무중력	<p>무중력 상태와 비슷한 자세로 각도 조절이 되는 기능으로 마사지를 받는 최적의 자세로 만들어 줍니다.</p> <p>버튼을 순차적으로 눌러 무중력 단계를 조절합니다. [1 → 2 → 3]</p> <p>※ 일부 프로그램에서는 무중력 설정이 불가능합니다.</p>
	안마 옵션	롤링, 온열, 에어 강도를 조절할 수 있습니다.
	안마 위치	<p>자동 프로그램 실행 시, 어깨 위치를 수동으로 조절할 수 있습니다.</p> <p>※ 나만의 케어는 '마사지볼 고정' 메뉴가 별도로 있으며, 부위집중 모드 실행 중에는 [안마 위치 버튼]을 눌러도 한 위치에 고정되지 않습니다.</p>
	다리 각도	<p>위, 아래로 버튼을 길게 눌러 다리 각도를 조절합니다.</p> <p>※ 일부 프로그램에서는 수동으로 각도 조절이 제한됩니다.</p>
	다리 길이	<p>위, 아래로 버튼을 길게 눌러 다리 길이를 조절합니다.</p> <p>※ 일부 프로그램에서는 수동으로 길이 조절이 제한됩니다.</p>
	전신 각도	<p>위, 아래로 버튼을 길게 눌러 전신 각도를 세우고 눕힙니다.</p> <p>※ 일부 프로그램에서는 수동으로 각도 조절이 제한됩니다.</p>

리모컨 작동 설명

시작하기

[전원 버튼] → 모드 선택 후 [확인 버튼] → 체형 측정 및 어깨 위치 조절 → 마사지 시작

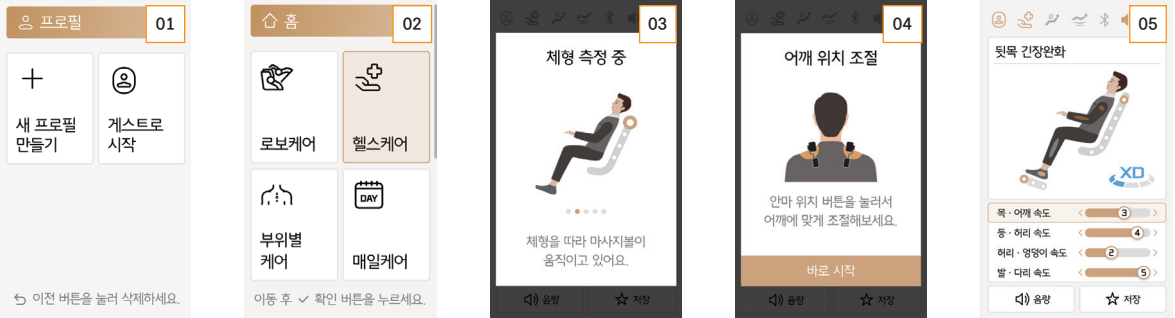

01 새 프로필 만들기

[새 프로필 만들기]를 누른 후 이름을 선택하여 나만의 프로필을 생성합니다.

※ 등록된 프로필로 마사지 프로그램 실행 시, 체형 측정 및 어깨 위치 조절은 최초 1회 진행 후 자동으로 저장되며 이후에는 진행되지 않습니다.

또한 프로그램별로 설정한 '마사지 속도, 롤링 속도, 에어 강도, XD 강도'가 자동으로 저장됩니다.

※ 게스트로 시작할 시, 일부 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.

02 홈 화면

[홈 버튼]을 누르면 나타납니다. 원하는 프로그램을 선택할 수 있고, 그 밖의 마사지체어 기능을 세부적으로 설정할 수 있습니다.

03 체형 측정 중

마사지가 시작되면 자동으로 체형을 측정하여 사용자의 체형에 맞게 세팅합니다. 등과 허리를 바르게 기대어 앉으시기를 바랍니다.

04 어깨 위치 조절

체형 측정이 끝나면 어깨 위치 조절 화면이 나타납니다. [안마 위치 버튼]을 눌러 어깨 위치를 조절한 후 [확인 버튼]을 누릅니다.


※ [확인 버튼]을 누를 경우 마사지는 바로 시작되며, 버튼을 누르지 않을 경우 약 10초 후에 마사지가 자동으로 시작됩니다.

05 현재 마사지 화면

현재 실행 중인 마사지의 상태, 시간 등을 볼 수 있습니다. [상/하 버튼]으로 마사지 부위를 선택하고 [좌/우 버튼]으로 마사지 속도를 조절합니다.

종료하기

[전원 버튼] → 안내 화면 확인 후 '종료' 선택 → 마사지 종료

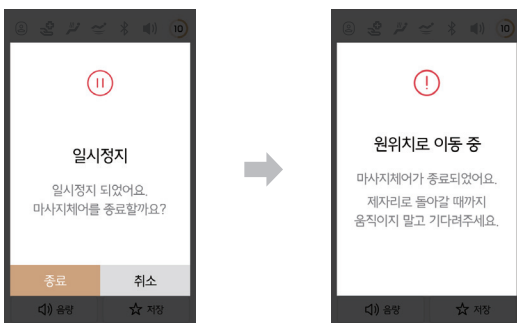

리모컨 작동 설명

다리 마사지부 좌/우 개별 동작



01 다리 각도

[다리 각도 버튼] → [좌/우 버튼]으로 양쪽 / 왼쪽 / 오른쪽 선택 → [다리 각도 버튼] 또는 [상/하 버튼]으로 개별 각도 조절 → [확인 버튼]



02 다리 길이

[다리 길이 버튼] → [좌/우 버튼]으로 양쪽 / 왼쪽 / 오른쪽 선택 → [다리 길이 버튼] 또는 [상/하 버튼]으로 개별 길이 조절 → [확인 버튼]

물체 감지 안내

물체 감지 안내 화면 → 물체 제거 후 [확인 버튼] → 마사지 재시작

※ 물체를 제거한 후에도 지속적으로 감지될 경우, 기기 주변을 다시 한번 확인한 후 안내 화면에 따라 [확인 버튼]을 길게 눌러 원상 복구시킵니다.

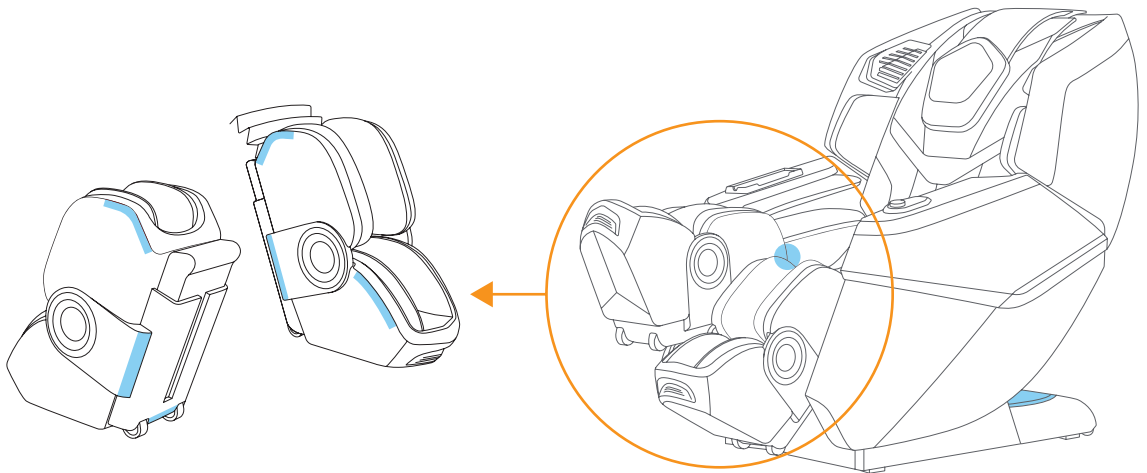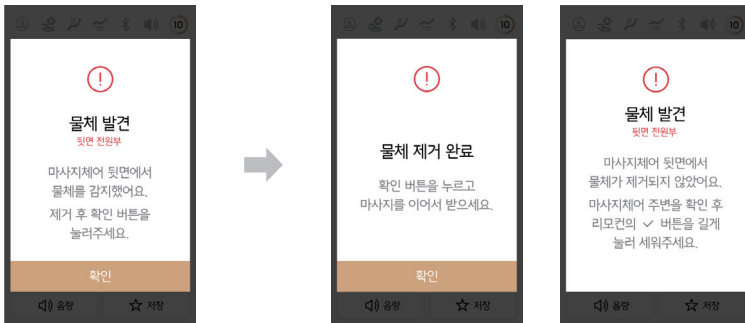

※ 다리부와 후면부에 총 14개의 안전 센서가 있습니다.

리모컨 작동 설명

어깨 위치 조절

자동 프로그램 (로보 케어, 헬스 케어, 부위별 케어, 매일 케어, 멘탈 케어)

01 자동 프로그램 실행 중에 리모컨 하단에 위치한 [안마 위치 버튼]을 누르면 동작이 멈추고 어깨 위치 재설정을 위한 화면이 나옵니다.

02 [안마 위치 버튼] 또는 [상/하 버튼]으로 어깨 위치를 조절한 후, [확인 버튼]을 누르면 마사지가 이어서 실행됩니다.



부위별 퀵 ON/OFF

마사지 실행 중에 부위별 에어 및 롤링 마사지를 빠르게 설정할 수 있습니다.

[작동 방법]

01 현재 마사지 화면 → [상/하 버튼]으로 화면 상단에 있는 사람 이미지로 이동한 후, '하체, 팔, 어깨' 중 원하는 부위를 선택합니다.

02 원하는 부위를 선택한 후, 에어 또는 롤링 마사지를 ON/OFF로 설정합니다.


※ 팔, 어깨 부위는 에어백 설정만 가능합니다.



리모컨 작동 설명


로보 케어

홈 → 로보 케어 → 모드 선택 후 [확인 버튼] → 체형 측정 및 어깨 위치 조절 → 마사지 시작

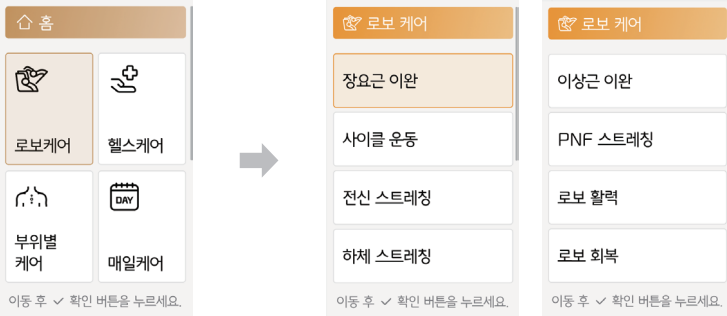

헬스케어

홈 → 헬스케어 → 모드 선택 후 [확인 버튼] → 체형 측정 및 어깨 위치 조절 → 마사지 시작

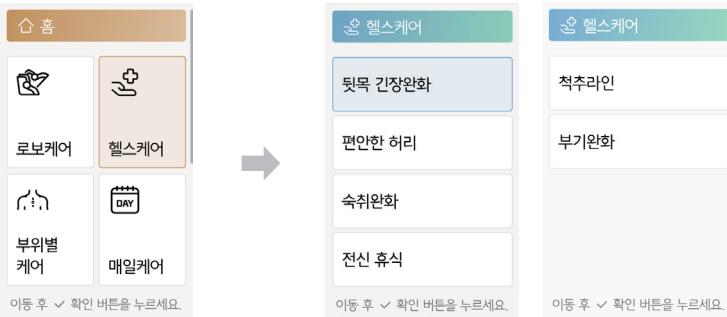

부위별 케어

홈 → 부위별 케어 → 모드 선택 후 [확인 버튼] → 체형 측정 및 어깨 위치 조절 → 마사지 시작



리모컨 작동 설명

매일 케어

홈 → 매일 케어 → 모드 선택 후 [확인 버튼] → 체형 측정 및 어깨 위치 조절 → 마사지 시작



나만의 케어

홈 → 나만의 케어 → 마사지 부위 선택 → 마사지 스타일 선택 → 마사지볼 간격 선택 → 옵션 선택 → '나만의 케어 시작' 선택 후 [확인 버튼] → 마사지 시작

※ 마사지 부위 - [팔, 다리]는 [옵션 선택] 설정만 가능합니다.

※ 마사지 부위 - [직접 선택] 시, [마사지볼 이동 범위] 설정이 가능합니다.

※ 마사지 스타일 - [주무름]은 [마사지볼 간격] 설정이 불가능합니다.



리모컨 작동 설명

멘탈케어

홈 → 멘탈케어 → 모드 선택 후 [확인 버튼] → 체형 측정 및 어깨 위치 조절 → 마사지 시작



즐거찾기

01 저장 방법: 홈 → 원하는 모드 선택 및 시작 → 맞춤 마사지 설정 → 화면 하단 우측에 있는 저장을 누릅니다.

02 실행 방법: 홈 → 즐거찾기 → 목록 → 저장된 모드 중 원하는 모드 선택 → [확인 버튼] → 마사지 시작

03 목록 관리: 즐거찾기는 최대 8개까지 저장할 수 있고, 저장된 모드는 [관리]에서 선택 삭제가 가능합니다.

※ 즐거찾기 등록 내용이 변경되면, 새로운 모드로 저장됩니다.

[즐거찾기 저장 가능한 기능]

자동 프로그램	나만의 케어	
01 모드 선택	01 마사지볼 이동 범위	06 마사지 부위
02 마사지 속도	02 마사지 방식	07 전신 각도
03 XD 강도	03 마사지볼 간격	08 다리 각도
04 에어·롤링 강도	04 XD 강도	09 에어·롤링 강도
05 온열 강도	05 온열 강도	

롤링

홈 → 설정 → 마사지 옵션 → 롤링 → 속도 5단계 조절



리모컨 작동 설명

온열

홈 → 설정 → 마사지 옵션 → 온열 → 위치 선택 및 강도 3단계 조절

※ 온열 기능은 열선이 설치된 범위에 제한적으로 적용됩니다.

※ 저온 화상 방지를 위하여 온열 강도를 3단계로 20분 이상 사용 시, 2단계로 자동 조절됩니다.



에어

홈 → 설정 → 마사지 옵션 → 에어 → 위치 선택 및 강도 5단계 조절



마사지 시간 변경


홈 → 설정 → 마사지 시간 변경 → 10 · 20 · 30분

※ 일부 프로그램에서는 마사지 시간 변경이 불가능합니다.



음량 · 밝기

홈 → 설정 → 음량 · 밝기 → 스피커 볼륨 · 리모컨 버튼음 · 화면 밝기

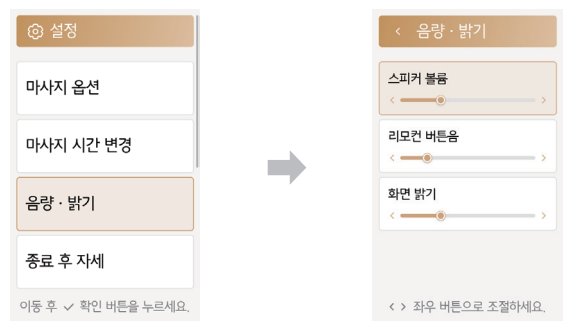

리모컨 작동 설명

종료 후 자세

홈 → 설정 → 종료 후 자세 → 마사지 자세 유지 · 앉기



종료 후 불 위치

홈 → 설정 → 종료 후 불 위치 → 마사지불 위치 및 간격 · XD 단계 조절 → 저장

※ 일부 프로그램에서는 종료 후 불 위치 설정이 불가능합니다.



마사지체어 연결

홈 → 설정 → 마사지체어 연결 → Wi-Fi · 블루투스



① 블루투스 설정 방법

01 홈 → 설정 → 마사지체어 연결 → 블루투스 'ON'으로 설정

02 '연결' 선택 후 [확인 버튼]

※ 블루투스 자동 연결을 'ON' 상태로 만들면 마사지체어 전원을 켜을 시, 마지막으로 연결되었던 기기에 자동으로 다시 연결됩니다.

03 모바일 기기 - 블루투스 연결 활성화 → 블루투스 검색 → 팔콘S 블루투스를 찾아 연결

※ 명칭: FALCON-####

####은 제품의 고유 블루투스 번호입니다. 한 공간에 여러 대의 마사지체어가 있을 때 고유 번호를 확인한 후 연결 바랍니다.

고유 번호(모델 번호)는 블루투스 연결 시, 안내 팝업에서 확인할 수 있습니다.

언어


홈 → 설정 → 언어 → 한국어 · 영어 · 중국어



소프트웨어 업데이트

홈 → 설정 → 소프트웨어 업데이트

※ 최신 소프트웨어로 업데이트하기 위해 Wi-Fi를 연결 바랍니다.

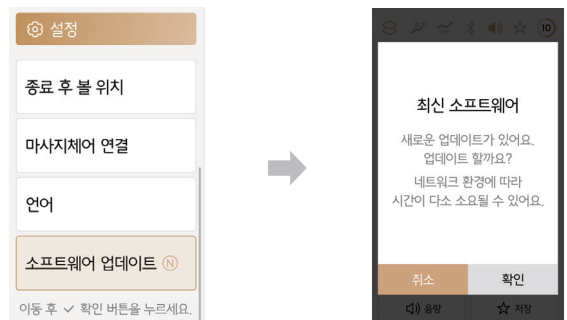


로보 케어 · 헬스 케어

로보 케어

장요근 이완	정적 스트레칭 동작을 통해 코어 근육을 이완하는 마사지입니다.
사이클 운동	사이클 타는 동작을 통해 무릎과 고관절 주위 근육을 이완시켜 하체의 유연성을 도와주는 마사지입니다.
전신 스트레칭	척추 주변부 마사지와 함께 머리 뒤편을 지지하고 하지를 당겨 척추를 강하게 스트레칭해 주는 마사지입니다.
하체 스트레칭	골반을 지지하고 하지를 당겨 하체를 위주로 강하게 스트레칭해 주는 마사지입니다.
이상근 이완	엉덩이 뒤쪽의 근육을 이완시켜 유연성을 돕는 마사지입니다.
PNF 스트레칭	하체 근육의 이완과 근육 운동 동작이 함께 진행되는 마사지입니다.
로보 활력	피로가 많이 쌓이는 부분을 주물러주면서 지압해 주는 마사지입니다.
로보 회복	목과 허리 위주로 전체적으로 부드럽게 지압하여 다리의 유연성을 돕는 마사지입니다.

헬스 케어

뒷목 긴장완화	후두골과 목뒤에 붙어 있는 4개의 근육을 집중적으로 이완시키는 마사지입니다.
편안한 허리	등과 허리를 부드럽게 풀어주는 마사지입니다.
숙취 완화	숙취 해소 등에 도움이 되는 주요 자극점을 위주로 지압하는 마사지입니다.
전신 휴식	전신을 지압하여 편안한 휴식을 제공하는 마사지입니다.
척추 라인	등과 허리를 중심으로 척추 라인을 따라 지압하는 마사지입니다.
부기 완화	전신 에어백을 이용하여 부기 완화에 도움을 주는 순환 마사지입니다.

 노약자, 임산부는 스트레칭 기능이 포함된 모드의 사용을 자제 바랍니다.

부위별 케어 · 매일 케어 · 멘탈 케어

부위별 케어


전신	전신 바른 자세와 근 이완에 도움을 주는 마사지입니다.
목 · 어깨	목, 어깨 부위를 주무름과 스트레칭으로 이완시키는 마사지입니다.
허리 · 엉덩이	허리, 엉덩이 주변부를 지압과 주무름으로 이완시키는 마사지입니다.
발 · 다리	다리 부위에 집중적으로 다양한 마사지를 제공해 줍니다.

매일 케어

깊은 수면	30분간 부드럽고 단조로운 전신 마사지와 각도 변화를 통해 수면을 유도합니다.
운동 전 후	운동 후 피로해진 팔, 다리, 발바닥을 강하게 자극해서 피로를 풀어 주는 마사지입니다.
아침 활력	아침잠이 많아 하루를 상쾌하게 시작하기 어려운 분들을 위한 아침 특화 마사지입니다.
육아 후 힐링	육아로 피로한 목과 허리, 팔, 다리 집중 마사지입니다.
수험생 목 · 허리	바쁜 하루를 보내고 지친 수험생을 위한 목 · 허리 집중 마사지입니다.
수험생 휴식케어	바쁜 하루를 보내고 지친 수험생을 위한 휴식 집중 마사지입니다.
수험생 수면케어	바쁜 하루를 보내고 지친 수험생의 피로를 풀어주고 숙면을 도와주는 집중 마사지입니다.
수험생 스트레칭	바쁜 하루를 보내고 지친 수험생을 위한 전신 스트레칭 마사지입니다.
식후 장 건강	장에 유익한 자극점과 엉덩이 주변부를 마사지합니다.

멘탈 케어

마음위로	지나간 일에 대한 후회를 덜고 우울한 마음을 위로하는 힐링 마사지입니다.
호흡조절	중요한 시험이나 발표를 앞둔 분들을 위해 호흡조절 요법이 함께 제공되는 마사지입니다.
심상 모드	나만의 휴양지에서 사운드와 함께 자유롭게 상상하고 싶은 분들을 위한 마사지입니다.
몰입의 즐거움	과도한 학업 및 업무로 인해 피로한 두뇌에 휴식을 제공하고, 심신을 재충전하고 싶은 분들을 위한 마사지입니다.

 노약자, 임산부는 스트레칭 기능이 포함된 모드의 사용을 자제 바랍니다.

XD 모듈 설명

바디프랜드만의 독보적인 신개념 XD 마사지 시스템

1. 넓고, 깊은 XD 마사지

- XD 모듈의 긴 회전축을 이용하여 넓은 부위의 주무름 마사지를 제공합니다.
- 마사지볼이 X자를 그리며 섬세하고 깊이감 있는 마사지를 제공합니다.

2. 인체 공학적인 XD의 마사지 각도

- 마사지 방식에 따른 각도를 조절하여 신체 부위별 마사지를 제공합니다.
- 큰 근육에는 강력하게, 작은 근육에는 부드러운 마사지를 제공합니다.
- 실제 사람의 손으로 받는 것과 유사한 각도의 마사지를 구현합니다.

XD 입체 마사지

XD 모듈의 돌출 범위를 볼 수 있으며, 개인 선택에 맞게 마사지 강도를 변경할 수 있는 맞춤형 시스템

파란색 5단계 - XD 모듈의 돌출 상태를 단계별로 조절하여 개인 선택에 맞게 최적화된 마사지를 제공합니다.



제품 규격 및 사양

본 제품 사양은 성능 향상이나 개선을 위하여 별도의 고지없이 일부 변경될 수 있습니다.

모델명	BFR-7211
정격전압	220-240 V~, 50-60 Hz
소비전력	150 W
USB	5 V, 3 A
오토 타이머	10 · 20 · 30분
에어백 범위	어깨 · 팔 · 종아리 · 발등 · 발뒤꿈치
롤링 범위	발바닥
마사지볼 범위	목 - 엉덩이
리모컨	4 inch
스피커	2 ch, 6 W
제품 무게	102 kg
세웠을 때	156(길이) X 75(폭) X 116(높이) cm
눅혔을 때	181(길이) X 75(폭) X 84(높이) cm
일반적 명칭	전기 마사지기

고장 신고 전 확인 사항

제품에 이상이 발생하였을 경우 서비스 센터에 의뢰하기 전 아래 사항을 먼저 확인하시기를 바랍니다.

증상	원인	해결 방법
메인 전원을 켜는데도 작동이 안 되는 경우	리모컨 또는 내측키 전원 버튼 미실행	전원 버튼을 누르십시오
	프로그램을 선택 안 한 경우	프로그램을 선택 및 실행하십시오
	전원 플러그 접촉 불량	전원 플러그를 콘센트에 정확히 꽂으십시오
	전원 플러그, 전원 케이블 파손	
	퓨즈가 탄 경우 전자 회로 이상	A/S 센터에 연락하십시오
작동 중 소음이 발생한 경우	일반적인 기계음 발생 - 에어 펌프 진동음, 에어 흡입/토출음 - 에어백 팽창으로 인한 사출 소음 - 솔레노이드 밸브 개폐음 - 시트 마찰음	제품이 정상적으로 작동하는 소리로 고장이 아닙니다
	오랜 시간 사용한 경우	다시 시작하십시오 (30분 후)
	오랜 시간 사용으로 인한 마모	A/S 센터에 연락하십시오
작동 중 동작이 갑자기 멈춘 경우	갑작스러운 전원 공급 차단	전원을 다시 실행하십시오
	작동 시간 종료	다시 시작하십시오 (30분 후)
각도 변경 중 갑자기 멈춘 경우	안전 센서 및 장애물 여부 확인	장애물을 제거하고 재실행합니다
	과도한 사용, 무리한 충격	다시 시작하십시오 (30분 후)
작동 중 마사지볼이 내피 천에 걸리거나 튕기는 경우	마사지볼과 시트의 마찰	주무름 동작 시 마사지볼로 인한 일반적인 현상으로 고장이 아닙니다
원위치로 복귀가 안 될 경우	종료 중에 리모컨 버튼을 누른 경우	전원을 다시 실행하십시오
	과도하게 작동시킨 경우	A/S 센터에 연락하십시오
리모컨 과열	오랜 시간 사용한 경우	다시 시작하십시오 (30분 후)
전원 케이블 과열	과도한 부하	다시 시작하십시오 (30분 후)
	다른 비정상 원인	A/S 센터에 연락하십시오
에어백 작동이 안 되는 경우	에어 연결 호스가 이탈한 경우 에어 관련 전원 선 끊어짐	A/S 센터에 연락하십시오

서비스 기간

- 01 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 설치 일로부터 정해진 기간 내에 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
- 02 공동 이용시설이나 영업용으로 사용 시, 별도 단축 적용됩니다.

무상 A/S 품목	마사지체어 내부의 마사지부를 운용하는 기계/기구류
	메인보드류, 각종 모터류, 에어펌프류
	내부 전기, 전자 배선 및 에어 호스류
유상 A/S 품목	시트류 고객의 사용 빈도로 인한 변색, 탈색, 찢어짐, 낡음 또는 반려동물에 의한 파손 (천, 인조가죽, 천연가죽으로 구성된 외피, 내피 부분) ※ 본 제품의 시트는 사용 빈도 및 보관 상태에 따라 수명이 달라질 수 있으며, 손상이 확인되면 구매처로 연락하여 교체 후 사용하시기를 바랍니다.
	리모컨 / 케이블 고객의 사용 빈도로 인한 노후 증상, 임의 개봉 또는 떨어뜨림 등으로 발생한 고장, 파손
	기타 고객과 관련한 요청사항으로 인한 마사지체어 이동 및 분해/조립이 필요할 시, 비용이 청구될 수 있습니다.

유상 서비스에 대한 안내

다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 01 제품 내에 물, 음료수, 커피, 기타 이물질이 투입하여 고장이 발생하였을 경우
- 02 제품에 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 03 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 04 바디프랜드 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 05 사용 전압을 잘못 사용하여 고장이 발생하였을 경우
- 06 고객이 제품을 임의 분해하여 파손된 경우
- 07 바디프랜드 수리기사 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생한 경우
- 08 천재지변에 의한 고장이 발생하였을 경우
- 09 사용 설명서 내에 있는 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 10 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 11 고객의 사용 빈도나 부주의로 수명이 단축된 소모품
- 12 지속적인 햇빛, 자외선 노출로 인해 외관 사출이 탈색 및 변색한 경우

※ 단 소비자 과실이나 사용으로 인한 경우가 아님을 소비자가 증명하거나, 당사의 A/S 판정 기준에 적합한 경우 무상 A/S에 준할 수 있습니다.

반품 및 교환 불가 사유

본 제품은 설치하는 전자제품으로 하기와 같은 사유로 반품 및 교환이 불가합니다. (설치 후 사용 시 제품의 가치가 현저히 하락하여, 새 제품으로의 판매가 불가능)

- 01 개인 변심(색상, 가격 변동 등)으로 인한 교환 및 반품 불가
- 02 중요한 수리를 필요로 하는 하자가 아닌 경우, 설치 후 교환 및 반품 불가 (A/S로 진행)
- 03 개인차(마사지 강도, 신체 사이즈 등)로 인한 교환 및 반품 불가 (구매 전 제품 테스트 권장)

제품 보증서

- 01 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 02 무상 서비스 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기를 바랍니다.
- 03 본 제품을 개인, 가정용으로만 사용하시기를 바랍니다.
- 04 본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.
- 05 본 보증서는 재발행하지 않습니다.

제품명	팔콘S	모델명	BFR-7211
제조일자	제품 표시사항 참조	제조번호	제품 표시사항 참조
구입처명	주식회사 바디프랜드	구입처 연락처	02-3448-8980
설치일자	년 월 일	무상보증기간	년 월 일

고객란	성 명:
	주 소:
	연락처:

- ※ 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우, 설치일로부터 산정된 기간의 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
- ※ 본 제품을 가정용 이외의 용도로 사용할 경우, 보증기간은 단축 적용됩니다.
- ※ 유/무상 서비스 기준은 당사가 규정한 A/S 품목에 준하여 적용됩니다. (고객 서비스 안내 페이지 참고.)
- ※ 품질보증 기간은 설치일로부터 1년입니다.

본 사용 설명서를 폐기할 때는 해당 지역의 분리수거 규정에 따라 처분하여 주십시오.

BODYFRIEND

메모


메모

FALCON·S

제품명	전기 마사지기
모델명	BFR-7211
A/S 연락처	02)3448-8980
매뉴얼 넘버	250819



모바일 사용 설명서

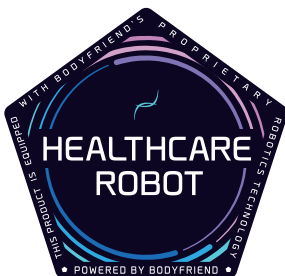

헬스케어로봇 기업 바디프렌드와 함께 10년 더 건강한 삶을 누리세요!

바디프렌드는 기술·디자인·품질·서비스·고객 만족에 이르는 5가지 분야에서 누구도 따라올 수 없는 글로벌 헬스케어로봇 기업으로 나아가고 있습니다. 2007년 대한민국 최초의 마사지케어 기업으로 시작한 바디프렌드는 언제나 '건강수명 10년 연장'을 최고의 가치로 두고 혁신을 거듭해 마침내 2022년 업계 최초로 두 다리가 따로 움직이는 헬스케어로봇®을 탄생시켰습니다. 앞으로도 바디프렌드는 인공지능(AI) 기반의 로보틱스 테크놀로지를 강화해 개인 맞춤형 건강 서비스를 제공하는 '홈 헬스케어 플랫폼'으로 도약해 갈 것입니다. '건강수명 연장의 길'로 향하는 바디프렌드와 함께 집에서 편안하게 마사지를 받으며 행복한 라이프스타일을 즐기시기 바랍니다.